

schülke -†



schülke otacza opieką

Kompleksowe rozwiązania w zakresie higieny i dezynfekcji dla profesjonalistów



schülke -†

we protect lives
worldwide

Naszą przewagą jest doświadczenie



➤ Naszą najważniejszą wartością jest zdrowie

Jesteśmy firmą produkującą produkty chemiczne i farmaceutyczne. Usługi, które oferujemy, i produkty, które wytwarzamy, chronią ludzi przed kontaminacją i infekcjami. Przez ponad 130 lat naszej działalności na światowych rynkach nauczyliśmy się, że łatwiej jest zapobiegać infekcjom niż je leczyć.

Nasz świat się zmienia – planeta staje się coraz mniejsza, zacierają się granice między państwami. Ludzie podróżują swobodnie od kraju do kraju, nieświadomi, że w podróż ze sobą zabierają niewidzialnych pasażerów – mikroorganizmy. Związane z tym ryzyko jest często bagatelizowane, a wysiłki i środki kierowane są, by zwalczać, a nie zapobiegać wywoływanym przez mikroorganizmy infekcjom. Obecny system higieny i ochrony przed mikroorganizmami nie jest idealny – nasza firma pragnie zmienić ten stan rzeczy, oferując skuteczne produkty, specjalistyczne porady oraz szeroki zakres usług.

Wierzymy w moc, jaką niesie partnerstwo – szukając najlepszych rozwiązań i współpracując z czołowymi ekspertami w dziedzinie medycyny, farmacji i przemysłu, dążymy do tego, by zapewnić naszym produktom innowacyjność oraz doskonałość.

Pragniemy też, by nasze sprawdzone, bezpieczne rozwiązania były dostępne jak najszybciej po pojawieniu się problemu związanego z prewencją lub zwalczaniem ogniska zakażenia.

Jako eksperci w tej dziedzinie musimy zawsze być na czasie, a nawet go wyprzedzać – stosujemy więc najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Na przykład poprzez użycie oktenidyny, naszej nowoczesnej substancji czynnej, którą wykorzystujemy w kilku produktach, jak np.: octenisept®, który jest lekiem na rany i błony śluzowe, octeniderm® – lek do dezynfekcji skóry, octenilin® roztwór do irygacji ran – lawaseptyk, octenilin® żel – opatrunek w żelu, octenisan® wash lotion – antybakteryjna emulsja do mycia ciała i włosów, octenisan® wash cap – czepek do mycia głowy, octenisan® wash mitts – rękawice do mycia ciała, octenisan® md nasal gel – żel do nosa, octenisept® protect&repair cream – krem.

schülke →
130 Years
since 1889

Zastosowanie skutecznych procedur higienicznych gwarantem zdrowia i oszczędności



Ręce | Skóra

Dezynfekcja, oczyszczanie i pielęgnacja dłoni

7 – 17

Rany | Skóra | Błony śluzowe


Antyseptyka ran i błon śluzowych, leczenie ran, dekontaminacja, MDRO

18 – 34

Powierzchnie

Dezynfekcja i czyszczenie

35 – 50

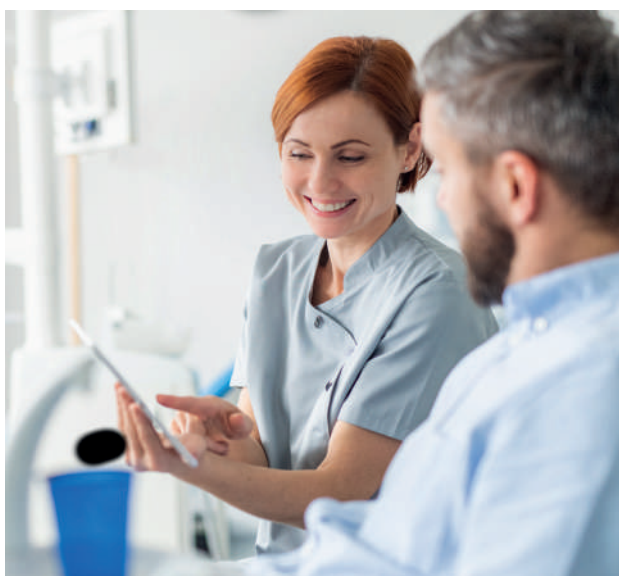

Stomatologia

Kompleksowa higiena w gabinecie stomatologicznym

51 – 53

Narzędzia

Ręczne i automatyczne przygotowanie do ponownego użycia

57 – 72



Dozowniki + akcesoria

Wszystkie produkty od A do Z

73 – 80

Indeks

Wszystkie produkty od A do Z

81 – 82

Spis treści

Przeгляд produktów schülke:

Kategoria	Obszar zastosowań	Produkty	Strona	
Ręce Skóra 7 – 17	Dezynfekcja rąk	desderman® • desderman® care • desderman® care gel • desmanol® pure • desmanol® pure gel • primasept® wash • schülke optics lotion • septoderm® plyn • septoderm® żel	7 – 12	
	Mycie rąk i ciała	sensiva® wash lotion • esemtan® wash lotion • s&m wash lotion • esemtan® wash mitts • esemtan® cleansing foam • prosavon® emulsja myjąca	13 – 14	
	Pielęgnacja dłoni i skóry	sensiva® dry skin balm • esemtan® skin lotion • balmea® • esemtan® active gel	16 – 17	
Rany Skóra Błony śluzowe 18 – 34	Antyseptyka ran i błon śluzowych Leczenie ran	octenisept® • octenilin® żel • octenisept® żel • octenilin® roztwór do irygacji ran • schülke wound pad • octenisept® protect&repair cream	18 – 21	
	Antyseptyka skóry	kodan® tinktur forte bezbarwny barwiony • octeniderm®	21 – 22	
	Dekontaminacja MDRO	octenisan® wash lotion • prosavon® scrub+ • octenisan® wash mitts • octenisan® md nasal gel • octenisan® wash cap	24 – 27	
	Higiena jamy ustnej	octenident® mouthwash • octenisept® oral mono	27 – 28	
	Dezynfekcja przez przecieranie Suche chusteczki i podajniki chusteczek	schülke wipes • schülke wipes safe & easy bag-in-box  schülke wipes safe&easy bagless system 	37 – 40	
	Szybka dezynfekcja	mikrozyd® AF liquid • desam® spray • mikrozyd® universal liquid wipes premium premium maxi • mikrozyd® wipes • mikrozyd® AF wipes Jumbo • mikrozyd® PAA wipes • mikrozyd® sensitive wipes Jumbo • mikrozyd® sensitive liquid • desprej® sensitive	42 – 46	
	Dezynfekcja przez przecieranie	terralin® protect • desam® effekt + • desam® extra • desam® OX • desam® prim • quartamon® med • chloramix® DT • perform® • terralin® PAA	47 – 49	
	Produkty specjalistyczne	mikrocount®	50	
Stomatologia 51 – 53	Manualna dezynfekcja sprzętu i narzędzi	rotasept® • aspirmatic® • aspirmatic® cleaner	51 – 53	
Narzędzia 57 – 71	Ręczne przygotowanie do ponownego użycia	Czyszczenie wstępne (z użyciem środka dezynfekującego)	gigazyme® actifoam + • gigazyme®	58
		Środki dezynfekujące do czyszczenia	gigazyme® X-tra • discleen® extra • gigasept® instru AF • gigasept® AF forte • chiroasan® plus • gigasept® granulate plus	58 – 61
		Ostateczna dezynfekcja	gigasept® pearls • gigasept® PAA concentrate • gigasept® PAA • discleen® endo PAA • gigasept® FF new	62 – 63
	Regeneracja automatyczna	Centralna sterylizatornia	thermosept® X-tra • thermosept® alka clean forte • thermosept® RKF • thermosept® NKZ • thermosept® NKP • thermosept® BSK • thermosept® NDR	65 – 67
Endoskopy		thermosept® EndoCleaner • thermosept® ER • thermosept® ED • thermosept® PAA	66 – 69	
Baseny sanitarne		thermosept® SKS	70	
Dozowniki + akcesoria 73 – 80	Technologia, która sprostą najwyższym wymaganiom	hyclick® system • dozowniki • dozownik stojący • uchwyty • systemy dozowania • łączone rozwiązania higieniczne • wanienki do mycia narzędzi • artykuły ułatwiające stosowanie	73 – 80	
Indeks 81 – 82	Wyszukiwarka produktów	Wszystkie produkty od A do Z	81 – 82	

Higiena ma imię, brzmi ono: schülke

- „Higiena to nauka zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz zbiór zasad postępowania w celu utrzymania wysokich standardów higienicznych, prowadzących do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia”.

Tak Niemieckie Towarzystwo ds. Higieny i Mikrobiologii definiuje pojęcie higieny. Badania, które schülke prowadzi oraz standardy, jakie wdraża w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych, wpływają właśnie z tej idei.

Obecnie wdrażamy liczne nowe działania oraz produkty w celu rozwiązania każdego problemu

mikrobiologicznego oraz związanego z higieną. Wciąż rozwijamy nasze produkty, tak aby dbałość o czyste środowisko szpitalne była coraz bardziej skuteczna, ekonomiczna i bezpieczna. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres produktów i usług związanych z higieną, które cechują się wysoką jakością, skutecznością i bezpieczeństwem użycia.




Ikony – prosta i szybka identyfikacja

► Nasze ikony służą szybkiemu rozpoznawaniu przeznaczenia i skuteczności produktów.

NORO

NORO – norowirus (ikona znajdująca się przy produktach stosowanych na skórę/ręce i na powierzchni)

Norowirusy są wiodącą przyczyną niebakteryjnych infekcji układu pokarmowego. Przenoszą się drogą oralną oraz przez odchody. Szczególnie narażeni na infekcję są pacjenci z osłabionym układem odpornościowym. Norowirusy są szczególnie odporne i mogą przeżyć przez względnie długi okres na powierzchniach różnego rodzaju. Skuteczne zapobieganie infekcji opiera się na profesjonalnych procedurach higienicznych. Stosowanie naszych produktów prowadzi do skutecznej eradykacji norowirusów (MNV).

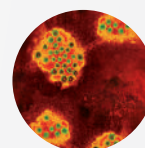

C. DIFF

C.diff – Clostridioides difficile (ikona znajduje się przy produktach stosowanych do powierzchni oraz instrumentów medycznych)

Clostridioides difficile to przetrwalnikowe formy bakterii wywołujące różne postaci choroby, od biegunki po choroby jelit o poważnych konsekwencjach zdrowotnych. Bakterie te są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Produkty zawierające aktywne substancje utleniające oraz produkty znajdujące się na liście RKI cechują się przebadaną aktywnością sporobójczą i powinny być stosowane do zwalczania C.difficile.



TB

TB (ikona znajduje się przy produktach stosowanych na skórę/ręce, do powierzchni i instrumentów medycznych)


Gruźlica (tuberkuloza, TB) jest chorobą zakaźną, która manifestuje się przede wszystkim w płucach i wywoływana jest przez mykobakterie. Występowanie lekoopornych prątków gruźlicy jest poważnym problemem medycznym. Mykobakterie nie tracą swojej zjadliwości, przebywając wiele godzin w powietrzu, na rękach, skórze, powierzchniach czy narzędziach medycznych. Środki dezynfekcyjne zawierające odpowiednie substancje aktywne oraz charakteryzujące się szerokim spektrum aktywności są skuteczne w walce z mykobakteriami. Ich skuteczność określana jest w standaryzowanych normach europejskich EN14348 i/lub EN 14563.



SPORICIDAL

Sporicidal – produkty sporobójcze (ikona przy produktach stosowanych do powierzchni, instrumentów medycznych oraz przy produktach do sterylizacji)

Działanie przetrwalnikobójcze odnosi się do zdolności produktu do zmniejszenia liczby żywych form przetrwalnikowych określonych drobnoustrojów zgodnie z wymogami określonymi w normach europejskich EN 17126.

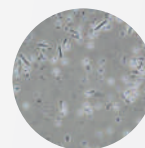

BAC

BAC – bactericidal – produkty bakteriobójcze (ikona przy produktach stosowanych na skórę/ręce, do powierzchni i instrumentów medycznych oraz przy antyseptykach i produktach do sterylizacji)


Działanie bakteriobójcze substancji aktywnych lub ich roztworów polega na zabiciu patogenów bakteryjnych. Bakterie mogą przenosić się drogą kropelkową, przez ręce, skórę, powierzchnie i narzędzia medyczne. Środki dezynfekcyjne przeciwbakteryjne zmniejszają, a nawet niszczą drogę transmisji bakterii.



VIRU CIDAL PLUS

Ograniczone spektrum działania wirusobójczego (symbol stosowany w przypadku obszarów skóry/dłoni, powierzchni)


Ograniczone spektrum działania wirusobójczego to określenie mające zastosowanie do substancji czynnych albo środków dezynfekujących, które oddziałują na określone wirusy bezotoczkowe, takie jak adenowirusy, norowirusy czy rotawirusy, a także wirusy otoczkowe, takie jak HIV, HBV czy HCV na tyle silnie, że powodują nieodwracalne uszkodzenie albo inaktywację drobnoustrojów chorobotwórczych. Substancje czynne o działaniu dezynfekującym wykazujące ograniczone spektrum działania wirusobójczego to skuteczne produkty odpowiednie do stosowania przez cały rok. Zmiana na inne produkty w związku z sezonowymi różnicami w zakresie patogenów wirusowych nie jest konieczna.

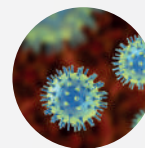

VIRU CIDAL

VIRUCIDAL – produkty wirusobójcze (ikona przy produktach stosowanych na skórę/ręce, do powierzchni i instrumentów medycznych oraz przy produktach do sterylizacji)

Ikona opisuje produkty i środki dezynfekcyjne, które działają bójczo na wirusy, niszcząc ich kwas nukleinowy i prowadząc do inaktywacji patogenu. Wirusy mogą rozprzestrzeniać się drogą kropelkową, przez ręce, skórę, powierzchnie i narzędzia medyczne. Dezynfekcyjne środki przeciwwirusowe zmniejszają, a nawet niszczą drogę transmisji wirusów.

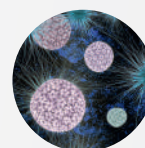

RKI LISTED











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




RKI-listed – produkty znajdujące się na liście RKI

Lista produktów stworzona przez Instytut Roberta Kocha opisuje wszystkie środki dezynfekcyjne oraz procedury, które rekomendowane są dla Zespołów ds. Kontroli Zakażeń w przypadku wybuchu epidemii. Lista tworzona jest i udoskonalana przez ponad 100 lat i zawarty jest w niej wykaz opisów produktów oraz działań higienicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę: www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittellist/Desinfektionsmittelliste_node.html
















Więcej informacji na temat drobnoustrojów chorobotwórczych: <https://www.schuelke.com/pl-pl/unsere-expertise/infektionserreger.php>

schülke oferuje wszystko, co stanowi zagrożenie dla drobnoustrojów: środki do dezynfekcji rąk, pielęgnacji skóry, mycia rąk i ciała

Ręce Skóra	Specyfikacja	Wykazy	Skuteczność działania	Strona
Dezynfekcja rąk	Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) Higieniczne mycie rąk (EN 1499)	Wykaz VAH Wykaz środków wirusobójczych IHO spełnia wymagania norm europejskich działanie bakterioobójcze (EN 13727) działanie prątkobójcze (EN 14348) działanie drożdżakobójcze (EN 13624) działanie grzybobójcze (EN 13624) wirusy otoczkowe (EN 14476 / DVV) ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) działanie wirusobójcze (EN 14476) Poliovirus (EN 14476) Adenowirus (EN 14476) Norowirus (MNV) (EN 14476) Rotawirus (EN 14476 / DVV)		
desderman® care  Produkt caloroczny	30 sek. 1,5 min.	  	15 sek. 15 sek. 15 sek. 1 min. 15 sek. 15 sek. 30 sek. 30 sek. 15 sek. 15 sek.	10
desmanol® pure  Produkt caloroczny	30 sek. 1,5 min.	  	30 sek. 30 sek. 15 sek. 15 sek. 2 min. 2 min. 30 sek. 15 sek.	11
desmanol® pure gel  Produkt caloroczny	30 sek. 1,5 min.	  	30 sek. 30 sek. 30 sek. 30 sek. 2 min. 2 min. 30 sek. 15 sek.	11
primasept® wash	30 sek.	  	30 sek. 30 sek. 1 min.	11
schülke optics lotion			do celów szkoleniowych	12




Z przyczyn regulacyjnych (w szczególności z powodu zmiany norm) deklaracje dotyczące poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W celu uzyskania wiążących, aktualnych zaleceń dotyczących stosowania i skuteczności należy korzystać wyłącznie z dokumentacji dotyczącej konkretnego produktu albo odwiedzić witrynę www.schuelke.com.

Ręce Skóra	Obszar zastosowań	Właściwości	Strona
Mycie i pielęgnacja	 Czyszczenie z użyciem wody  Czyszczenie bez użycia wody  Pielęgnacja skóry  Ochrona skóry  Specjalne zastosowanie	bezbardwy bezwonny nie zawiera mydła intensywna pielęgnacja skóry delikatna pielęgnacja skóry	
sensiva® wash lotion			13
esemtan® wash lotion			13
s&m wash lotion			13
esemtan® wash mitts			14
esemtan® cleansing foam			14
sensiva® dry skin balm			16
esemtan® skin lotion			17
esemtan® active gel			17


Z przyczyn regulacyjnych (w szczególności z powodu zmiany norm) deklaracje dotyczące poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W celu uzyskania wiążących, aktualnych zaleceń dotyczących stosowania i skuteczności należy korzystać wyłącznie z dokumentacji dotyczącej konkretnego produktu albo odwiedzić witrynę www.schuelke.com.

Liczy się zawartość!

➔ Przegląd wybranych składników produktów schülke

Nazwa w systemie INCI/ składnik	Opis	Dezynfekcja rąk					Mycie rąk i ciała			Pielęgnacja dłoni/ pielęgnacja skóry				
		desderman® care	desderman® care gel	desmanol® pure	desmanol® pure gel	primasept® wash	sensiva® wash lotion	esemtan® wash lotion	esemtan® wash mitts	sensiva® dry skin balm	esemtan® skin lotion	balmea®	esemtan® active gel	
(Z grupami heksadecylowymi/ oktadecylowymi) (2-ethylhexanoat)/ oktanian cetearylu	• środek do natłuszczenia • estry kwasów tłuszczowych												•	
Allantoin/ alantoina 	• łagodzenie • odżywianie • zmiękczenie • ochrona					•	•	•	•				•	
Bisabolol/ bisabolol	• działanie przeciwzapalne • odżywianie • substancja czynna • olejek z rumianku													
Butyrospermum Parkii Butter/ masło Shea 	• odżywianie • nawilżanie • tłuszcz z orzechów z drzewa Shea												•	
Cera Alba/ wosk pszczeni	• odżywianie • ochrona												•	
Cetearyl Alcohol/ alkohol cetearylowy	• stabilizator emulsji • środek nadający konsystencję			•	•									
Cetearyl Ethylhexanoate/ etyloheksanian cetearylu	• zmiękczenie • struktura oleju podobna do tłuszczu z gruczołów kuprowych													
Ethylhexylglycerin/ etyloheksylgliceryna	• odżywianie • nawilżanie			•	•		•	•						
Glycerin/ gliceryna	• nawilżanie								•	•	•			
Glyceryl Stearate/ stearynian glicerylu	• stabilizator emulsji • środek nadający konsystencję												•	
Hamamelis Virginiana Water/ oczar wirginijski Ekstrakt z kory/liści/gałątek oczaru 	• środek ściągający • tanina • odżywianie • ochrona • ekstrakt z różnych części oczaru													
Hydrogenated Castor Oil/ olej rycynowy	• odżywianie • estry z uwodornionym olejem rycynowym													
Isopropyl Myristate/ mirystynian izopropylu	• odżywianie • natłuszczenie • estry kwasów tłuszczowych	•	•											
Lauryl Glucoside/ glukozyd laurylowy	• czyszczenie • niejonowość • odżywianie (łagodzi podrażniające działanie soli sodowej siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego)						•	•						

Przegląd wybranych składników produktów schülke

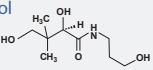Nazwa w systemie INCI/ składnik	Opis	Dezynfekcja rąk					Mycie rąk i ciała			Pielęgnacja dłoni/ pielęgnacja skóry			
		desderman® care	desderman® care gel	desmanol® pure	desmanol® pure gel	primasept® wash	sensiva® wash lotion	esemtan® wash lotion	esemtan® wash mitts	sensiva® dry skin balm	esemtan® skin lotion	balmea®	esemtan® active gel
Magnesium Sulfate/ siarczan magnezu	• stabilizator									•			
Olus Oil/ olej roślinny	• trójglicerydy kwasów tłuszczowych z oleju • odżywanie												
Panthenol/ dekspantenol	 • odżywanie • prowitamina B5 • regeneracja • gojenie ran	•	•		•	•							
Potassium Sorbate/ sorbiniian potasu	• środek konserwujący (dodatek do żywności E202)									•	•		
Propylene Glycol/ glikol propylenowy	• nawilżanie												
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil/ olej jojoba	• odżywanie											•	
Sodium Benzoate/ benzoosan sodu	• środek konserwujący (dodatek do żywności E211)									•	•	•	
Sodium Chloride/ chlorek sodu	• zagęszczanie							•	•				
Sodium Hydroxide/ wodorotlenek sodu	• regulacja pH					•	•	•	•				•
Sodium Laureth Sulfate/ sól sodowa siarczanu oksyetylowanego alkoholu laurylowego	• czyszczenie						•	•					
Sodium Polyacrylate/ poliakrylan sodu	• środek do formowania żelu											•	
Sorbic Acid/ kwas sorbinowy	• środek konserwujący (dodatek do żywności E200)												
Sorbitol/ alkohol cukrowy	• odżywanie • nawilżanie	•	•		•	•							
Stearic Acid/ kwas stearynowy	• natłuszczenie • stabilizacja											•	
Tocopherol/ witamina E	• odżywanie • antyoksydant	•	•							•			
Zinc Stearate/ stearynian cynku	• stabilizacja									•			

Dezynfekcja rąk



hyclick[®]
system

desderman[®] care

Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

BAC

-+ Nasz Plus

TB

VIRU
CIDAL

VIRU
CIDAL[®]

NORO

- szerokie spektrum działania skuteczny wobec norowirusa w 15 sek.,
- innowacyjna formuła substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E),
- nie zawiera substancji barwiących i zapachowych,
- spektrum działania: B (w tym Tbc (M. terrae, M. avium)), F, V (Vaccinia, BVDV, Polio, Rota, Adeno, Noro),
- testowany dermatologicznie,
- dezynfekcja higieniczna 30 sek.,
dezynfekcja chirurgiczna - 90 sek.



Opakowanie

100 ml | 500 ml | 500 ml hyclick | 1 l
1 l hyclick | 1 l typu „Euro” | 5 l

Substancja czynna: Etanol 83,7g/100g



desderman[®] care gel

Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z odżywczym pantenolem i witaminą E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych

BAC

-+ Nasz Plus

TB

VIRU
CIDAL

VIRU
CIDAL[®]

NORO

- szerokie spektrum działania skuteczny wobec norowirusa w 15 sek.,
- innowacyjna formuła substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E),
- nie zawiera substancji barwiących i zapachowych,
- spektrum działania: B (w tym prątkobójcze (M. terrae, M. avium)), F (Candida albicans), V (Vaccinia, BVDV, Polio, Rota, Adeno, Noro),
- szczególnie łagodny dla skóry rąk,
- dezynfekcja higieniczna 30 sek.,
dezynfekcja chirurgiczna - 90 sek.



Opakowanie

500 ml | 1 l | 1 l typu „Euro”

Skuteczność	30 s	60 s
Bakteriobójczy	•	•
Drożdżakobójczy	•	
Prątkobójczy	•	•
Wirusy osłonkowe		•
Rota	•	•
Adeno		•
Noro	•	•
Polio		•
Higieniczna dezynfekcja rąk	•	
Chirurgiczna dezynfekcja rąk		•

Substancja czynna: Etanol 83,7g/100g



desderman[®]

Produkt leczniczy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

BAC

-+ Nasz Plus

TB

VIRU
CIDAL

VIRU
CIDAL[®]

NORO

- skuteczna ochrona przed patogenami,
- szerokie spektrum działania – w tym – wirusobójczy,
- doskonała tolerancja dermatologiczna dzięki innowacyjnej formule pielęgnacyjnej,
- produkt z listy RKL.



Opakowanie

100 ml | 1 l

100 g roztworu na skórę zawiera 78,2 g etanolu 96% (v/v) (Ethanolum), co odpowiada 73,4 g etanolu 100%.
Środek denaturujący: 0,99 g metyloetyloketonu na 100 g etanolu 96%

Dezynfekcja rąk

hyclick[®]
system

BAC
TB
VIRU
CIDAL
NORO

desmanol[®] pure

Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

-+ Nasz Plus

- bez barwników i substancji zapachowych,
- innowacyjna formuła substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna),
- spektrum działania: B (w tym prątkobójcze), bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro),
- dezynfekcja higieniczna – 30 sek., dezynfekcja chirurgiczna – 90 sek.,
- bez zawartości etanolu.

**Opakowanie**

100 ml | 500 ml | 500 ml hyclick | 1 l
1 l hyclick | 5 l

Substancja czynna: propan-2-ol - 75,0 g/100 g roztworu



BAC
TB
VIRU
CIDAL
NORO

desmanol[®] pure gel

Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

-+ Nasz Plus

- innowacyjna formuła substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna),
- nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych,
- dezynfekcja higieniczna – 30 sek., dezynfekcja chirurgiczna – 90 sek.,
- szerokie spektrum działania B (w tym prątkobójcze), bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro),
- testowany dermatologicznie.

**Opakowanie**

100 ml | 500 ml | 1 l

Substancja czynna: propan-2-ol - 75,0 g/100 g roztworu



BAC

primasept[®] wash

Emulsja do higienicznego mycia rąk o szerokim spektrum bójczym w tym względem wirusów osłonkowych

**-+ Nasz Plus**

- delikatna emulsja bez zawartości mydła,
- przebadana zgodnie z normą EN 1499, EN13727, EN 13624, EN 14476,
- z zawartością chlorheksydyny,
- doskonale właściwości myjące,
- spektrum działania B (w tym Salmonella, Listeria), drożdżakobójcze (C. albicans), wirusy osłonkowe (vaccinia),
- z zawartością substancji odżywczych i nawilżających skórę,
- nie zawiera substancji barwiących i zapachowych,
- testowana dermatologicznie.

Opakowanie

100 ml | 1 l

Substancja czynna: propan-2-ol 15g/100g, kwas d-glukonowy, związek z N,N - bis(4-chlorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG) 4g/100g

Dezynfekcja rąk



Opakowanie

500 ml | 1 l

septoderm®

Płynny środek dezynfekujący na bazie mieszaniny alkoholu i QAC – przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

-+ Nasz Plus

- przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk,
- przedłużony efekt działania,
- szerokie spektrum działania, w tym wirusobójczość w pełnym zakresie,
- doskonała kompatybilność ze skórą,
- pozostawia na dłoniach uczucie świeżości, miękkości i sprężystości.

Skład: 100 g septodermu® zawiera następujące substancje czynne:
• 45 g etanolu
• 30 g propan-2-olu
• 0,5 g chlorku didecyldimetyloamoniowego
Pozostałe składniki: emolient



Opakowanie

500 ml | 500 ml z pompką | 1 l typu „Euro” | 5 l

septoderm® żel

Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

BAC

TB

VIRUCIDAL

-+ Nasz Plus

- alkoholowy preparat w postaci żelu ze składnikami nawilżającymi,
- zawiera 2 substancje aktywne,
- dezynfekcja higieniczna – 30 sek., dezynfekcja chirurgiczna – 3 min.,
- spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze,
- bez barwników i substancji zapachowych.

Skład: 100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 45g etanol, 30g propan-2-ol



Opakowanie

500 ml

schülke optics lotion

Emulsja do celów treningowych i do sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia procedur higienicznej dezynfekcji rąk

-+ Nasz Plus

- produkt zawiera substancję fluorescencyjną umożliwiającą sprawdzenie poziomu przepuszczalności rękawic,
- wskazuje przepuszczalność rękawic w teście z lampą UV.

Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Cera Alba, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Stilbene Derivative, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid

➤ Mycie rąk i ciała



Opakowanie

500 ml | 500 ml hyclick | 1 l | 1 l hyclick
| 1 l typu „Euro” | 5 l

sensiva® wash lotion

Emulsja do mycia rąk i ciała przed zabiegami chirurgicznymi i higienicznymi

➤ Nasz Plus

- syntetyczna emulsja myjąca niezawierająca mydła,
- do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała oraz włosów,
- nie zawiera barwników i substancji zapachowych,
- pH neutralne dla skóry – ok. 5,
- dermatologicznie przebadana,
- zawiera dodatki pielęgnacyjne (w tym alantoinę).

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Allantoin, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Lactic Acid



Opakowanie

500 ml | 1 l

esemtan® wash lotion

Emulsja do mycia rąk i ciała przed zabiegami chirurgicznymi i higienicznymi

➤ Nasz Plus

- syntetyczna emulsja myjąca,
- nie zawiera mydła,
- do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta,
- chroni i pielęgnuje skórę podczas mycia,
- pH ok. 5 (neutralne dla skóry),
- zawiera dodatki pielęgnacyjne (w tym alantoinę oraz kwas mlekowy),
- dermatologicznie przebadana.

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Allantoin, Glycol Distearate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Stearamide MEA, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Parfum, CI 42090, CI 47005, Sodium Hydroxide, Lactic Acid.



Opakowanie

500 ml | 1 l

s&m wash lotion

Emulsja do mycia rąk i ciała przed zabiegami chirurgicznymi i higienicznymi

➤ Nasz Plus

- nie zawiera mydła,
- do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta,
- zawiera substancje nawilżające i natłuszczające,
- pH ok. 5 (neutralne dla skóry),
- dermatologicznie przebadana.

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Laureth-3, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, CI 42051, CI 47005, Lactic Acid, Sodium Hydroxide

Czyszczenie
z-użyciem wody



Czyszczenie
bez użycia wody



➔ Mycie rąk i ciała



+ alantoina



Opakowanie

10 szt. rękawic

esemtan® wash mitts

Rękawice do mycia ciała bez użycia wody

-+ Nasz Plus

- gotowe do użycia,
- delikatne dla skóry,
- przyjemny zapach,
- dermatologicznie przetestowane,
- zawiera substancje o działaniu pielęgnacyjnym dla skóry (m.in. alantoinę),
- wygodne w użyciu,
- nie wymagają spłukiwania,
- pH neutralne dla skóry,
- możliwość podgrzania w kuchenke mikrofalowej,
- możliwość schłodzenia w celu uzyskania efektu odświeżenia.

Skład: Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Polyglyceryl-4 Caprate, Allantoin, Sodium Benzoate, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum.



łagodny dla skóry



Opakowanie

500 ml – pojemnik

esemtan® cleansing foam

Pianka o właściwościach czyszczących i pielęgnujących

-+ Nasz Plus

- z domieszką substancji natłuszczających,
- wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne,
- nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych,
- skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenia dzięki zawartym surfaktantom,
- eliminuje nieprzyjemny zapach kału i moczu,
- dobre właściwości myjące,
- pH ok. 7,0,
- czyszczenie bez użycia wody,
- stosowana u pacjentów obłożnie chorych oraz mających problem z trzymaniem moczu i kału,
- dostępna w aptekach i sklepach medycznych,
- rekomendowany do oczyszczania i pielęgnacji skóry podrażnionej po zabiegu napromieniania w przebiegu radioterapii.

Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Isobutane, Isopropyl Palmitate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Chloride, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenethyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Butane, Propane, Lactic Acid, Potassium Hydroxide



Opakowanie

500 ml | 500 ml z pompką | 1 l typu "Euro" | 5 l

prosavon® emulsja myjąca

Delikatna emulsja myjąca na bazie oliwy z oliwek

-+ Nasz Plus

- pH neutralne dla skóry,
- przyjemny zapach,
- testowana dermatologicznie,
- przeznaczona do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją oraz do mycia rąk i ciała pacjenta,
- zawiera substancje pielęgnujące.

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Olive Oil Glycereth-8 Esters, Glycerin, Styrene / Acrylates Copolymer, Polyquaternium-7, Parfum, Citric Acid, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Butelka typu euro...

...alternatywa dla normalnych butelek jednolitrowych, do stosowania z dozownikami KH.



Pojemnik	(dł. × szer. × wys.)
butelka typu euro	71,5 × 88 × 205 mm (210 mm z obudową)
standardowy 1 l	102 × 79,5 × 197 mm (205 mm z obudową)
standardowy 500 ml	65 × 72 × 163 mm (171 mm z obudową)



butelka typu euro
(zdjęcie desderman® care)



Rys. KHK

Co?	Ochrona skóry 	Oczyszczanie skóry 	Pielęgnacja skóry 
Kiedy?	<ul style="list-style-type: none"> • przed czynnościami obciążającymi skórę • „w drodze” (pomiędzy wykonywaniem różnych czynności) • po przerwie w pracy 	<ul style="list-style-type: none"> • jeśli widoczne jest zabrudzenie • przed przerwą w pracy • po pracy 	<ul style="list-style-type: none"> • po czynnościach obciążających skórę • rano i wieczorem
Z czym (na przykład)?	sensiva® protective cream krem ochronny sensiva® protective emulsion emulsja ochronna	sensiva® wash lotion emulsja myjąca	sensiva® dry skin balm balsam do suchej skóry sensiva® regeneration cream krem regenerujący



► Pielęgnacja rąk



Opakowanie

150 ml | 500 ml

sensiva® dry skin balm

Emulsja do pielęgnacji rąk i ciała, balsam do suchej skóry

-+ Nasz Plus

- emulsja typu woda w oleju (W/O), intensywnie natłuszczająca,
- nie zawiera barwników,
- nie osłabia efektu mikrobiologicznego środków stosowanych do dezynfekcji rąk,
- poprawia nawilżenie i elastyczność skóry.

Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Butyrospermum Parkii Butter, Zinc Stearate, Magnesium Sulfate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.



➤ Pielęgnacja skóry



+ jojoba



Opakowanie

150 ml | 500 ml

esemtan® skin lotion

Emulsja do pielęgnacji rąk

-+ Nasz Plus

- emulsja oleju w wodzie (O/W), intensywnie nawilżająca,
- bez barwników,
- sprzyja regeneracji skóry,
- polepsza wilgotność i elastyczność skóry,
- pH 5-6 (neutralne dla skóry oraz ciała).

Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Stearic Acid, Glycerol Stearate, Isopropyl Myristate, Cera Alba, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Parfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.



Opakowanie

500 ml z pompką

balmea®

Balsam do regeneracji skóry rąk

-+ Nasz Plus

- emulsja typu olej w wodzie,
- zawiera Paraffinum liquidum - substancję stosowaną m.in do wytwarzania kremów dla dzieci,
- nie zawiera barwników,
- do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry,
- szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki,
- wzbogacony oliwą z oliwek.

Skład: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Cetareth-20, Glycerol Stearate, Glycerin, Olive Oil Glycereth-8-Esters, Panthenol, Carbomer, Triethanolamine, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid.



witalizujący



Opakowanie

500 ml

esemtan® active gel

Żel aktywny do masażu

-+ Nasz Plus

- wpływa na rozluźnienie i uelastycznienie mięśni,
- polepsza ukrwienie skóry,
- zawiera kombinację olejków eterycznych i substancji pielęgnujących,
- pH neutralne dla skóry,
- możliwość stosowania przy masażu obłożnie chorych,
- wspierająco w profilaktyce oraz pielęgnacji osób z zapaleniem płuc,
- dostępny w aptekach i sklepach medycznych.

Skład: Aqua, Alcohol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Polyacrylic Acid, Camphor, Menthol, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid, Limonen

Czyszczenie z użyciem wody



Czyszczenie bez użycia wody



Pielęgnacja skóry



Specjalne zastosowanie



Ochrona skóry



schülke oferuje wszystko, co stanowi zagrożenie dla drobnoustrojów: środki dezynfekujące do ran, skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacja MDRO

Rana Skóra Błona śluzowa		Obszar zastosowań	Wykazy	Skuteczność działania	Strona
		Antyseptyka ran Opieka nad raną Antyseptyka skóry Antyseptyka błony śluzowej Płukanie jamy ustnej Dekontaminacja MDRO Mycie włosów i skóry głowy Mycie ciała Pielęgnacja skóry	Wykaz VAH Sprawdzone zgodnie z normami europejskimi VAHP EUBS BAC	Działanie bakteriobójcze MRSA Wirusy otoczkowe Adenowirus Rotawirus Wirus opryszczki pospolitej	
Rany i błony śluzowe antyseptyka i pielęgnacja ran	octenisept®	● ● ●	●	15 sek. 15 sek. 15 sek.	19
	octenilin® żel / octenisept® żel	●			19/20
	octenilin® roztwór do irygacji ran płyn do chirurgicznego opracowywania ran z wykorzystaniem schülke wound pad	●			20
Antyseptyka skóry	kodan® tinktur forte bezbarwny barwiony	●	● ●	15 sek. 15 sek. 15 sek. 10 min. 15 sek. 15 sek.	21
	octeniderm® bezbarwny	●	● ●	15 sek. 15 sek. 1 min. 30 sek. 15 sek.	22
Dekontaminacja MDRO	octenisan® wash lotion emulsja myjąca			15 sek.	25
	octenisan® wash mitts rękawiczki				25
	octenisan® wash cap czepek				27
	octenisan® md nasal gel żel do nosa				26
	octenident® mouthwash płyn do higieny jamy ustnej	●			27

Z przyczyn regulacyjnych (w szczególności z powodu zmiany norm) deklaracje dotyczące poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W celu uzyskania wiążących, aktualnych zaleceń dotyczących stosowania i skuteczności należy korzystać wyłącznie z dokumentacji dotyczącej konkretnego produktu albo odwiedzić witrynę www.schuelke.com.

➔ Antyseptyka ran i błony śluzowej



Lek bez recepty

Opakowanie

250 ml z atomizerem | 11
aplikator waginalny do opakowań 50 ml

octenisept®

Lek stosowany w profilaktyce i leczeniu ran, błon śluzowych i skóry

octenisept® -
stosowany
w antyseptyce ran
w szpitalach

-+ Nasz Plus

- skutecznie oczyszcza, odkaża i leczy rany,
- zawiera w składzie oktenidynę,
- bez pochodnych jodu i chlorheksydyny,
- szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydiem i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV),
- bezbarwny (nie pozostawia plam), nie zaburza obrazu rany,
- bezbolesne stosowanie,
- szybkie działanie - już w 1 minutę,
- penetruje i usuwa biofilm,
- przedłużony efekt działania,
- dostępny w aptekach,
- możliwość łączenia z opatrunkami specjalistycznymi, w tym zawierającymi Ag,
- bezpieczny już od 1. dnia życia.



Skład: 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylkokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

octenisept® jest wskazany do: • odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi • wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych • wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego • w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego) • do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej) • ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej • w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia męzczyzny. octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.



Sterylny

Opakowanie

20 ml z | 250 ml

octenilin® żel

Zapewnia optymalne, wilgotne otoczenie dla gojącej się rany, przyspiesza gojenie

-+ Nasz Plus

- efektywne nawilżanie i oczyszczanie rany,
- zawiera w składzie oktenidynę,
- utrzymanie idealnego bilansu wilgoci w ranie,
- rekomendowany w ranach oparzeniowych,
- polecany szczególnie do ran z martwicą suchą i rozplywną,
- bezbarwny, bezwonny,
- hipoalergiczny,
- zmniejsza świąd i odczuwanie bólu,
- zapobiega powstawaniu blizn,
- stosowany pod opatrunkiem zapobiega jego przywieraniu,
- nie wpływa negatywnie na proces ziarninowania,
- preparat zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy po otwarciu opakowania,
- dostępny w aptekach i sklepach medycznych,
- wspomaganie naturalnego procesu gojenia.

Skład: oktenidyny dichlorowodorek, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Antyseptyka ran i błony śluzowej



Opakowanie

20 ml

octenisept® żel

Zapewnia optymalne, wilgotne otoczenie dla gojącej się rany, przyspiesza gojenie

-+ Nasz Plus

- efektywne nawilżanie, dekontaminacja i oczyszczanie rany,
- zawiera w składzie oktenidynę,
- utrzymanie idealnego bilansu wilgoci w ranie,
- rekomendowany w ranach oparzeniowych,
- polecany szczególnie do ran z martwicą suchą i rozplywną,
- bezbarwny, bezwonny,
- hipoalergiczny,
- zmniejsza świąd i odczuwanie bólu,
- zapobiega powstawaniu blizn,
- stosowany pod opatrunkiem zapobiega jego przywieraniu,
- nie wpływa negatywnie na proces ziarninowania,
- preparat zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy po otwarciu opakowania,
- dostępny w aptekach i sklepach medycznych,
- wspomaganie naturalnego procesu gojenia.

Skład: Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl



Sterylny

Opakowanie

350 ml

octenilin® roztwór do irygacji ran

Płyn służący do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych

-+ Nasz Plus

- doskonała skuteczność oczyszczająca,
- zawiera w składzie oktenidynę,
- bezbolesne stosowanie,
- możliwość stosowania w podciśnieniowej terapii leczenia ran (NPWT),
- doskonale usuwanie biofilmu bakteryjnego,
- bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem,
- preparat zachowuje swoje właściwości do 8 tygodni po otwarciu opakowania,
- można stosować przed aplikacją leku octenisept®.

Skład: oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona.



Sterylny

Opakowanie

1 opak. – zawiera niebieski, czerwony i biały wound pad
10 szt. – niebieski wound pad

schülke wound pad

Skuteczna terapia wspomagająca gojenie ran oraz zapobiegająca ich powstawaniu

-+ Nasz Plus

- pobudzenie procesów ziarninowania i samoistnego oczyszczania rany,
- poprawienie cyrkulacji krwi i dopływu tlenu do tkanek,
- wspomaganie procesu epitelizacji,
- do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia,
- zmniejszanie poziomu biofilmu w ranie,
- możliwość stosowania z octenilinem® roztworem do irygacji ran,
- możliwość indywidualnego doboru opatrunku, dzięki różnej strukturze opatrunków.

Antyseptyka ran i błony śluzowej



octenisept® protect & repair cream

Chroni i intensywnie pielęgnuje skórę oraz pobudza jej naturalną regenerację

Nasz Plus

- zawiera m. in. oktenidynę, pantenol, bisabolol,
- zastosowanie na skórę wokół rany i naskórka w fazie epitelizacji,
- do skóry wrażliwej i podrażnionej (atopowa, łuszcząca, po radioterapii),
- otarcia, zdrapania, po oparzeniach (w tym słonecznych),
- po wykonaniu tatuażu,
- do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne),
- do pielęgnacji podrażnionej skóry w okolicach miejsc intymnych,
- dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez drobnoustroje oraz chroni przed wilgocią),
- testowany dermatologicznie, bez substancji barwiących i zapachowych,
- pozytywna opinia IMiD do stosowania u niemowląt po 6. miesiącu życia,
- ochrona przed pieluszkowym zapaleniem skóry.

Skład: Petrolatum, Aqua, Panthenol, PEG-60 Sorbitan Stearate, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Glycerol Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Bisabolol, Sorbic Acid, Octenidine HCl.

Opakowanie

50 ml

Antyseptyka skóry



kodan® tinktur forte

Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry barwiony lub bezbarwny

Nasz Plus

- zawiera 3 substancje aktywne oraz nadtlenek wodoru,
- spektrum działania: bakterie Gram-dodatnie (gronkowce w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym E.Coli, P. aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzyby, m.in. drożdżaki (w tym C. albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum), wirusy (HIV-1, HBV, Adeno typ 2, HSV, Rota, wirus grypy azjatyckiej),
- barwiony do zaznaczania pola operacyjnego – bez zawartości jodu,
- przed zastrzykami, pobieraniem krwi – 15 sek., przed punkcjami – 60 sek.,
- nie zawiera alkoholu etylowego,
- bez związków amoniowych, jodu, chlorheksydyny oraz ich pochodnych,
- wskazany do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami i biopsjami, zdejmowaniem szwów,
- zapobiega grzybicom skóry.

Skład: 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, (barwnik brązowy LF 1889), woda oczyszczona.



Opakowanie

250 ml z atomizerem | 500 ml | 1 l

Antyseptyka skóry



octeniderm®

Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry – bezbarwny



Nasz Plus

- zawiera w składzie oktenidynę, nie zawiera etanolu,
- spektrum działania: bakterie Gram-dodatnie (gronkowce w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym E. Coli, P. Aeruginosa, bakterie z rodzaju Klebsiella i Proteus), mykobakterie (w tym M. Tuberculosis), grzybobójczo na drożdżaki (w tym C. albicans) i dermatofity (jak Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Microsporum gypseum), wirusy (HIV, HBV, Adeno, HSV),
- przed iniekcjami, pobieraniem krwi – 15 sek., przed punkcjami – 60 sek.,
- wskazany do dezynfekcji skóry przed m.in. iniekcjami, biopsjami, punkcjami z łączną zawartością 75 g alkoholu w 100 g preparatu (tj. 30 g 1-propanolu, 45 g 2-propanolu) oraz dodatkowo substancję antyseptyczną – dichlorowodorek oktenidyny 0,10 g.




Skład: 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, 1-propanol 30,00 g, 2-propanol 45,00 g, substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Opakowanie

250 ml z atomizerem | 11

W roztworze alkoholowym oktenidyna jest idealną substancją aktywną utrzymującą się w miejscu aplikacji

Badania podstawowe i porównawcze nad efektem przedłużonej aktywności: oktenidyna ma najlepsze wyniki w porównaniu z chlorheksydyną (CHX), powidonem jodu i czystym alkoholem izopropylowym (IPA).¹

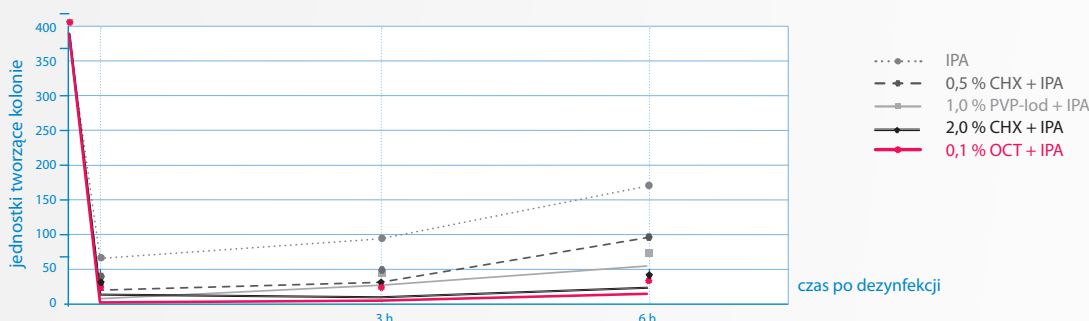

Przegląd substancji o przedłużonym czasie aktywności po aplikacji:

Charakterystyka	Składnik aktywny	Oktenidyna	PVP-jod	Chlorheksydyna
Skuteczność przeciwdrobnoustrojowa		pełne spektrum (bez przetrwalników)	pełne spektrum	pełne spektrum (bez przetrwalników) słabsze działanie względem bakterii Gram-ujemnych
Aktywność sporobójcza		–	tak	–
Przedłużony efekt aktywności działania		wysoki (24 h) ⁴	niski	wysoki (24 h)
Utrata aktywności w obecności krwi lub białka		nie	tak	nie
Indeks Biozgodności (BI) ²		wysoki (1,73/2,11)	niski (0,68/0,68)	średni (0,83/0,98)
Bezpieczeństwo użycia u wcześniaków (nieodjrzała skóra)		substancja aktywna z wyboru (RKI 2007) ³	przeciwwskazania	ograniczone
Oporność		brak	brak	znana
Absorbcja ustrojowa		nie	tak	ograniczona
Charakterystyka		gruntownie przebadana, brak znanych efektów ubocznych	gruntowanie przebadany, znane ustrojowe efekty uboczne (np. związane z chorobami tarczycy)	gruntownie przebadana; możliwe przekształcenie w mutagenną chloranilinę
Ryzyko alergii		bardzo niskie (pojedyncze przypadki)	znane przypadki	znane przypadki, w tym szok anafilaktyczny

¹ Source: MELICHERCIKOVA, V.; et al. (2010): Residual effect of antiseptic substances on human skin. Journal of Hospital Infection, 75: 238–239

² For antiseptic agents with a high BI the tissue tolerance at a specified efficacy is very good. A low BI on the other hand is an indicator for poor tissue tolerance. For antiseptic agents with a BI below 1 the intolerance is higher than the efficacy and therefore they should not be used. (MÜLLER, G.; KRAMER, A. (2008): Biocompatibility index of antiseptic agents by parallel assessment of antimicrobial activity and cellular cytotoxicity. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 61: 1281–1287).

³ octeniderm® should not be used in premature babies with immature skin due to its alcohol content. The KRINKO (Commission for Hospital Hygiene and Infection Prevention at the Robert Koch Institute) recommends the active substance octenidine at a concentration of 0.1 % as the product of choice for premature babies with immature skin. (KRINKO, Recommendation for the prevention of nosocomial infections in neonatal intensive care patients with a birth weight of less than 1500 g, 2007).



► Skuteczna dekontaminacja bez zastosowania antybiotyków - dla dobra pacjentów

Zwalcz MDRO za pomocą oktenidyny


Skuteczność dekontaminacji potwierdzona klinicznie

Infekcje wywołane przez MDRO są wyzwaniem terapeutycznym, z racji oporności tych drobnoustrojów na antybiotyki.

Zakażenia wywołane przez MDRO należą do najcięższych infekcji szpitalnych. W celu eradykacji ze szpitala siedlisk MDRO należy poddać dekontaminacji wszystkie możliwe rezerwuary, w których te bakterie bytują.

Należą do nich skóra, włosy, nos, jama ustna i gardło, a także rany przewlekłe. Co więcej, dekontaminacji poddać należy także otoczenie pacjenta. Cykle dekontaminacyjne wykonuje się w określonych ramach czasowych, po których za pomocą metod mikrobiologicznych sprawdza się pacjentów i ich otoczenie pod kątem występowania MDRO.

Strategia schülke służąca zwalczaniu MDRO:

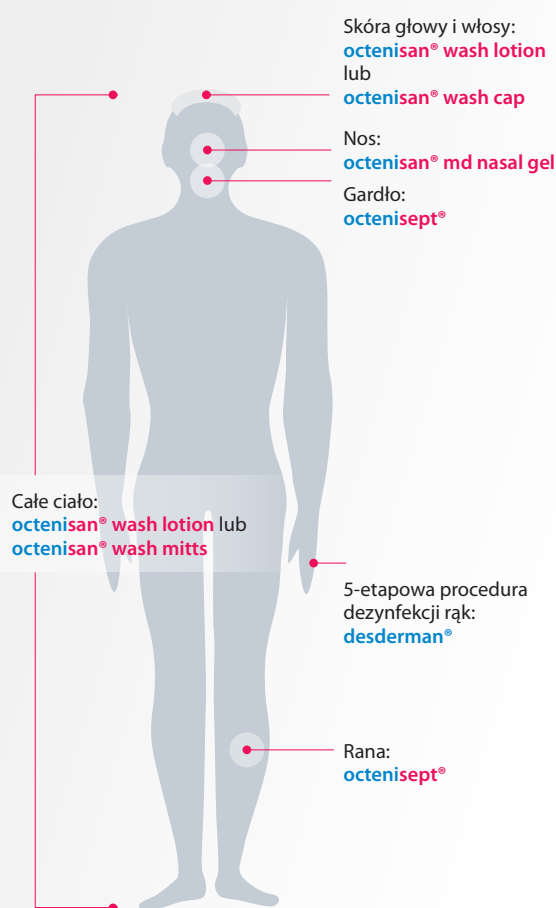

Koncepcja skutecznej dekontaminacji

octenisan® wash lotion



1 x dziennie
czas kontaktu 60 sek.

octenisan® md nasal gel



2 x dziennie
czas kontaktu
120 sek.

octenisept® lek odkażający na skórę i małe powierzchniowe rany



1 x dziennie
czas kontaktu
60 – 120 sek.

Specjalnie dla pacjentów unieruchomionych:

octenisan® wash mitts



1 x dziennie
czas kontaktu 30 sek.

octenisan® wash cap



1 x dziennie
czas kontaktu 5 min

Przeszkody stojące na drodze do skutecznej dekontaminacji*:

- istnienie rezerwuarów trudnych do dekontaminacji (na przykład przewlekłych ran w okolicy brzucha czy gardła, dużych zmian nowotworowych),
- skolonizowane urządzenia i aparaty, których nie można usunąć (np. rurka intubacyjna po świeżo przeprowadzonym zabiegu tracheotomii),
- rekolonizacja na skutek transmisji patogenów ze źródeł zewnętrznych (np. odwiedzających w szpitalu),
- brak tolerancji pacjenta lub brak zgodności materiałowej aparatów i urządzeń na stosowane środki dezynfekcyjne i antyseptyki,
- brak współpracy pacjenta, stosowanie środków w sposób niekontrolowany.

* German article: HÜBNER, N.; et al. (2009): Sanierung von MRSA-positiven Patienten. Arzneimitteltherapie, 5: 171–177.

MDRO dekontaminacja



Opakowanie

150 ml | 500 ml

octenisan® wash lotion

Emulsja do mycia ciała przed i po zabiegach operacyjnych

-+ Nasz Plus

- do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi,
- zawiera w składzie oktenidynę,
- bez mydła, barwników i substancji zapachowych,
- z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę,
- pH neutralne dla skóry,
- zawiera alantoinę oraz kwas mlekowy,
- dostępna w aptekach i sklepach medycznych.

Skład: Aqua, Cocamidopropylamine Oxide, PEG-7 Glyceril Cocoate, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Lactic Acid, Octenidine HCl, Allantoin.



Opakowanie

500 ml | 500 ml z pompką | 1 l | 5 l

prosavon® scrub+

Środek do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym skóry głowy

-+ Nasz Plus

- dekolonizacja skóry całego ciała oraz włosów,
- nie wymaga spłukiwania,
- delikatna formuła pielęgnacyjna z oliwą z oliwek i gliceryną,
- testowany dermatologicznie,
- bez barwników i substancji zapachowych,
- wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym: Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (*C. albicans*) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych.

Substancje czynne na 100 g produktu: 0,9 g kwas d-glukonowy; związek z N,N'-bis(4-chlorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG), 0,9 g chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC).
Pozostałe składniki: > 5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne



Opakowanie

8 szt. rękawic

octenisan® wash mitts

Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody

-+ Nasz Plus

- zawiera substancję pielęgnującą skórę – alantoinę,
- gotowe do użycia,
- proste w użyciu,
- bez substancji zapachowych i barwników,
- nie wymagają spłukiwania,
- zawierają w składzie oktenidynę,
- możliwość podgrzania w kuchenke mikrofalowej,
- nie stosować łącznie z produktami zawierającymi jodopowidon,
- dostępne w aptekach i sklepach medycznych,
- możliwość schłodzenia w celu uzyskania efektu odświeżenia.

Skład: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Allantoin, Sodium Lactate, Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin.

➔ MDRO dekontaminacja



octenisan® md nasal gel

Żel przeznaczony do oczyszczania oraz nawilżania przedsonka nosa, wspomaga dekontaminację MDRO

➔ Nasz Plus

- gotowy do użycia,
- zawiera w składzie oktenidynę,
- bezbarwny, bezwonny żel,
- dostępny w aptekach i sklepach medycznych,
- zapewnia odpowiednią wilgotność przedsonków nosa i zapobiega podrażnieniom,
- jest szczególnie przydatny na oddziałach intensywnej opieki medycznej, oddziałach zakaźnych, przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

Skład: Woda oczyszczona, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, dichlorowodorek oktenidyny.

Opakowanie

6 ml



MDRO dekontaminacja



octenisan® wash cap

Gotowy do użycia czepek przeznaczony do mycia oraz dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody u pacjentów unieruchomionych

-+ Nasz Plus

- zawiera w składzie oktenidynę,
- gotowy do użycia,
- nie zawiera barwników,
- nie zawiera substancji zapachowych,
- nie wymaga spłukiwania,
- możliwość podgrzania w kuchenke mikrofalowej,
- dostępny w aptekach i sklepach medycznych.

Skład: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Allantoin, Sodium Lactate Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin.

Opakowanie

pakowane po 1 szt.

Higieniczna pielęgnacja jamy ustnej



octenident® mouthwash

Dekontaminacja i nawilżenie jamy ustnej i gardła, wspomagająco w higienie zmian w jamie ustnej

-+ Nasz Plus

- zawiera oktenidynę,
- bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej,
- zawiera substancję o właściwościach zmniejszających napięcie powierzchniowe,
- skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów poprzez działanie fizyczne substancji powierzchniowo czynnej,
- zapobiega i redukuje nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii,
- nie przebarwia szkliwa,
- nie zawiera chlorheksydyny,
- nie zawiera etanolu,
- łagodny smak mięty.

Skład: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Glycerin, Aroma, Sodium Gluconate, Sucralose, Citric Acid, Octenidine HCl, BHT

Opakowanie

250 ml

W odniesieniu do przebarwiania zębów: wyniki badania kosmetycznego z udziałem 53 uczestników wykazały, że u 94% uczestników nie wystąpiły żadne przebarwienia po czterotygodniowym okresie stosowania. Metoda pomiaru: skala VITA

W odniesieniu do przebarwiania zębów: wyniki badania kosmetycznego z udziałem 53 uczestników wykazały, że u 94% uczestników nie wystąpiły żadne przebarwienia po czterotygodniowym okresie stosowania. Metoda pomiaru: skala VITA

Higieniczna pielęgnacja jamy ustnej



Nowość

Opakowanie

250 ml

octenisept® oral mono

Dekontaminacja jamy ustnej – także przed zabiegami operacyjnymi dekontaminacji jamy ustnej przed zabiegami stomatologicznymi do eradykacji MDRO w jamie ustnej

Nasz Plus

- szerokie spektrum działania – w tym względem MDRO skuteczność w 30 sek.,
- skuteczny bakterio- i drożdżakobójczo,
- odpowiedni dla alergików,
- nie zawiera etanolu,
- smak miętowy,
- może być stosowany przez kobiety ciężarne (zgodnie z ChPL – jeżeli jest to konieczne*),
- zgodność z zaleceniami KRINKO dotyczącymi zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc związanemu z mechaniczną wentylacją¹.

Skład: oktenidyny dwuchlorowodorek, glicerol 85%, sodu glukonian, kwas cytrynowy, disodu fosforan dwuwodny (do ustalenia pH), makrogol glicerolu hydroksystearynian, sukraloza, woda oczyszczona, aromat miętowy (zawiera glikol propylenowy (49%), mentol (45%), menton (6%))

* NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1. Bundesgesundheitsbl 2013;56:1578–1590 DOI 10.1007/s00103-013-1846-7, Prävention der nosokomialen beatmungsassoziierten Pneumonie; Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut

Działa w 30 sekund¹

KRINKO

Zgodność z zaleceniami KRINKO dotyczącymi zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc związanemu z mechaniczną wentylacją³



Wysoka tolerancja substancji czynnej²



Lek OTC



Zawiera substancję czynną oktenidynę



Niski poziom wchłanianości oktenidyny do układu ogólnego



Przyjemny, miętowy smak



Szerokie spektrum działania wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdży¹




Nie zawiera alkoholu**



Można rozważyć stosowanie u kobiet w ciąży po konsultacji z lekarzem¹

*Zródło: <https://rejestrmedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public> ** Nie zawiera etanolu ¹ CHPL Octenisept Oral Mono. ² Wytyczne postępowania miejscowego w ranach niezakażonych, zagrożonych infekcją oraz zakażonych – przegląd dostępnych substancji przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu ran. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Leczenie Ran 2020; 1: 1-21. ³ Bundesgesundheitsbl 2013; 56:1578–1590 DOI 10.1007/s00103-013-1846-7, Zapobieganie szpitalnemu zapaleniu płuc związanemu z wentylacją; Zalecenie Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (KRINKO) przy Instytucie Roberta Kocha. octenisept® oral mono, octenidini dihydrochloridum, 1

NOWOŚĆ!

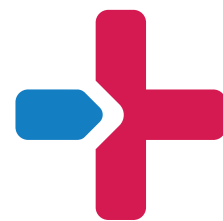

octeni sept®

oral mono

1 ml roztworu zawiera
1 mg oktenidyny
dwuchlorowodorku



Pierwszy i jedyny taki lek

w formie
antyseptycznego
płynu do płukania
jamy ustnej
z oktenidyną*

Lek OTC

schülke →

Ważne informacje dla użytkownika

- Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
- Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

kodan® tinktur forte bezbarwny:

• **Substancje czynne:** 2-Propanolum + 1-Propanolum + 2-Biphenylol, (45 g + 10 g + 0,2 g)/100 g, płyn na skórę

• **Wskazania:** Produkt leczniczy kodan® tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.

• **Dawkowanie i sposób podawania:**

Przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund.

Przed punkcjami: czas działania 60 sekund.

Przedoperacyjna dezynfekcja skóry:

1. Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne.
2. Wykąpać lub umyć pacjenta używając, np. emulsji do mycia esemtan® lub octenisan®, najlepiej na godzinę przed planowanym terminem zabiegu.
3. Nanosić kodan® tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę, pamiętając o dokładnym zwilżeniu pola operacyjnego.
4. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu produktu leczniczego.

Dezynfekcja skóry przed zastrzykami, punkcjami: Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć produktem leczniczym kodan® tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.

Zdejmowanie szwów: miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym produktem leczniczym jałowym gazikiem lub produktem leczniczym z atomizera. Nadmierne ilości produktu leczniczego kodan® tinktur forte bezbarwny osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszać nawilżonymi produktem leczniczym kodan® tinktur forte bezbarwny jałowymi gazikami.

• **Sposób podawania:** Produkt leczniczy do stosowania na skórę. kodan® tinktur forte bezbarwny stosuje się bez rozcieńczenia. Skórę należy dokładnie zwilżyć produktem leczniczym z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego produktem leczniczym.

• **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylole lub nadtlenek wodoru.

• **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego kodan® tinktur forte bezbarwny z oczami należy natychmiast opłukać otwarte oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku stosowania produktu leczniczego niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole w nim zawarte mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę. Usunąć nadmiar produktu leczniczego, aby uniknąć jego nagromadzenia się. Produkt leczniczy łatwopalny. Nie rozpoczynać termokauteryzacji na skórze przed dokładnym wyschnięciem dezynfekowanych obszarów. **Dzieci i młodzież:** Ze względu na wysoką zawartość alkoholu kodan® tinktur forte bezbarwny nie może być stosowany u wcześniaków i noworodków z niedojrzałą skórą, ponieważ może powodować oparzenia z powodu ograniczonej funkcji barierowej naskórka.

• **Działania niepożądane:** na podstawie klasyfikacji układów i narządów, działania niepożądane wymieniono według częstości występowania zgodnie z następującymi kategoriami: Bardzo często ($\geq 1/10$), Często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$), Niezbyt często ($\geq 1/1000$ do $< 1/100$), Rzadko ($\geq 1/10000$ do $< 1/1000$), **Bardzo rzadko** ($< 1/10000$), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia skóry i tkanki podskórnej • **Rzadko:** kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa • **Częstość nieznana:** suchość i podrażnienie skóry

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301 i fax (22) 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Podmiot odpowiedzialny: Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 13039 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

kodan® tinktur forte barwiony

- **Substancje czynne:** alkohol izopropylowy + 1-Propanol + 2-difenylol, (45 g + 10 g + 0,2 g)/100 g, płyn na skórę
- **Wskazania:** Produkt leczniczy kodan® tinktur forte barwiony przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Zapobiega grzybicom skóry.

- **Dawkowanie i sposób podania:**

Przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund.

Przed punkcjami: czas działania 60 sekund.

Przedoperacyjna dezynfekcja skóry:

1. Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne.
2. Wykąpać lub umyć pacjenta używając, np. emulsji do mycia esemtan® lub octenisan®, najlepiej na godzinę przed planowanym terminem zabiegu.
3. Nosić kodan® tinktur forte barwiony przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę, pamiętając o dokładnym zwilżeniu pola operacyjnego.
4. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu produktu leczniczego.

Dezynfekcja skóry przed zastrzykami, punkcjami: Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć produktem leczniczym kodan® tinktur forte barwiony przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.

Zdejmowanie szwów: Miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym produktem leczniczym jałowym gazikiem lub produktem leczniczym z atomizera. Nadmierną ilość produktu leczniczego kodan® tinktur forte barwiony osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszać nawilżonymi produktem leczniczym kodan® tinktur forte barwiony jałowymi gazikami.

- **Sposób podawania:** Produkt leczniczy do stosowania na skórę. kodan® tinktur forte barwiony stosuje się bez rozcieńczenia. Skórę należy dokładnie zwilżyć produktem leczniczym z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego produktem leczniczym.
- **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na alkohol izopropylowy, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru 30%, barwnik brązowy LF 1889.
- **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Produkt leczniczy do stosowania na skórę. Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego kodan® tinktur forte barwiony z oczami należy natychmiast opłukać otwarte oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku stosowania produktu leczniczego niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole w nim zawarte mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę. Usunąć nadmiar produktu leczniczego, aby uniknąć jego nagromadzenia się. Produkt leczniczy łatwopalny. Nie rozpoczynać termokauteryzacji na skórze przed dokładnym wyschnięciem dezynfekowanych obszarów. **Dzieci i młodzież:** Ze względu na wysoką zawartość alkoholu kodan® tinktur forte barwiony nie może być stosowany u wcześniaków i noworodków z niedojrzałą skórą, ponieważ może powodować oparzenia z powodu ograniczonej funkcji barierowej naskórka.
- **Działania niepożądane:** Na podstawie klasyfikacji układów i narządów, działania niepożądane wymieniono według częstości występowania zgodnie z następującymi kategoriami: Bardzo często ($\geq 1 / 10$), Często ($\geq 1 / 100$ do $< 1 / 10$), Niezbyt często ($\geq 1 / 1000$ do $< 1 / 100$), Rzadko ($\geq 1 / 10\ 000$ do $< 1 / 1000$), **Bardzo rzadko** ($< 1 / 10\ 000$), nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej • **Rzadko:** Kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa • **Częstość nieznaną:** Suchość i podrażnienie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301 i fax (22) 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Podmiot odpowiedzialny: Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 13037 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

octenisept®

- **Substancje czynne:** 100 g płynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dichlorochloridum (oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g, Phenoxyethanolum (fenoksyetanol) 2,00 g.
- **Wskazania do stosowania:** octenisept® jest wskazany do: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikutu pępowninowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystrycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych, np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia męzczyzny. octenisept® jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

- **Dawkowanie i sposób podawania:** Produkt leczniczy octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nierozcieńczonej. octenisept® należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetrzecie jałowym gazikiem lub za pomocą przymocznika, zapewniając całkowite nawilżenie.

Dezynfekcja skóry i błony śluzowej: Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept® lub zwilżone poprzez rozpylenie produktu leczniczego bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania - minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Wspomagająco w leczeniu grzybicy skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Antyseptyka powierzchownych ran: Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept®. Produktu leczniczego

go octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. W ranach z wysiękiem należy użyć produktu leczniczego octenisept® w postaci przymocza, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut.

Pielęgnacja szwów pooperacyjnych: Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym octenisept®. Produktu leczniczego octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. octenisept® działa odkażająco i znieczulająco. Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzić za pomocą jałowych gazików nasączonych nierozcieńczonym produktem leczniczym octenisept®, promieniście od środka na zewnątrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy: Produktem leczniczym octenisept® należy zwilżyć powierzchnię błony śluzowej pochwy, zapewniając kontakt produktu leczniczego z błoną śluzową przez minimum 1 minutę. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że produkt leczniczy octenisept® skutecznie działa bakterio-bójczo na różne bakterie m.in. Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Antyseptyka żołądźdź prącia mężczyzny: Produktem leczniczym octenisept® należy zwilżyć powierzchnię błony śluzowej żołądźdź prącia, zapewniając kontakt produktu leczniczego z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.

Dezynfekcja jamy ustnej: Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml produktu leczniczego octenisept® przez 20 sekund. Pielęgnacja kikuta pępowinowego: Do pielęgnacji kikuta pępowinowego należy używać gazika nasączonego produktem leczniczym octenisept®. Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości.

- **Sposób podawania:** podanie na skórę.
- **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie należy stosować produktu leczniczego octenisept® do płukania jamy brzusznej.
- **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Uwaga: W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jamy rany (np. drenaż, odsysacz). Stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanołem lub bez) do odkażania skóry przed zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórnymi u wcześniaków z małą masą urodzeniową. Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy. Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z ciałem pacjenta. Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu octenisept®, należy upewnić się, że nie pozostał nadmiar produktu leczniczego. Produktu leczniczego octenisept® nie należy stosować do oczu. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połknięcia.
- **Działania niepożądane:** Po zwilżeniu błony śluzowej pochwy rzadko może być odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia. Po płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się przez około 1 godzinę, ma to związek z działaniem produktu leczniczego.
- **Wpływ na płodność, ciążę i laktację:** Ciąża. Badania z udziałem kobiet w okresie ciąży (między 300 a 1000 kobiet w okresie ciąży, wiek ciążowy \geq 12 tygodni) wskazują, że octenisept® nie wywołuje wad rozwojowych ani nie powoduje toksyczności dla płodu i (lub) noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na reprodukcję. Można rozważyć stosowanie produktu leczniczego octenisept® w okresie ciąży, jeśli to konieczne. Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących pierwszych 3 miesięcy ciąży, z powodu ogólnych środków ostrożności octenisept® nie należy stosować w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Karmienie piersią. Brak jest wystarczających danych oświadczalnych na zwierzętach i danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego octenisept® w okresie karmienia piersią. Ponieważ oktenidyny dichlorowodorek wchłania się tylko w bardzo małych ilościach lub nie wchłania się, należy założyć, że nie przenika do mleka ludzkiego. Fenoksyetanol wchłania się szybko i prawie całkowicie, po czym jest prawie całkowicie wydalany jako produkt utleniania przez nerki. Nie ma danych dotyczących przenikania fenoksyetanolu do mleka ludzkiego. octenisept® należy usunąć z okolic piersi przed karmieniem piersią, aby zapobiec przyjęciu produktu leczniczego przez noworodka.
- **Podmiot odpowiedzialny:** Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: nr 13036 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

octenisept® oral mono

- **Substancje czynne:** octenidyny dihydrochloridum, 1 mg/mL, roztwór do stosowania w jamie ustnej
- **Wskazania do stosowania:** Do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. octenisept® oral mono jest wskazany do stosowania u dorosłych. Skuteczność mikrobiologiczna in vitro produktu leczniczego octenisept® oral mono obejmuje bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne oraz drożdże. Należy stosować 10 ml roztworu, 2 razy na dobę. Produktu leczniczego octenisept® oral mono nie należy stosować dłużej niż 5 dni, jako, że dostępne są dane dotyczące tylko ciągłego stosowania przez 5 dni.
- **Dzieci i młodzież:** Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego octenisept® oral mono u dzieci i młodzieży. Dane kliniczne są niedostępne.
- **Sposób podawania:** Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Produkt leczniczy wskazany tylko do użytku powierzchniowego (patrz punkt 4.4). Należy płukać jamę ustną 10 ml roztworu przez 30 sekund, dwa razy na dobę. Po użyciu roztwór należy wypluć. W celu odmierzenia właściwej dawki należy użyć dołączonego dozownika.
- **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą: glicerol 85%, sodu glukonian, kwas cytrynowy, disodu fosforan dwuwodny (do ustalenia pH), makroglicerolu hydroksystearynian, sukraloza, woda oczyszczona, aromat miętowy (zawiera glikol propylenowy (49%), mentol (45%), menton (6%).
- **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Produkt leczniczy wskazany tylko do użytku powierzchniowego. Nie wolno podawać tego produktu leczniczego w głąb tkanek za pomocą strzykawki lub kaniuli, aby zapobiec potencjalnemu rozwojowi obrzęków lub martwicy tkanek. W szczególności nie należy go stosować do płukania kieszonek przyzębnych, płukania kanałów korzeniowych podczas zabiegów endodontycznych ani do płukania ropni jamy ustnej. octenisept® oral mono należy stosować wyłącznie do płukania jamy ustnej. Nie należy go połknąć. Dlatego powinien być stosowany przez pacjentów, którzy mogą samodzielnie płukać jamę ustną. Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami. W razie kontaktu roztworu z oczami należy je szybko i dokładnie wyplukać wodą. Oktenidyny dwuchlorowodorek może wchodzić w interakcje z anionowymi środkami obecnymi w produktach do mycia zębów. Dlatego należy je stosować przed użyciem produktu leczniczego octenisept® oral mono (jamę ustną należy wyplukać wodą przed użyciem produktu leczniczego) lub o innej porze dnia. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego octenisept® oral mono i produktów zawierających powidon jodowany do stosowania w jamie ustnej, ponieważ może to powodować fioletowe lub brązowe zabarwienie jamy ustnej oraz miejscowe podrażnienie (patrz punkt 4.5).

- **Działania niepożądane:** Może wystąpić czasowe przebarwienie języka. Ten produkt leczniczy zawiera makroglicerol hydroksystearynian, który może powodować reakcje skórne. Działania niepożądane po podaniu produktu leczniczego octenisept® oral mono zgłaszano w dwóch kontrolowanych placebo badaniach III fazy z udziałem 200 pacjentów (151 pacjentów otrzymywało octenisept® oral mono, 49 pacjentów otrzymywało placebo). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia smaku (21%) i przemijające przebarwienia języka (6%). Ponadto u niektórych pacjentów obserwowano łagodne i odwracalne przebarwienie zębów.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane zgłoszone podczas badań klinicznych zostały przedstawione w tabeli poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Klasyfikacja układów i narządów	Bardzo często (≥ 1/10)	Często (≥ 1/100 to < 1/10)	Niezbyt często (≥ 1/1000 to < 1/100)
Zaburzenia układu nerwowego	Zaburzenia smaku	Osad na języku, czasowe przebarwienie języka, osad w jamie ustnej, niedoczulica w jamie ustnej, nadwrażliwość zębów	Ból głowy
Zaburzenia żołądka i jelit	Łagodne i odwracalne przebarwienie zębów		Nudności, parestezje w jamie ustnej, nadmierne wydzielanie śliny

Podmiot odpowiedzialny: Schülke & Mayr GmbH, Robert -Koch-Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 26802 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

octeniderm®

• **Substancje czynne:** 2-Propanolum + 1-Propanolum + Octenidinum dihydrochloridum , (45 g + 30 g + 0,10 g)/100g, płyn na skórę

• **Wskazania do stosowania:** Produkt octeniderm® przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Produkt octeniderm® stosuje się bez rozcieńczenia. Skórę należy dokładnie zwilżyć produktem z atomizera lub za pomocą jałowego gazika nasączonego produktem.

• **Dawkowanie i sposób podawania:**

Przed iniekcjami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund.

Przed punkcjami: czas działania 60 sekund.

Przedoperacyjna dezynfekcja skóry:

1. Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne.
2. Wykąpać lub umyć pacjenta używając np. emulsji do mycia esemtan® lub octenisan®, najlepiej na godzinę przed planowanym terminem zabiegu.
3. Nanosić produkt octeniderm® za pomocą jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę pamiętając o dokładnym zwilżeniu pola operacyjnego.
4. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu produktu.

Dezynfekcja skóry przed iniekcjami, punkcjami: Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć produktem octeniderm® za pomocą jałowego gazika lub produktem z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.

Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów: Miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym w produkcie jałowym gazikiem lub produktem z atomizera. Nadmierną ilość produktu octeniderm® osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszać nawilżonymi w produkcie octeniderm® jałowymi gazikami.

• **Sposób podawania:** Podanie na skórę.

• **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, dichlorowodorek oktenidyny lub na którykolwiek ze składników produktu.

• **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Produkt do stosowania na skórę. Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco. Produkt łatwopalny.

• **Działania niepożądane:** Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

Podmiot odpowiedzialny: Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 13057 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

desderman®

- **Substancje czynne:** 78,2 g/100 g, roztwór na skórę
- **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy desderman® jest gotowym do użycia alkoholowym produktem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zakres działania przeciwdrobnoustrojowego: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy; klasyfikacja „działanie wirusobójcze” (wirusy otoczkowe i bezotoczkowe) oraz klasyfikacja „ograniczony zakres działania wirusobójczego” (w tym rotawirusy, adenowirusy i norowirusy).
- **Dawkowanie i sposób podawania:** **Dorośli: Higieniczna dezynfekcja rąk:** Wetrzeć nierozcieńczony produkt leczniczy desderman® w suche ręce, pozostawiając skórę wilgotną przez co najmniej 30 sekund. Działanie wirusobójcze osiąga się w ciągu 60 sekund. Należy użyć co najmniej 3 ml nierozcieńczonego roztworu. **Chirurgiczna dezynfekcja rąk:** Wetrzeć nierozcieńczony produkt leczniczy desderman® w suche ręce i przedramiona, pozostawiając skórę wilgotną przez co najmniej 90 sekund. Należy użyć co najmniej 10 ml (2 x 5 ml) nierozcieńczonego roztworu. **Instrukcja czyszczenia pompki:** Widoczne zanieczyszczenia na wylocie pompki można usunąć dezynfekując ją przez wycieranie. **Dzieci i młodzież:** Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego desderman® u dzieci i młodzieży. Dane nie są dostępne.
- **Sposób podawania:** Podanie na nienaruszoną skórę.
- **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych Metyloetyloketon, Izopropylu mirystynian, Cetylostearylu oktanian, Powidon K 30, Sorbitol ciekły, krystalizujący 70%, Alkohol izopropylowy, Woda oczyszczona.
- **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Produkt leczniczy desderman® jest substancją drażniącą oczy i błony śluzowe. Nie wolno go stosować w okolicy oczu, na pękniętą skórę lub błony śluzowe. W przypadku nieumyślnego kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi zalecane jest natychmiastowe przemycie miejsca kontaktu dużą ilością wody (w przypadku oczu także pod powiekami). Jeśli wystąpi utrzymujące się podrażnienie, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Produkt leczniczy desderman® jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. W przypadku nieumyślnego poknięcia należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską. W przypadku łagodnych podrażnień skóry (np. suchości) w wyniku częstego stosowania produktu leczniczego desderman® należy zwiększyć intensywność pielęgnacji skóry. Należy zachować ostrożność w przypadku rozlania dużych ilości produktu leczniczego desderman®, gdyż jest on wysoce łatwopalny (zagrożenie pożarem i wybuchem!). Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast przedsięwziąć środki ostrożności: zetrzeć wylany płyn, rozcieńczyć dużą ilością wody, przewietrzyć pomieszczenie i usunąć wszelkie źródła zapłonu. Przed użyciem sprzętu elektrycznego należy poczekać, aż produkt leczniczy wyschnie. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego desderman® w pobliżu powierzchni podatnych na działanie alkoholu.
- **Działania niepożądane:** W poniższej tabeli zastosowano następujące kategorie częstości: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów	Częstość występowania	Działanie niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej	Rzadko	Podrażnienia skóry, takie jak zaczerwienienie i pieczenie, alergie kontaktowe

Środki dezynfekujące zawierające alkohol mogą wysuszać skórę i powodować jej podrażnienia, zwłaszcza przy małej wilgotności powietrza (np. zimą).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Podmiot odpowiedzialny: Schülke & Mayr GmbH, Robert -Koch-Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 25811 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

safe & easy

schülke wipes
Bezpieczne, ponieważ
proste w użyciu!



safe & easy
bag-in-box

safe & easy
bagless



- Dezynfekcja za pomocą systemu suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania preparatem dezynfekcyjnym



schülke wipes

Szybkie i poręczne

schülke wipes – chusteczki do nasączania środkiem dezynfekcyjnym zawarte w pojemniku z dyspenserem służą do szybkiej dezynfekcji powierzchni o małym zagrożeniu infekcją. Dostępne są różne rozmiary i ilości chusteczek: okres ważności to 28 dni; wyjątkiem jest terralin® PAA: 12 godzin.

schülke wipes

Bezpieczne i proste w użyciu

schülke wipes „safe & easy” – nadają się idealnie do stosowania na powierzchni w pomieszczeniach, gdzie ryzyko nabycia infekcji jest bardzo wysokie. **Bezpieczeństwo** ich stosowania związane jest z faktem, że pojemnik (pudełko/ torba) jest jednorazowy. Chusteczki są także niezwykle **proste w użyciu**.

Celem jest optymalny poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, gdzie ryzyko infekcji jest wysokie!

Im większe jest prawdopodobieństwo kontaminacji pacjenta oraz personelu, tym ważniejsza jest skuteczna dezynfekcja wszystkich powierzchni.



Ryzyko infekcji*:

- Obszary o wysokim ryzyku kontaminacji i nabycia infekcji oraz izolatki
- Obszary o wysokim ryzyku nabycia infekcji przez personel
- Obszary o niskim ryzyku (lub braku ryzyka) nabycia infekcji

*Według wytycznych RKI (2004), str.5



➔ Dezynfekcja przez przecieranie

Mała różnica, a duży efekt!

schülke wipes – system wielokrotnego użycia

Uniwersalne - możliwość zastosowania w różnych obszarach.

- 1 Odpakuj rolkę chusteczek i umieść ją w pojemniku (zdezynfekuj uprzednio pojemnik). Wlej roztwór środka dezynfekcyjnego do pojemnika.
- 2 Napisz na naklejce datę przygotowania, stężenie i nazwę preparatu dezynfekcyjnego.
- 3 Po wykorzystaniu chusteczek lub najpóźniej po 28 dniach (wyjątek: terralin® PAA: 12 h) opróżnij pojemnik. Pojemnik i wieczko dyspensera powinny być zdezynfekowane przed kolejnym użyciem.

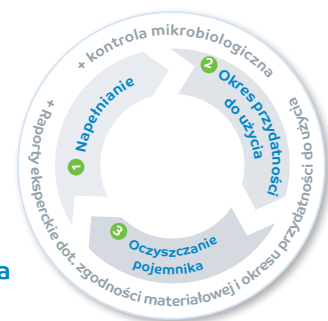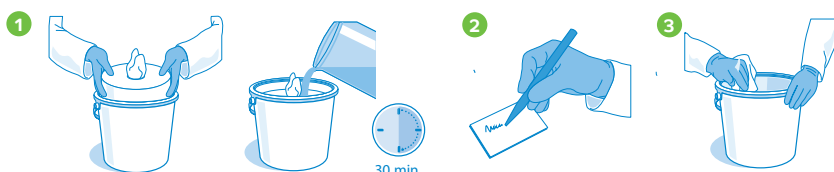

Etapy krytyczne*:

- 1 Napełnianie pojemnika
- 2 Przestrzeganie okresu przydatności do użycia
- 3 Oczyszczanie pojemnika


schülke wipes




Zminimalizuj ryzyko kontaminacji na obszarach o wysokim ryzyku infekcji za pomocą zestawu jednorazowych schülke chusteczek umieszczonych w pojemniku. Jeśli chodzi o zdrowie naszego personelu i pacjentów, nie uznajemy kompromisów! Szczególna czujność powinna być zachowana w pomieszczeniach o wysokim ryzyku kontaminacji i na oddziałach neonatologicznych.

- 1 **Bezpieczeństwo:** w torbie/wiadrze chusteczki są zabezpieczone.
- 2 Napisz na naklejce datę przygotowania, stężenie i nazwę preparatu dezynfekcyjnego.
- 3 **Prostota:** wyrzuć po wykorzystaniu chusteczek albo po 28 dniach (wyjątek: terralin® PAA: 12 godz.).

schülke chusteczki „safe & easy”
w układzie: „torba w pudełku”...

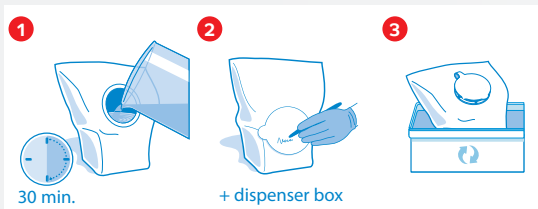

...ich stosowanie jest prostsze
nawet w porównaniu do układu,
w którym nie stosuje się torby.

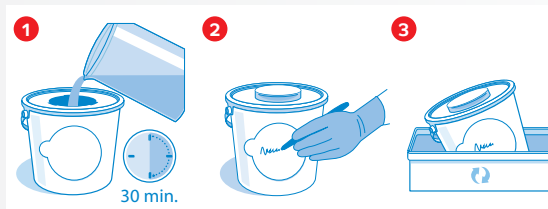

* 1. Recommendation for controlling critical points while using wipe dispensers for surface disinfection (2012)
2. Control measures for the use of wet wipe dispensers for surface disinfection in combination with the risk profile. (2013)

Dezynfekcja przez przecieranie



podajniki
w postaci
pudełka

podajniki
w postaci
wiaderka

- przydatne w miejscach o niskim ryzyku

Opakowanie

6 rolek po 100 szt. chusteczek | 6 rolek po 111 szt. chusteczek | wiadro – 1 szt.

schülke wipes

System chusteczek przeznaczonych do nasączenia środkami dezynfekcyjnymi firmy schülke

-+ Nasz Plus

- łatwe w użyciu,
- po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni,
- nie pozostawiają smug,
- 100 chusteczek w rolce (30 cm x 30 cm), 111 chusteczek w rolce (30 cm x 24 cm),
- możliwość stosowania ze środkami dezynfekcyjnymi firmy schülke,
- chusteczki o gramaturze 50 g/m².



Artykuły ułatwiające stosowanie

Uchwyt ścienny do wiaderk z chusteczkami schülke wipes



wiadro

wkład

specjalnie do dezynfekcji obszarów o wysokim ryzyku kontaminacji

Opakowanie

6 wkładów po 111 szt. chusteczek
wiadro – 1 opak. (10 szt.)

safe & easy
bag-in-box

schülke wipes safe&easy

Innowacyjny, zawierający pojemnik, system chusteczek przeznaczonych do nasączenia środkami dezynfekcyjnymi schülke, służący do dezynfekcji powierzchni

-+ Nasz Plus

- najwyższy poziom higieny,
- szczególnie polecane w miejscach, gdzie wymagany jest najwyższy reżim sanitarny (OIOM, izolatki, sale chorych po przeszczepach),
- 111 szt. chusteczek (30 cm x 24 cm) pakowanych w jednorazowe worki zabezpieczające przed kontaminacją dozownika,
- bardzo proste w użyciu,
- po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni (wyjątek: terralin® PAA 12 h),
- możliwość stosowania ze środkami dezynfekcyjnymi schülke,
- chusteczki o gramaturze 50 g/m².



wiadro z dyspenserem

specjalnie do dezynfekcji obszarów o wysokim ryzyku kontaminacji

Opakowanie

karton zawiera 6 wiader, w każdym znajduje się 130 chusteczek

safe & easy
bagless system

schülke wipes safe&easy bagless system

Innowacyjny system chusteczek przeznaczonych do nasączenia środkami dezynfekcyjnymi schülke, służący do dezynfekcji powierzchni

-+ Nasz Plus

- innowacyjny system bez torby, wystarcza na 130 aplikacji,
- gotowy system do nasączenia środkiem dezynfekcyjnym,
- łatwość obsługi,
- brak konieczności mieszania i dolewania środka dezynfekcyjnego,
- rozmiar chusteczki 30 cm x 19 cm,
- chusteczki o gramaturze 50 g/m².

Dezynfekcja przez przecieranie

schülke wipes

safe & easy
bag-in-box



Bezpieczeństwo – chusteczki są zabezpieczone przed kontaktem z pojemnikiem, rękoma i innymi chusteczkami.

Prostota obsługi – zapewniana przez system zawierający dyspenser, torbę i wieczko.



Uzupełnianie z zachowaniem warunków higienicznych

schülke wipes

safe & easy
bagless



Jednorazowy system – jest jeszcze szybciej!

Bezpieczeństwo – chusteczki znajdują się w pojemniku, który zabezpiecza je przed kontaminacją. Specjalna naklejka daje pewność, że wiadro jest użyte pierwszy raz.

Prostota obsługi – gotowy system do nasączenia.



Uzupełnianie z zachowaniem warunków higienicznych



▣ Rozpoznaj problem i rozwiąż go!

➔ Szybka dezynfekcja powierzchni




Opakowanie

250 ml z atomizerem | 1 l | 10 l
spryskiwacz do butelek 1 l

mikroqid® AF liquid

Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego

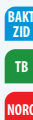

➔ Nasz Plus

- na bazie alkoholu,
- bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny,
- spektrum działania: B (w tym bójczo wobec prątków gruźlicy, MRSA), F (C. albicans), V, (Noro, Rota, Vaccinia, HBV, BVDV, HIV, HSV) – 1 min, F (A. brasiliensis), Adeno – 30 sek., V (Polyoma SV 40) – 5 min,
- preparat szybko schnący,
- nie pozostawia plam i zacieków,
- dobra tolerancja materiałowa,
- nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym.

Stężenie / czas kontaktu	60 s
B	•
Tbc	•
Y	•
F	(2 min)
vaccinia	•
rota	•
noro	•
wirusy osłonkowe	•

Skład: 25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol



Opakowanie

1 l ze spryskiwaczem | 5 l

desam® spray

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu

➔ Nasz Plus

- szerokie spektrum działania (B, F, Tbc, V),
- krótki czas działania,
- gotowy do użycia,
- opakowanie ze zintegrowanym spryskiwaczem,
- nie wymaga spłukiwania.

Stężenie / czas kontaktu	30 s
B	•
Tbc	•
Y	•
F	•
vaccinia	•
adeno	•
noro	•
polio*	•

Skład: etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecylodimetyloamoni - 0,25g

* z niskim obciążeniem

Nowy mikrozyd® universal wyjątkowo wszechstronny produkt

Produkt o niskim stężeniu alkoholu przeznaczony do szybkiego mycia i dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń medycznych służących do wykonywania procedur nieinwazyjnych.

Szczególne zastosowanie mikrozyd® universal znajduje w dezynfekcji:

- telefonów komórkowych
- ekranów dotykowych
- pulpity
- klawiatur
- syntetycznej skóry
- powierzchni mebli



Wysoka zgodność materiałowa

Nowy mikrozyd® universal nadaje się idealnie do mycia i dezynfekcji powierzchni znajdujących się w pobliżu pacjenta.

Specjalnie skomponowana mieszanka surfaktantów zapewnia wysoką zgodność materiałową mikrozyd® universal.

Za pomocą tego produktu można umyć i dezynfekować tablety oraz smartfony.

Ponadto testy przeprowadzone przez schülke wykazały wyższą skuteczność mikrozyd® universal w porównaniu z innymi produktami tego typu.



Przebadany dermatologicznie

Jeśli jesteś pod presją czasu, możesz zastosować mikrozyd® universal nawet nie zakładając rękawiczek (oczywiście musisz przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa).

Ponieważ w mikrozyd® universal stężenie alkoholu jest niskie, jest on bezpieczny dla skóry, co zostało potwierdzone w niezależnych testach laboratoryjnych.



Działa błyskawicznie!

Czy szybka dezynfekcja środkiem o szerokim spektrum aktywności jest istotna w Twojej pracy? Spójrz, jak szybko działa mikrozyd® universal:

- Przeciwwirusowo (w obrębie spektrum aktywności):
15 sek.
- Przeciw norowirusom: 30 sek.



Opakowanie

1 l ze spryskiwaczem | 5 l softpack – 100 szt. chusteczek

Artykuły ułatwiające stosowanie

Uchwyt ścienny premium

mikrozyd® universal liquid | wipes premium | premium maxi

Niskoalkoholowy płyn/chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni

BAC

TB

VIRUCIDAL

NORO

+ Nasz Plus

- doskonała kompatybilność materiałowa (w tym głowice USG, ekrany dotykowe, itp.),
- szybkie działanie na wirusy osłonkowe już w 15 sek.,
- spektrum: B, V (BVDV, Rota, Polyoma SV 40, Vaccinia) – 15 sek., drożdżakobójcze (C. albicans) – 1 min, Tbc (M. terrae) – 5 min, V (Noro) – 30 sek., V (Adeno) – 15 min,
- możliwość użycia preparatu do sond USG wszystkich wiodących producentów, m.in. Aloka, Fujifilm (SonoSite), BK Ultrasound, GE, Hitachi, Mindray, Philips, Samsung (Medison), Siemens, Toshiba,
- przebadane zgodnie z EN 16615,
- rozmiar chusteczki 20 cm x 20 cm,
- testowane dermatologicznie.



mikrozyd® universal liquid


Skuteczność	Czas kontaktu	Stężenie / czas kontaktu	30 s
bakteriobójczo	15 sek.		
BVDV	15 sek.	B	•
vaccinia	15 sek.	Tbc	5 min.
wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV)	15 sek.	Y	1 min.
SARS-CoV-2	15 sek.	vaccinia	•
rota	15 sek.	rota	•
polyoma SV40	15 sek.	polyoma SV40	•
noro	30 sek.	noro	•
drożdżakobójczo	1 min.	SARS-CoV-2	•
noro	1 min.		
bójcze wobec prątków gruźlicy (M. terrae)	5 min.		
adeno	15 min.		

mikrozyd® universal wipes

Skład: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w)


* Z produktu można również korzystać bez użycia rękawic, jeśli jest to dozwolone zgodnie z normami ochrony przed zakażeniami i bezpieczeństwa pracy.

• **mikrozid® wipes** – przegląd produktów do szybkiej dezynfekcji
Bezpieczna dezynfekcja powierzchni każdego typu

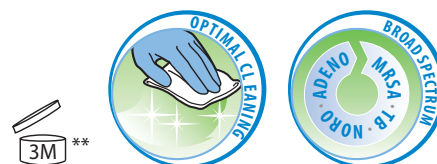


		Ø Rozmiar	Liczba w opakowaniu	Ø Gramatura
BAC TB NORO	mikrozid® AF wipes			
	Box Box Wkład	14 x 18 cm	150	24 g/m ²
	Jumbo Box Jumbo Box Wkład	20 x 20 cm	220	24 g/m ²

Substancje aktywne: etanol, propan-1-ol

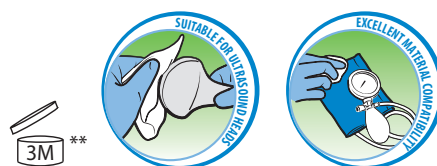

		Ø Rozmiar	Liczba w opakowaniu	Ø Gramatura
PERFUME FREE BAC	mikrozid® sensitive wipes			
	Box	14 x 18 cm	120	20 g/m ²
	Jumbo Box Jumbo Box Wkład	20 x 20 cm	200	20 g/m ²

Substancje aktywne: alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzylamoni, (C12-16)), chlorek didecyldimetyloamoni, alkil (C12-C14) chlorku etylbenzylamoni

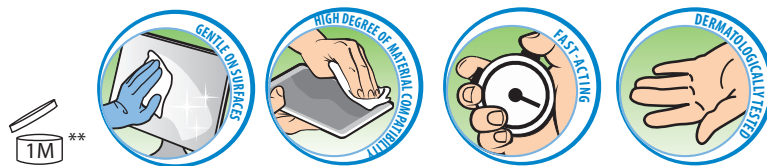

		Ø Rozmiar	Liczba w opakowaniu	Ø Gramatura
BAKT. ZID TB NORO VIRU ZID plus	mikrozid® universal wipes			
	Softpack premium	20 x 20 cm	100	50 g/m ²

Substancje aktywne: etanol, propan-2-ol

* Produkt jest nieodpowiedni do wykonywania ostatecznej dezynfekcji półkrytycznych wyrobów medycznych. / ** Termin ważności po otwarciu pojemnika jest oznaczany na artykułach przy użyciu następującego symbolu:

Szybka dezynfekcja powierzchni



mikrozid® AF wipes | Jumbo

Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek

Nasz Plus

- BAC** • włóknina nasączona alkoholowym preparatem dezynfekcyjnym,
- TB** • bez pochodnych jodu, chlorheksydyny, związków amoniowych,
- NORO** • spektrum działania: B (bójczo wobec prątków gruźlicy, MRSA), drożdżakobójczo (C. albicans, C. brasiliensis), V (Rota, Noro, Vaccinia, HSV, HBV, BVDV, HIV), Adeno – 30 sek., V (Polyoma SV 40) – 5 min,
- rozmiary chusteczek: mikrozid® AF chusteczki: 14 cm x 18 cm, mikrozid® AF Jumbo chusteczki: 20 cm x 20 cm.



Skuteczność	Czas kontaktu
BVDV	30 sek.
vaccinia	30 sek.
rota	30 sek.
bakteriobójczo	1 min.
prątkobójczo (M. terrae, M. avium)	1 min.
drożdżakobójczo	1 min.
noro	1 min.
grzybobójczo	2 min.
adeno (typ 2)	2 min.

Opakowanie

pojemnik – 150 szt. chusteczek
wkład – 150 szt. chusteczek
pojemnik – 220 szt. chusteczek Jumbo
wkład – 220 szt. chusteczek Jumbo



mikrozid® PAA wipes

Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

Nasz Plus

- BAC** • gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym,
- TB** • rekomendacja Philips do dezynfekcji sond TEE,
- VIRU CIDAŁ** • oparte na bazie kwasu nadoctowego,
- VIRU CIDAŁ** • szerokie spektrum mikroobójcze: B, Tbc (M. terrae), F, V (Noro, Adeno, Polio), S (w tym C. difficile, B. subtilis) w czasie do 15 min,
- NORO** • wysoka kompatybilność materiałowa,
- SPORI CIDAŁ** • możliwość stosowania do 28 dni od otwarcia,
- rozmiar chusteczki 20 cm x 30 cm,
- opinia Karl Storz.



Stężenie / czas kontaktu	60 s	5 min	15 min
B	•	•	•
Tbc			•
F	•	•	•
vaccinia	•	•	•
adeno	•	•	•
noro	•	•	•
polio			•
C. difficile		•	•

Skład: 100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 0,26 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzylamoni (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,26 g chlorek didicylodimetyloamoni (DDAC), 0,26 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzylamoni (ADEBAC (C12-C14)).

Opakowanie

pojemnik – 50 szt. chusteczek

Wyjątkowy: kwas nadoctowy w postaci „gotowej do użycia”!



Mikroobójcze działanie kwasu nadoctowego znane jest od ponad 100 lat. Jednak kwas nadoctowy zyskał większą uwagę dopiero w latach 60-tych XX wieku, kiedy to Kline i Hull wykazali jego doskonałe działanie przeciwko wirusom. Obecnie kwas nadoctowy przechodzi kolejne odrodzenie, przy czym czynnikami decydującymi o tym są wymagany krótki czas kontaktu i bezpieczne działanie dezynfekujące nawet przeciwko zarodnikom drobnoustrojów chorobotwórczych Clostridium difficile.

Idealny do stosowania w obszarach ryzyka. Charakterystyka sprawia, że produkty na bazie kwasu nadoctowego są doskonałymi środkami do dezynfekcji, w szczególności w obszarach ryzyka. Dowodem tego jest również rekomendacja Instytutu Roberta Kocha, który zaleca stosowanie kwasu nadoctowego do dezynfekcji obszarów wysokiego ryzyka.¹

schülke – ekspert w dziedzinie kwasu nadoctowego. Dzięki chusteczkom mikrozid® PAA spółki schülke jako pierwszej udało się stworzyć produkt zawierający kwas nadoctowy w postaci gotowych do użycia chusteczek. Czas kontaktu w przypadku chusteczek mikrozid® PAA jest znacznie krótszy w porównaniu z innymi chusteczkami gotowymi do użycia.

¹ www.rki.de
* zgodnie z wytycznymi DWV (niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zwalczenia Chorób Wirusowych)/RKI z grudnia 2014 r.
** Takie dopuszczenie do stosowania ograniczone jest do określonych rodzin produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Zastosowań schülke.

➔ Szybka dezynfekcja powierzchni



Opakowanie

pojemnik – 200 szt. chusteczek
wkład – 200 szt. chusteczek

mikroqid® sensitive wipes | Jumbo

Bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek

BAC

NORO

➔ Nasz Plus

- bez zawartości alkoholu i aldehydów,
- włóknina wiskozowa nasączona preparatem dezynfekcyjnym,
- doskonały do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi inkubatorów,
- spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, Rota, Vaccinia) – 1 min, V (Noro) – 15 min,
- doskonała tolerancja materiałowa,
- możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych,
- rozmiar chusteczki: 20 cm x 20 cm.



Stężenie / czas kontaktu	60 s
B	•
Y	•
vaccinia	•
rota	•
polyoma SV40	•
noro	(15 min.)

Skład: 100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 0,26 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzoyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,26 g chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC), 0,26 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzoyloamoni (ADEBAC (C12-C14)).



Opakowanie

1 l | 5 l | spryskiwacz do butelek 1 l
spryskiwacz pianowy do butelek 1 l

mikroqid® sensitive liquid

Bezalkoholowy preparat w postaci płynu do szybkiej dezynfekcji

BAC

NORO

➔ Nasz Plus

- bezbarwny,
- bez zawartości alkoholu i aldehydów,
- zawiera 3 substancje aktywne,
- doskonały do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi inkubatorów,
- spektrum działania: B, F (C. albicans), V (w tym BVDV, Rota, Vaccinia), V (Noro),
- doskonała tolerancja materiałowa,
- możliwość aplikacji w postaci piany,
- możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych.



Stężenie / czas kontaktu	60 s
B	•
Y	•
vaccinia	•
rota	•
polyoma SV40	•
noro	(15 min.)

Skład: 100 g roztworu zawiera następujące substancje czynne: 0,26 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzoyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,26 g chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC), 0,26 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzoyloamoni (ADEBAC (C12-C14)).



Opakowanie

500 ml ze spryskiwaczem
5 kg

desprej® sensitive

Bezalkoholowy preparat w płynie do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

➔ Nasz Plus

- preparat dezynfekcyjny na bazie amin i biguanidu,
- odpowiedni do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu,
- przyjemny zapach,
- skuteczny już od 1 minuty,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (BVDV, Vaccinia, Rota).

Skuteczność	Czas kontaktu
bakteriobójczo	1 min.
prątkobójczo	1 min.
grzybobójczo	1 min.
BVDV	1 min.
vaccinia	5 min.
rota	5 min.

Dezynfekcja powierzchni



Opakowanie

2 l | 5 l

terralin® protect

Preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego

Nasz Plus

- na bazie 3 substancji aktywnych,
- bez aldehydów, chloru, związków tlenowych, pochodnych guanidyny,
- spektrum działania: B, F (C. albicans) – 0,5% w 60 min, V (BVDV, Vaccinia, Rota) – 0,5% w 15 min, Tbc – 2% w 240 min, z możliwością rozszerzenia o V (Noro i Adeno), V (Polyoma SV40),
- dobra tolerancja materiałowa,
- nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym,
- może być stosowany w tzw. obszarach krytycznych (np. OIOM nad wcześnienikami/incubatory),
- dobre właściwości myjące,
- możliwość dozowania za pomocą urządzeń dozujących schülke.



Stężenie / czas kontaktu	0,25% / 5 min	0,5% / 15 min
B	•	•
Tbc		•
Y	•	•
BVDV	•	•
vaccinia		•
rota	•	•
polyoma SV40		•

Skład: 100 g preparatu zawiera: 22 g Alkil (C12-16)-chloru dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)), 17 g 2-fenoksyetanol, 0,9 g Aminy, N-C12-14 (o parzystej liczbie atomów węgla)-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (EC) 648/2004: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe.



Opakowanie

1 l | 5 l

desam® effekt +

Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych w postaci płynu

Nasz Plus

- mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych oraz innych powierzchni,
- produkt podwójnego przeznaczenia – do wyrobów medycznych i innych powierzchni,
- spektrum działania: B, F (C. albicans), – 0,25% w 10 min, V (BVDV, Vaccinia, Rota) – 0,5% w 15 min, Tbc (M. terrae), F - 1% w 15 min., Tbc - 1% w 30 min. z możliwością rozszerzenia o V (Noro i Adeno),
- do powierzchni mających kontakt z żywnością,
- wysoka wydajność preparatu (niskie stężenia),
- możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących.



Stężenie / czas kontaktu	0,25% / 5 min	1% / 15 min
B	•	•
Tbc	•	•
Y	•	•
F		•
vaccinia	•*	•
rota		•

Substancje czynne: Alkil (C12-16) chloru dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g, 2-Fenoksyetanol 10g/100g, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC) 3g/100g

Pozostałe składniki: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe

* z niskim obciążeniem



Opakowanie

1 l | 5 kg

desam® extra

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

Nasz Plus

- skoncentrowany preparat dezynfekcyjny na bazie QAC i amin,
- dobra tolerancja materiałowa,
- możliwość stosowania w obecności pacjentów,
- spektrum działania: B (w tym Tbc (M. terrae)), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) – 0,5% w 15 min, z możliwością rozszerzenia o V (Noro),
- do dezynfekcji w pionie żywieniowym.



Stężenie / czas kontaktu	0,25% / 15 min	0,5% / 5 min	0,5% / 15 min
B	•	•	•
Tbc	•		•
Y		•	•
F	+		•
vaccinia		•	•
rota		•	+

Skład: chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC) zaw.: 5% (50g/kg), alkil (C12-C16)-chloru dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-C16)) zaw.: 3,5% (35g/kg), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) zaw.: 6,6% (66g/kg)

➔ Dezynfekcja powierzchni



Opakowanie

2 l | 5 kg

desam® OX

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

Nasz Plus

- preparat na bazie nadtlenu wodoru oraz QAC,
- nie zawiera aldehydów,
- przyjemny, delikatny zapach roztworu roboczego,
- aktywny wobec B (w tym Tbc), F, V (BVDV, Vaccinia) – 1% w 30 min, z możliwością rozszerzenia o V (Adeno, Rota) i S (C. difficile),
- możliwość stosowania w obecności pacjentów,
- bardzo dobre właściwości myjące.

Stężenie / czas kontaktu	1% / 15 min	1% / 30 min	5% / 30 min
B	•	•	•
Tbc	•	+	•
Y		•	•
F	(20 min)	+	•
vaccinia		•	•
C. difficile			•

Skład: nadtlenek wodoru 110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecyldimetyloamoniowy 28 g/kg



Opakowanie

1 l | 5 l | 15 l

desam® prim

Płynny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów również w przemyśle spożywczym i higienie komunalnej

Nasz Plus

- skoncentrowany preparat na bazie podchlorynu sodu,
- do mycia i dezynfekcji w pionie żywieniowym,
- możliwość stosowania poprzez przecieranie, zanurzenie oraz opryskiwanie,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Noro, Adeno, Polio), S (C. difficile, B. subtilis) – 5% – 30 min.

Stężenie / czas kontaktu	1% / 15 min	3% / 15 min	5% / 30 min
B	•	•	•
Tbc			•
Y	•	•	•
F	•	•	•
vaccinia		•	•
adeno	•	•	•
noro	•	•	•
polio	•		•
C. difficile			•

Skład: podchloryn sodu 47g/kg (4,7%) (aktywny chlor 45g/kg)



Opakowanie

2 l | 5 l

quartamon® med

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych

Nasz Plus

- do manualnego i maszynowego stosowania,
- bez konieczności splukiwania,
- możliwość dozowania przy użyciu automatów dozujących,
- dobre właściwości myjące,
- bez zawartości aldehydów.

Stężenie / czas kontaktu	2% / 15 min
B	•
Y	•
vaccinia	•

Skład: 9,5 g Alkil (C12-16)-chlorku dimetylo-benzyloamoniou oraz 17,5 g 2-Fenoksyetanolu. Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 648/2004: (S - 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, Benzyl salicylate, Limonen, Hexyl cinnamal.

Dezynfekcja powierzchni



Opakowanie

300 szt. tabletek – pojemnik

chloramix® DT

Chlorowy preparat dezynfekcyjny w postaci tabletek

Nasz Plus



- uniwersalny preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru,
- łatwy w użyciu,
- długi okres ważności,
- spektrum działania: B (w tym Tbc (M. terrae)), F, V (Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis) 1 tab./1,5 l wody – 15 min, S (C. difficile) 10 tab./1,5 l wody – 10 min, Tbc (M. terrae, M. avium) – 1 tab./5 l wody – 30 min,
- do dezynfekcji w pionie żywieniowym.

Stężenie / czas kontaktu	1 tabl./1,5 litra wody 15 min
B	•
Tbc	•
Y	•
F	•
adeno	•
noro	•
polio	•
C. difficile	10 tabletek/1,5l wody 15 min

Skład: dihydrat dichloroizocyanuranu sodu 750g/kg
Zawartość aktywnego chloru: min 1,5g aktywnego Cl₂ / tabletkę pH roztworu 1% ok. 6



Opakowanie

40 g saszetka | 900 g pojemnik

perform®

Preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego

Nasz Plus



- na bazie bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczanu)pentapotasu,
- bez aldehydów i związków amoniowych,
- rozpuszczalny w bieżącej wodzie,
- bezbarwny roztwór roboczy,
- może być też stosowany wobec materiałów o wysokich wymogach, np. inkubatory, powierzchnie ze szkła akrylowego, wszystkie rodzaje wycisków stomatologicznych, maski do oddychania oraz inhalacji,
- aktywność roztworu roboczego – 30 godzin,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F (C. albicans), V (BVDV, Adeno, Noro, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Polio), S (C. difficile),
- dobra tolerancja materiałowa,
- możliwość stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory).


Stężenie / czas kontaktu	1% / 15 min	2% / 120 min
B	•	•
Tbc	•	•
Y	•	•
vaccinia	•	•
adeno	•	•
noro	•	•
polio	•	•
C. difficile		•

Skład: 45 g bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczanu) pentapotasu. Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (EC) 648/2004: 5 - 15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% mydło, < 5% fosfoniany, kompozycje zapachowe.



Opakowanie

- 160 ml tj. 80 ml terralin PAA base
- + 80 ml terralin PAA additive

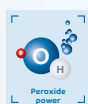

terralin® PAA

Dwukomponentowy preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów i wyposażenia medycznego. Zalecany do dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych

Nasz Plus



- spektrum działania: B (w tym Tbc), F (C. albicans), V (Adeno, Noro), S (w tym C. difficile), V (Polio),
- doskonała tolerancja materiałowa dzięki stałej wartości pH 6 roztworu użytkowego i dodatku inhibitorów korozji,
- dzięki zastosowaniu dwóch komponentów: stabilność i trwałość przechowywania, łatwość w sporządzaniu roztworu użytkowego,
- pewność przygotowania odpowiedniego stężenia roztworu roboczego.

Stężenie / czas kontaktu	2% / 5 min	2% / 15 min
B	•	•
Tbc	•	•
Y	•	•
F	•	•
vaccinia		•
adeno	•	•
noro	•	•
polio		•
S	•	•

Skład: terralin PAA base (składnika bazowego): 100 g roztworu zawiera: 5 g kwasu nadoctowego oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy. terralin PAA base oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.
Skład terralin PAA additive (dodatek modyfikujący): wodorotlenek potasu, inhibitory korozji, terralin PAA additive oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: < 5% fosforany.

➔ Produkty specjalne



mikrocount® testy mikrobiologiczne *premium | premium maxi*

Praktyczny test zanurzeniowy służący do sprawdzenia stanu mikrobiologicznego powierzchni

➔ Nasz Plus

- mikrocount® TPC: możliwość wykrycia istotnych patogenów bakteryjnych,
- mikrocount® duo: możliwość wykrycia zarówno bakterii, jak i pleśni oraz drożdżaków,
- mikrocount® TPC / E: możliwość wykrycia istotnych drobnoustrojów bakteryjnych, w tym tych należących do rodziny Enterobacteriaceae.

Opakowanie

mikrocount® TPC – 20 szt.

mikrocount® duo – 20 szt.

mikrocount® TPC / E – 20 szt.

inkubator cultura®



- ➔ Szybkie i proste w obsłudze – giętki uchwyt testu pozwala na dokładne pobranie materiału



- ➔ W celu inkubacji próbek mikrocount® polecamy mały inkubator cultura®
- ➔ cultura® mieści w sobie 18 testów mikrocount
- ➔ W celu oceny gęstości kolonii na nośniku należy porównać ją z dostarczoną tabelą zawierającą zdjęcia

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.mikrocount.com

➤ Kompleksowa higiena w gabinecie stomatologicznym



Dezynfekcja rąk

desderman® pure
desderman® pure gel
desmanol® pure

Mycie rąk

sensiva® emulsja myjąca



Mycie i dezynfekcja
unitów i ślinociągów

aspirmatic® cleaner



Pielęgnacja rąk

balmea®



Higiena jamy ustnej

octenident®



Mycie i dezynfekcja
unitów i ślinociągów

aspirmatic®



Dezynfekcja i leczenie ran

octenisept®



Dezynfekcja narzędzi

gigasept® instru AF



Szybka
dezynfekcja powierzchni

mikrozid® AF chusteczki
mikrozid® AF liquid
mikrozid® sensitive liquid
mikrozid® universal wipes



Dezynfekcja
narzędzi obrotowych

rotasept®



Mycie podłóg

profloor® Uni



Dezynfekcja podłóg

desam® effekt+

Manualna dezynfekcja sprzętu i narzędzi



Opakowanie

2 l

rotasept®

Preparat do dezynfekcji i czyszczenia precyzyjnych narzędzi obrotowych

BAC

TB

VIRU
CIDAL

NORO

-+ Nasz Plus

- gotowy do użycia,
- nie zawiera aldehydów,
- na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F (C. albicans), V (Polio, Adeno, Vaccinia, Polyoma SV 40, Noro) – do 15 min,
- doskonała tolerancja materiałowa,
- specjalna ochrona przed korozją,
- nie wymaga stosowania aktywatora,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych,
- nie wymaga splukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji,
- wyrób medyczny.

Stężenie / czas kontaktu	2% / 15 min
bakteriobójczo	1 min.
prątkobójczo	15 min.
drożdżakobójczo	1 min.
wirusobójczo	1 min.
Polyoma SV 40	5 min



Opakowanie

2 l

aspirmatic®

Preparat do codziennego mycia i dezynfekcji oraz pielęgnacji systemów ślinociągów i splotaczek przy unitach

BAC

VIRU
CIDAL

-+ Nasz Plus

- nie zawiera aldehydów,
- łatwa i bezpieczna obsługa,
- nie wytwarza piany w separatorze amalgamatu,
- spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) – 2% – 30 min,
- preparat przetestowany na urządzeniach KaVo i Sirona,
- wyrób przeznaczony jest nie tylko do mycia wewnętrznych powierzchni rur i usuwania ewentualnej warstwy nalotu biologicznego, ale także do dezynfekcji instalacji rurociągowych poprzez całkowite zniszczenie znajdujących się tam mikroorganizmów,
- wyrób medyczny.

Stężenie / czas kontaktu	2% / 15 min
bakteriobójczo	•
drożdżakobójczo	•
vaccinia	•
BVDV	•

aspirmatic® cleaner

Przystosowane do wspólnego stosowania preparaty

aspirmatic®(czyszcząca dezynfekcja) i aspirmatic® cleaner (specjalny środek czyszczący) umożliwiają kompleksowe czyszczenie przy zachowaniu niezbędnego stopnia bezpieczeństwa higienicznego.

Łatwa obsługa systemu aspirmatic® (dozownik) sprawia użytkownikom produktów w trakcie rutynowej pracy przyjemność.

Zakres zastosowania:

- aspirmatic®: preparat do codziennej czyszczącej dezynfekcji i konserwacji używanych w stomatologii systemów odsysania i umywalek przeznaczonych do płukania jamy ustnej (spluwaczek);
- aspirmatic® może być stosowany również do dezynfekcji w urządzeniach wykorzystywanych w laryngologii;
- aspirmatic® cleaner: preparat do cotygodniowego wspomagającego czyszczenia używanych w stomatologii systemów odsysania, umywalek przeznaczonych do płukania jamy ustnej i przewodów odpływowych.

Opakowanie

2 l



Metody stosowania / wskazówki

W wyniku codziennego odsysania substancji organicznych i nieorganicznych zachodzi niebezpieczeństwo, iż substancje te odkładają się będą w przewodach, zasychać lub stanowić potencjalne źródło zakażenia dla personelu podczas wymiany filtrów. By unikać zakłóceń w funkcjonowaniu systemów odsysania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa higienicznego należy stosować tzw. program aspirmatic®.

Preparat aspirmatic® stosuje się do czyszczącej dezynfekcji, w stężeniu 2%. Preparat aspirmatic® zaleca się stosować dwa razy w ciągu dnia pracy tj. w połowie (np. w czasie przerwy obiadowej) oraz pod koniec dnia pracy – po zakończeniu zabiegów. W tym celu należy przygotować 2 litry roztworu użytkowego aspirmatic® na każdy unit stomatologiczny. Około 1,5 litra gotowego roztworu użytkowego przepuścić przez węże systemu ssącego, a pozostałe 0,5 litra nalać do umywalki służącej do płukania jamy ustnej. Preparat aspirmatic® powinien być stosowany w czasie przerwy np. obiadowej (co najmniej 30 minut) wzgl. całą noc. Pomoc w dozowaniu: dozownik butelkowy S&M (dwukrotne przechylenie butelki z dozownikiem dnem do góry = 40 ml = 2% na 2 litry wody). Preparat aspirmatic® cleaner stosowany jest w stężeniu 5%. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń należy zwiększyć stężenie do 10%. Preparat aspirmatic® cleaner należy stosować jako specjalny środek czyszczący raz dwa razy w tygodniu, zamiast dezynfekcji, w połowie dnia pracy. W tym celu należy przygotować 2 litry roztworu użytkowego aspirmatic® cleaner na każdy zestaw zabiegowy. Około 1,5 litra przepuścić przez przewody giętkie systemu ssącego, a pozostałe 0,5 litra nalać do umywalki do płukania jamy ustnej. Pozostawić na ok. 2 godziny (np. przerwa obiadowa), do rozpuszczenia zabrudzeń. Po upływie czasu oddziaływania, sprzęt należy przepłukać wodą, co pozwoli na wypłukanie rozpuszczonych zanieczyszczeń z przewodów giętkich.



Pomoc w dozowaniu: dozownik butelkowy S&M – 5 razy przechylić dozownik z butelką dnem do góry = 100 ml = 5% na 2 litry wody.

Uwaga: preparat aspirmatic® cleaner nie powinien być pozostawiany w instalacji na noc.

Wskazania szczególne





Nie mieszać koncentratów i roztworów użytkowych aspirmatic® i aspirmatic® cleaner. System aspirmatic® gwarantuje łatwe i bezpieczne mieszanie i nalewanie gotowego roztworu. Przewody ssące pozwalają na ich łatwe nasadzenie na końcówki adapterów. W przypadku silnego zanieczyszczenia krtwi bezpośrednio po zabiegu instalację należy przepłukać wodą.

► Bezpieczne i skuteczne manualne mycie i dezynfekcja



...czyszczenie i dezynfekcja na potrzeby ręcznego i automatycznego przygotowania do ponownego użycia




	Zastosowanie				Obszary zastosowania			Strona
	Czyszczenie	Pomoc w zakresie przepłukiwania	Dezynfekcja	Neutralizacja	Centralna sterylizatornia	Endoskopy (elastyczne endoskopy wykonane z materiałów wrażliwych na działanie temperatury)	Myjki do łóżek i pojemników	
thermosept® X-tra 	●				●	●	●	65
thermosept® alka clean forte	●				●		●	65
thermosept® RKF	●				●		●	66
thermosept® NKZ				●	●			66
thermosept® NKP				●	●			67
thermosept® BSK		●			●		●	67
thermosept® NDR	●		●				●	67
thermosept® EndoCleaner 	●					●		68
thermosept® ER	●				●	●		68
thermosept® ED			●		●	●		68
thermosept® PAA 			●			●		69
thermosept® SKS		●					●	70

Z przyczyn regulacyjnych (w szczególności z powodu zmiany norm) deklaracje dotyczące poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W celu uzyskania wiążących, aktualnych zaleceń dotyczących stosowania i skuteczności należy korzystać wyłącznie z dokumentacji dotyczącej konkretnego produktu albo odwiedzić witrynę www.schuelke.com.

Higieniczne czyste do najmniejszego detalu

- Optymalny cykl reprocesowania endoskopu – minimalne ryzyko infekcji

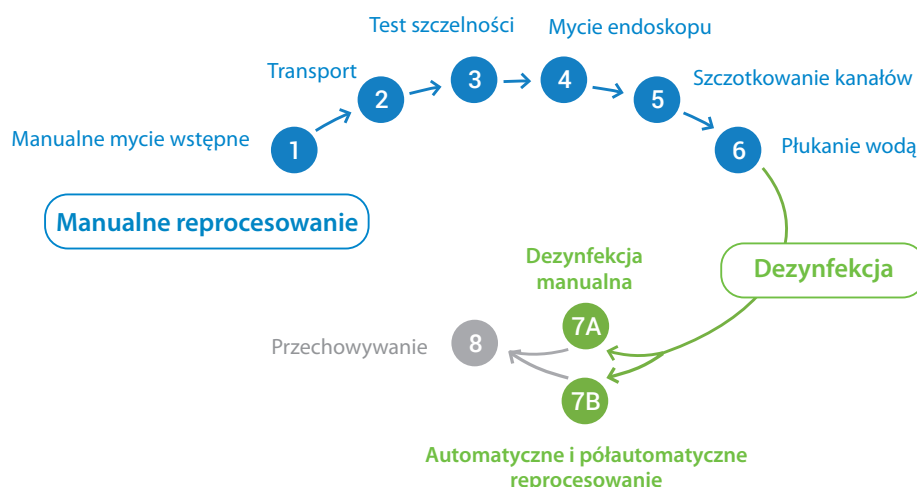


1 Manualne mycie wstępne



2 Transport do miejsca reprocesowania



3 Test szczelności

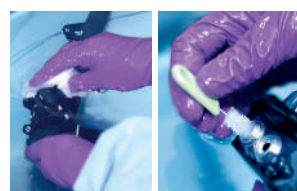


4 Mycie endoskopu



5 Szczotkowanie kanałów



6 Wypłukanie pozostałości środka

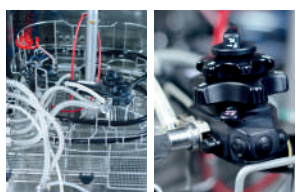

7 Automatyczne termiczno-chemiczne mycie i dezynfekcja



8 Odpowiednie przechowywanie endoskopów

- Dezynfekcja ani sterylizacja nie są skuteczne bez właściwego mycia

Drobnoustroje mogą być skutecznie zniszczone tylko, jeśli nie są chronione przez warstwę zanieczyszczeń organicznych. Dokładne mycie jest kluczowe dla późniejszej skutecznej dezynfekcji oraz sterylizacji.

Gdy reprocesujemy wymagający i skomplikowany sprzęt, jak np. endoskopy elastyczne, konieczne jest stosowanie nowoczesnych, wysoce wydajnych oraz bezpiecznych środków. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kanałów endoskopu o małej średnicy, w których może powstawać biofilm.

Jakość i siła preparatu myjącego odgrywa kluczową rolę zarówno w procesie mycia manualnego, jak i automatycznego. Tylko nowoczesne, kompatybilne ze sobą środki mogą skutecznie usunąć trudne zanieczyszczenia w trakcie procesu.

Manualne mycie i dezynfekcja



Opakowanie
750 ml z atomizerem

gigazyme® actifoam + Enzymatyczna pianka do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

➤ Nasz Plus

- jednocześnie myje i dezynfekuje,
- zapewnia ochronę narzędzi i personelu,
- skutecznie zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach,
- nowoczesne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie,
- duża stabilność pianki,
- doskonała kompatybilność materiałowa,
- synergistyczne działanie kompleksu trzech enzymów oraz surfaktantów zapewnia doskonały efekt mycia,
- gotowa do użycia.

Stężenie / czas kontaktu	5 min	60 min
B	•	
Tbc		•
Y	•	
vaccinia	•	

Skład: 100 g zawiera: N-(3-aminopropilo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 0,27 g, 2-fenoksyetanol 0,2 g, węgiel didecylo-dimetylamonium 0,55 g
Pozostałe substancje: <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, enzymy, inhibitor korozji



Artykuły ułatwiające stosowanie

Wanienki na narzędzia



Opakowanie
2 l

gigazyme® Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestetycznego

➤ Nasz Plus

- na bazie enzymów i niejonowych tenzydów,
- nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów,
- doskonałe właściwości myjące,
- doskonała tolerancja materiałowa,
- zawiera substancje chroniące przed korozją,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych,
- płynny koncentrat.

Stężenie / czas kontaktu	3 – 5 min
0,5-1%	przy normalnym zanieczyszczeniu
10%	przy silnym zanieczyszczeniu

Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe



Artykuły ułatwiające stosowanie

Wanienki na narzędzia



Opakowanie
2 l | 5 l

gigazyme® X-tra Enzymatyczny środek do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestetycznego

➤ Nasz Plus

- płynny koncentrat,
- doskonałe właściwości myjące,
- zawierający synergistycznie działający kompleks enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych,
- bardzo wysoka kompatybilność materiałowa,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych,
- spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia).



Stężenie / czas kontaktu	0,5% / 15 min
B	•
Y	•
vaccinia	•

Skład: 100g preparatu gigazyme® X-tra zawiera: 7,7g chlorku didecylo-dimetylamonowego, 0,4g chlorowodoru poli(heksametylenobiguanidu).
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (EC) 648/2004:
5 - 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe.



Artykuły ułatwiające stosowanie

Wanienki na narzędzia

Manualne mycie i dezynfekcja



Opakowanie

1 l z wbudowanym systemem dozującym
5 kg

discleen® extra

Płynny koncentrat do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego

BAC

TB

VIRU

CIDAL

Nasz Plus

- skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin,
- nie zawiera aldehydów,
- prosta aplikacja za pomocą wbudowanego systemu dozującego,
- aktywny wobec B, F, Tbc, V (BVDV, Vaccinia),
- zawiera inhibitory korozji,
- możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych.

Stężenie / czas kontaktu	1% / 15 min
B	•
Tbc	•
F	•
vaccinia	•

Skład: 100 g produktu zawiera: 50 g chlorku didecyldimetyloamoniowego, 35 g chlorku benzyloalkilodimetylowego, 66 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy



Artykuły ułatwiające stosowanie

Wanienki na narzędzia



Opakowanie

2 l | 5 l

gigasept® instru AF

Preparat do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych oraz przyrządów anestezyjologicznych*

BAC

TB

Nasz Plus

- bez aldehydów, fenolu i związków tlenowych,
- zawiera czwartorzędowe związki amoniowe oraz pochodne guanidyny,
- bardzo dobra tolerancja materiałowa i skuteczność mycia,
- płynny koncentrat,
- spektrum działania: B (w tym MRSA, Tbc (M.terrae)), F (C. albicans), V (Rota, Vaccinia, BVDV), V (Adeno), V (Papova SV 40),
- przebadany zgodnie z normami europejskimi,
- przygotowany i użytkowany roztwór roboczy jest skuteczny mikrobiologicznie przez 7 dni – również w warunkach obciążenia surowicą,
- zapobiega tworzeniu się biofilmu,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych .

Stężenie / czas kontaktu	1% / 15 min
B	•
Tbc	•
Y	•
vaccinia	•
rota	•

Skład: 100g preparatu gigasept® instru AF zawiera: 14g dioctanu kokospropylenodiaminoguanidyny ,35g fenoksypropanole, 2,5g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem nr 648/2004: 5 - 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne. Pozostałe składniki: regulatory pH, inhibitory korozji, barwniki.



Artykuły ułatwiające stosowanie

Wanienki na narzędzia



➔ Manualne mycie i dezynfekcja



Opakowanie

2 l | 5 l

gigasept® AF forte

Preparat do manualnej dezynfekcji oprzyrządowania anestezyjologicznego, endoskopów giętkich, sond ultradźwiękowych, instrumentów i narzędzi chirurgicznych, masek oddechowych*

BAC

TB

➔ Nasz Plus

- bez aldehydów, fenoli i związków tlenowych,
- zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, związki powierzchniowo czynne, pochodne guanidyny,
- doskonała tolerancja materiałowa – nie matowi optyki,
- płynny, w koncentracji,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F (C. albicans), V (Vaccinia, Rota, BVDV), V (Papowa SV 40), V (Adeno),
- przebadany zgodnie z normami europejskimi,
- przygotowany i użytkowany roztwór roboczy jest skuteczny mikrobiologicznie przez 7 dni – również w warunkach obciążenia surowicą,
- możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych.



Stężenie / czas kontaktu	1% / 5 min	2% / 15 min	3% / 5 min
B	•	•	•
Tbc	•		•
Y	•	•	•
vaccinia	•	•	•
rota	•	•	•
polyoma SV 40	•	•	•

Skład: 100 g preparatu gigasept® AF forte zawiera: 10,0 g chlorku dimetyldioctyloamoniowego, 15,0 g fenoksypropanole, 15,6 g diocanu kokopropyleno diamino biguanidyny, 9,5 g N-dodecylopropano 1,3-diamina. Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (EC) 648/2004: 5 - 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe. Pozostałe składniki: regulatory pH, substancje chroniące przed korozją, substancje barwiące.



Artykuły ułatwiające stosowanie

Wanienki na narzędzia



➔ Dalsze informacje można uzyskać, zamawiając naszą broszurę

Folder
Bezpewczestwo
i skutecznořć w endoskopii

* Produkt jest nieodpowiedni do wykonywania ostatecznej dezynfekcji półkrytycznych wyrobów medycznych.
** zgodnie z wytycznymi DW (niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zwalczania Chorób Wirusowych)/RKI z grudnia 2014 r.

Manualne mycie i dezynfekcja



Opakowanie

500 g | 1,5 kg | 2,5 kg | 6 kg

chirosan® plus

Preparat do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego na bazie aktywnego tlenu

BAC

TB

VIRU

CIDAL

NORO

SPORI

CIDAL

C. DIFF

Nasz Plus

- preparat w postaci proszku przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów (opinia Karl Storz),
- działa na bazie aktywnego tlenu,
- przyjazny dla środowiska, ulega biodegradacji,
- zrównoważony kompleks trzech enzymów, które rozkładają białka, tłuszcze i cukry,
- enzymy umożliwiają szybką likwidację zanieczyszczeń organicznych oraz spowalniają wzrost biofilmu,
- zawiera inhibitory korozji, które chronią narzędzia podczas dezynfekcji, a tym samym przedłużają ich czas użytkowania,
- szerokie spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc, F, V (Vaccina, BVDV, Polio),
- Adeno, Noro, Rota), S (C. difficile, B. subtilis, C. sporogenes),
- przeznaczony do manualnego czyszczenia i dezynfekcji, jak również do wykorzystania w myjkach ultradźwiękowych,
- łatwa aplikacja za pomocą łyżki/kubka,
- możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi,
- stabilność roztworu roboczego (36 h).

Spektrum	Czas kontaktu: 0,5% 60 min lub 1% 30 min 1% / 15 min
B	•
MRSA	•
F	•
Tbc	•
vaccinia	•
BVDV	•
noro	•
adeno	•
polio	•
rota	•
C. difficile	•
B. subtilis	•
B. cereus	•

Skład: in situ generowany kwas nadoctowy (2% roztwór zawiera 1000 ppm kwasu nadoctowego)
Zawiera nadwęglan sodu, TAED, kompleks enzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza), inhibitory korozji, surfaktanty



Opakowanie

1,5 kg | 6 kg

gigasept® granulate plus

Preparat na bazie aktywnego tlenu do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych

BAC

TB

VIRU

CIDAL

SPORI

CIDAL

C. DIFF

NORO

Nasz Plus

- doskonałe właściwości myjące,
- dezynfekcja wysokiego stopnia,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i mycia metodą cyrkulacyjną (półautomaty),
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Adeno, Noro, Polio), S (C. difficile, B. Subtilis, C. perfringens). Adeno, Noro, Rota), S (C. difficile, B. subtilis, C. sporogenes).



Stężenie / czas kontaktu	2% / 15 min	3% / 15 min
B	•	•
Tbc	•	•
Y	•	•
F	(30 min)	•
vaccinia	•	•
adeno	•	•
noro	•	•
polio	•	•
C. difficile	•	•
S		•

Skład: 100 g granulatu zawiera substancję czynną: 30 g nadwęglan sodu, > 30 % związki wybielające na bazie tlenu, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole.

Manualne mycie i dezynfekcja



Opakowanie

1,5 kg | 6 kg

gigasept® pearls

Granulowany preparat na bazie aktywnego tlenu przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego oraz innych wyrobów medycznych

BAC
TB
VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL


Nasz Plus

- zawiera kompleks enzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza),
- bardzo dobre właściwości myjące,
- doskonała kompatybilność materiałowa,
- skuteczny wobec *C. difficile*,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Adeno, Noro, Polio), S (*C. difficile*, *B. Subtilis*),
- możliwość stosowania do głowic USG,
- dezynfekcja wysokiego stopnia,
- opinia Karl Storz,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.



Stężenie / czas kontaktu	2% / 15 min
B	•
Tbc	•
Y	•
F	•
vaccinia	•
adeno	•
noro	•
polio	•
<i>C. difficile</i>	•

Skład: 100g granulek zawiera następującą ilość składników aktywnych: 43,0g nadwęglanu sodu, 22,0g tetractetyloetylenodiamina (TAED), >30% związki wybielające na bazie tlenu, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosforany, <5% EDTA oraz jego sole, enzymy, substancje zapachowe

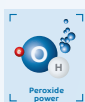

Opakowanie

200 ml,
tj. 100 ml gigasept PAA koncentrat base +
100 ml gigasept PAA koncentrat additive

BAC
TB
VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL

gigasept® PAA concentrate

Produkt na bazie kwasu nadoctowego do manualnego przygotowywania endoskopów giętkich oraz narzędzi chirurgicznych

Nasz Plus

- spektrum działania: B (w tym Tbc), F (*C. albicans*), V (Adeno, Noro), S (*C. difficile*), V (Polio),
- doskonała tolerancja materiałowa dzięki stałej wartości pH 6 roztworu użytkowego i dodatku inhibitorów korozji,
- dzięki zastosowaniu dwóch komponentów: stabilność i trwałość przechowywania, łatwość w sporządzaniu roztworu użytkowego.



Stężenie / czas kontaktu	2% / 5 min	2% / 15 min
B	•	•
Tbc	•	•
Y	•	•
vaccinia	•	•
adeno	•	•
noro	•	•
polio	•	•
S	•	•

Skład: Komponent A (biała nasadka): 100 g roztworu zawiera jako substancje czynną: 5 g kwasu nadoctowego. Pozostałe składniki to: nadtlenek wodoru i kwas octowy. Komponent B (czerwona nasadka): Wodorotlenek potasu, inhibitor korozji. Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem nr 648/2004: Komponent A (biała nasadka) < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne; Komponent B (czerwona nasadka) < 5 % fosforany



Opakowanie

5 l
paski 50 szt.

BAC
TB
VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL
C.
DIFF

gigasept® PAA

Specjalistyczny preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich, wideoendoskopów, sprzętu i oprzyrządowania okulistycznego

Nasz Plus

- nie zawiera aldehydów,
- na bazie kwasu nadoctowego,
- szybka i szeroka skuteczność mikrobiologiczna, w tym: B (w tym Tbc), F, V (Polio, Adeno), S (*C. difficile*) w czasie do 5 min,
- przebadany zgodnie z normami europejskimi,
- gotowy do użycia,
- nie wymagający aktywatora,
- skuteczność mikrobiologiczna 7 dni lub 50 cykli zastosowań,
- zapobiega tworzeniu się biofilmu,
- możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi.



Stężenie / czas kontaktu	5 min
B	•
Tbc	•
F	•
adeno	•
polio	•
<i>C. difficile</i>	•

Skład: 100g preparatu gigasept® PAA zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze.

Manualne mycie i dezynfekcja



Opakowanie

Zestaw: 2x kanister 4940 g + 2x aktywator 60 g

discleen® endo PAA

Płynny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz oprzyrządowania wrażliwego na temperaturę

BAC

TB

VIRU

CIDAL

SPORI

CIDAL

Nasz Plus

- dwuskładnikowy środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego,
- przeznaczony do manualnej dezynfekcji narzędzi i endoskopów,
- preparat po dodaniu aktywatora jest gotowy do użycia,
- aplikuje się na wcześniej umyte endoskopy,
- krótki czas działania,
- aktywność roztworu jest kontrolowana za pomocą testowych pasków kontrolnych do discleen endo PAA®,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Polio, Adeno), S (B. subtilis),
- stabilność roztworu roboczego (7 dni lub 50 cykli).

Stężenie / czas kontaktu	5 min
B	•
Tbc	•
F	•
adeno	•
polio	•
C. difficile	•
S	•

Skład: in-situ generowany kwas nadoctowy 2,3g/kg, nadtlenuk wodoru, inhibitory korozji.



Opakowanie

2 l | 5 l

gigasept® FF new

Preparat do manualnej dezynfekcji endoskopów, sond ultradźwiękowych, przyrządów anestetycznych itd.

BAC

TB

VIRU

CIDAL

SPORI

CIDAL

Nasz Plus

- nie zawiera formaldehydu i aldehydu glutarowego,
- na bazie aldehydu bursztynowego,
- doskonała tolerancja materiałowa, nie matowi optyki,
- płynny w koncentracji,
- nie wymaga stosowania aktywatora,
- spektrum działania: B (w tym Tbc), F (C. albicans), V (Adeno, Vaccinia, BVDV) – 6% w 15 min, V (Polyoma SV 40), V (Polio), S (C. difficile),
- przygotowany i użytkowany roztwór roboczy jest skuteczny mikrobiologicznie przez 14 dni – również w warunkach obciążenia surowicą,
- przebadany zgodnie z normami europejskimi,
- pozytywna opinia m.in. Olympus, Pentax, Karl Storz,
- możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi.

Stężenie / czas kontaktu	4% / 30 min	6% / 15 min	6% / 6 h
B	•	•	•
Tbc	•	•	•
Y	•	•	•
vaccinia	•	•	•
polyoma SV 40	•		•
adeno	•	•	•
C. difficile			•

Skład: 100 g preparatu gigasept® FF new zawiera: 11,9 g dialdehydu kwasu bursztynowego, 3,2 g dimetoksytetrahydrofuranu, < 5% fosfoniany, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, Methylisothiazolinone, substancje zwiększające rozpuszczalność, regulatory pH, barwniki, inhibitor korozji.



- Wysoka skuteczność automatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych



➤ Maszynowe mycie i dezynfekcja

Brak szans na pomyłkę!

Kod kolorystyczny kanistrów thermosept



thermosept® X·tra

Lekko alkaliczny preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego na bazie synergistycznie działającego kompleksu enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych (nie zawiera krzemianów)



Mycie

Opakowanie

5 l | 10 l | 20 l | 200 l

➤ Nasz Plus

- płynny koncentrat,
- doskonała skuteczność mycia dzięki synergistycznemu działaniu enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych,
- wysoka kompatybilność materiałowa,
- niskie stężenia roztworu roboczego,
- pH >10 roztworu roboczego – ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha),
- rekomendacja MIELE.



thermosept® alka clean forte

Płynny alkaliczny preparat do maszynowego mycia narzędzi



Mycie

Opakowanie

5 kg

➤ Nasz Plus

- lekko alkaliczny środek do mycia narzędzi, dobra tolerancja materiałowa, możliwość stosowania wobec aluminium,
- ograniczenie do minimum ryzyka jatrogennego przenoszenia choroby Creutzfelda-Jacoba CJK/vCJK (zgodnie z informacją Instytutu Roberta Kocha),
- doskonała skuteczność mycia,
- szeroki zakres stosowania.

➡ Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi



Mycie

Opakowanie

5 kg

thermosept® RKF

Płynny preparat o odczynie alkalicznym do maszynowego mycia narzędzi i wyposażenia medycznego

-+ Nasz Plus

- nie zawiera fosforanów,
- doskonała skuteczność mycia,
- nie pieni się,
- rekomendacja Miele.



Mycie

Opakowanie

5 l

thermosept® ER

Koncentrat enzymatycznego środka czyszczącego do automatycznego przygotowywania endoskopów elastycznych do ponownego użycia

-+ Nasz Plus

- neutralne pH,
- doskonała kompatybilność materiałowa,
- doskonały w połączeniu z thermosept® ED,
- niewielkie pienienie.



Neutralizacja

Opakowanie

5 kg

thermosept® NKZ

Preparat neutralizujący stosowany po maszynowej, termicznej lub chemiczno-termicznej dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych lub innych wyrobów medycznych, zawierający kwas cytrynowy

-+ Nasz Plus

- działa ochronnie na powierzchnię instrumentów,
- optymalizacja procesu po zastosowaniu alkalicznego środka myjącego,
- nie zawiera fosforanów i związków powierzchniowo czynnych,
- rekomendacja Miele.

➔ Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi



Neutralizacja

Opakowanie

6 kg

thermosept® NKP

Preparat neutralizujący stosowany po maszynowej, termicznej lub chemiczno-termicznej dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierający kwas fosforowy

-+ Nasz Plus

- nie zawiera związków powierzchniowo czynnych,
- optymalizacja wyników po zakończeniu mycia środkami alkalicznymi,
- rekomendacja Miele.



Płukanie

Opakowanie

5 kg | 20 l

thermosept® BSK

Neutralny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji

-+ Nasz Plus

- obojętny odczyn pH,
- środek niskopieniący,
- zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu,
- doskonale współdziała w połączeniu z produktem thermosept® NDR,
- pozwala na skrócenie czasu suszenia.



Dezynfekcja

Opakowanie

20 l

thermosept® NDR

Bezaldehdowy preparat do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych, np. łóżek, stolików nocnych, wózków szpitalnych itp.

-+ Nasz Plus

- nie zawiera aldehydów,
- obojętny odczyn pH,
- nie pieni się,
- doskonale współdziała w połączeniu z produktem thermosept® BSK,
- spektrum działania: B, F (w tym C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) – 1% w 5 min.

➡ Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów



thermosept® EndoCleaner

Lekko alkaliczny płynny koncentrat do maszynowego mycia endoskopów elastycznych oraz oprzyrządowania endoskopowego



Mycie

Opakowanie

5 l

➡ Nasz Plus

- lekko alkaliczny,
- doskonała jakość mycia,
- doskonała kompatybilność materiałowa,
- możliwość stosowania w połączeniu z preparatami dezynfekcyjnymi na bazie aldehydu (thermosept® ED) lub kwasu nadocetowego (thermosept® PAA),
- zawiera synergistyczny kompleks enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych.



Mycie

Opakowanie

5 l

thermosept® ER

Koncentrat enzymatycznego środka czyszczącego do automatycznego przygotowywania endoskopów elastycznych do ponownego użycia

➡ Nasz Plus

- neutralne pH,
- doskonała kompatybilność materiałowa,
- doskonały w połączeniu z thermosept® ED,
- niewielkie pienienie.



Dezynfekcja

Opakowanie

5 l

thermosept® ED

Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów, np. endoskopy i oprzyrządowanie anestezyjologiczne itp.

BAC

TB

VIRU
CIDAL

SPORI
CIDAL

➡ Nasz Plus

- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Polio, HBV, BVDV, Adeno, Papowa SV 40, Parwowirus, Vaccinia), S (B. subtilis) – 1% w 5 min w temperaturze 55°C,
- sprawdzona zgodność materiałowa endoskopów, np. Olympus, Pentax, Fujinon itp. oraz urządzeń dezynfekcyjno-myjących, np. Olympus, BHT, Belimed, HAMO,
- nie pieni się,
- ulega biodegradacji,
- wzajemnie przystosowanie w procesach czyszczenia i dezynfekcji.

Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów



thermosept® X·tra

Lekko alkaliczny preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie synergistycznie działającego kompleksu enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych (nie zawiera krzemianów)

Nasz Plus

- płynny koncentrat,
- doskonała skuteczność mycia dzięki synergistycznemu działaniu enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych,
- wysoka kompatybilność materiałowa,
- niskie stężenia roztworu roboczego,
- pH >10 roztworu roboczego – ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha),
- rekomendacja MIELE.

Mycie



Opakowanie

5 l | 10 l | 20 l | 200 l



thermosept® PAA

Płyn na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocessowania endoskopów

Nasz Plus

- spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Adeno, Polio, Noro, Polyoma SV40), S (C. difficile, B. subtilis) – 1-1,2% w 5 min, w temperaturze 35-37°C
- wysoka kompatybilność materiałowa,
- możliwość użycia preparatu do endoskopów wszystkich wiodących producentów, m.in. Olympus, Pentax, Karl Storz, Richard Wolf, Fujinon,
- możliwość stosowania preparatu w urządzeniach myjącodezynfekujących np.: Belimed, Getinge, Olympus, BHT, Steelco, MMM, Steris/Hamo, Wassenburg,
- preparat dwukomponentowy do jednoczesnego stosowania.

Dezynfekcja



Opakowanie

thermosept PAA base – 2 x 5 l
thermosept PAA additive – 5 l

nr katalogowy: 70002422

Bezpieczny i łatwy do zastosowania adapter



thermosept® PAA additive – 5l

thermosept® PAA base – 4l

Do myjni Olympus

➡ Maszynowe mycie i dezynfekcja – kaczki i baseny



Płukanie

Opakowanie

5 kg (219 mm x 244 mm x 143 mm)

5 kg (247 mm x 195 mm x 149 mm)

thermosept® SKS

Preparat o kwaśnym pH do termicznego przygotowania, np. kacek i basenów itp.

➤ Nasz Plus

- zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady,
- po wyschnięciu nie pozostawia plam,
- nie pieni się,
- dobre właściwości myjące.



Kanister płaski

(na zdjęciu thermosept® SKS)

Rozmiary (wys. x dł. x szer.)

219 x 244 x 143 mm



Kanister specjalny

(na zdjęciu thermosept® SKS)

Rozmiary (wys. x dł. x szer.)

247 x 195 x 149 mm

Specjalne kanistry

Jako alternatywę dla standardowych 5 l kanistrów wykorzystywanych do manualnego mycia instrumentów medycznych, schülke oferuje także – do określonych obszarów aplikacji, np. myjni do utensyliów – specjalnie zaprojektowane, wyższe i węższe kanistry.

➤ Nasz Plus

- łatwa obsługa,
- zapobiega pomyłkom produktów dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika,
- wielokrotnego użytku,
- szybkie i łatwe podłączenie w ciągu kilku minut,
- do zastosowania w myjniach ETD3, ETD4 i MINI ETD2.

Manualne mycie narzędzi



Opakowanie

2 l

gigazyme®

Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestetycznego

➤ Nasz Plus

- na bazie enzymów i niejonowych tenzydów,
- nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów,
- doskonale właściwości myjące,
- doskonała tolerancja materiałowa,
- zawiera substancje chroniące przed korozją,
- możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych,
- płynny koncentrat.

Stężenie / czas kontaktu	3 – 5 min
0,5-1%	przy normalnym zanieczyszczeniu
10%	przy silnym zanieczyszczeniu

Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe

Manualna dezynfekcja wtępna narzędzi



gigazyme® actifoam +

Opakowanie 750 ml

Enzymatyczna pianka do wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (wyrób medyczny klasy li b) - zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach; do stosowania bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocessowaniem.

Spektrum działania: B, V, Tbc, V (osłonkowe)



gigazyme® X•tra

Opakowanie 2 l | 5 l

Enzymatyczny środek do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestetycznego (wyrób medyczny klasy li b), zawierający kompleks enzymów i substancji powierzchniowo czynnych, może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.

Spektrum działania: B, V, V (osłonkowe)



disclean® extra

Opakowanie 5 kg | 1 l z wbudowanym systemem dozującym

Płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestetycznego, metali kolorowych, szkła, porcelany i plastiku (wyrób medyczny klasy li b), na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Spektrum działania: B, F, Tbc, V (osłonkowe)

Wanienki do dezynfekcji narzędzi



Wszystkie typy wanienek zawierają pokrywę oraz wewnętrzne sito. Wysoka kompatybilność materiałowa.



	Wymiary wewnętrzne w mm (dl. x szer. x wys.)	Wymiary zewnętrzne w mm (dl. x szer. x wys.)
wanienka 3 l	250 X 150 X 120	300 X 185 X 125
wanienka 5 l	500 X 170 X 120	555 X 205 X 135
wanienka 10 l	340 X 260 X 170	400 X 300 X 180
wanienka 30 l z kranikiem	560 X 370 X 225	620 X 405 X 240

Reprocesowanie maszynowe

➤ Proces termiczny




➤ Proces chemiczno-termiczny



➤ Myjnie do kaczek i basenów



➤ Myjnie do butów

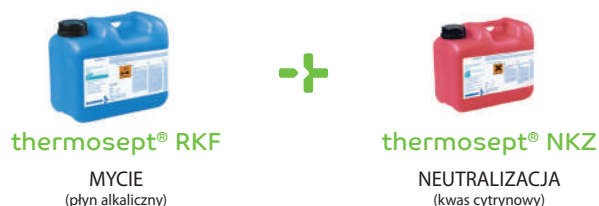

LUB



➤ Mycie i dezynfekcja wózków i łóżek



hyclick® system Wyższy poziom bezpieczeństwa: Szczelne połączenie butelki z pompką



Doskonały do stosowania w miejscu świadczenia opieki

Butelka hyclick®

- niższe koszty – brak konieczności przygotowania systemu dozującego do ponownego użycia,
- wyższy poziom bezpieczeństwa – dzięki innowacyjnemu, kontrolnemu klipsowi pierwszego otwarcia,
- opakowanie jednorazowego użytku,
- pompka i butelka stanowią integralną całość,
- ponowne użycie pompki nie jest możliwe, dzięki zastosowaniu zamknięcia typu „non removal”,
- zapewnia kontrolę pierwszego użycia,
- pełnia zalecenia DGKH/RK.

Każdorazowo po opróżnieniu butelki hyclick® wykorzystywana jest nowa butelka hyclick® z pompką, **co zapewnia prostą wymianę butelek.** Skuteczna ochrona przed skażeniem.

hyclick® do szerokiej gamy zastosowań.



dozownik hyclick®



możliwość użycia bez dodatkowych akcesoriów



uchwyt ścienny



uchwyt na łóżko



uniwersalny uchwyt do butelek

Możliwość indywidualnego dopasowania systemu hyclick®.



butelka hyclick® desderman® care
Zawartość kartonu
20 x 500 ml
10 x 1000 ml



butelka hyclick® desmanol® pure
Zawartość kartonu
20 x 500 ml
10 x 1000 ml



butelka hyclick® z emulsją myjącą sensiva®
Zawartość kartonu
20 x 500 ml
10 x 1000 ml



butelka hyclick® z emulsją myjącą esemtan®
Zawartość kartonu
20 x 500 ml
10 x 1000 ml

butelka hyclick® z emulsją myjącą s&m
Zawartość kartonu
20 x 500 ml
10 x 1000 ml



hyclick® system

➔ Dozowniki



dozownik łokciowy uniwersalny SM2

Dozownik łokciowy uniwersalny SM2 przeznaczony do butelek 500 – 1000 ml

➔ Nasz Plus

- atrakcyjny, solidny plastikowy dozownik,
- możliwość regulacji wypływu płynu od 1 do 3 ml,
- specjalna konstrukcja pompki gwarantuje brak możliwości wtórnego zakażenia oraz absolutną szczelność,
- zamknięcie butelki chronione – poprzez zawór ochronny,
- demontowana pompka,
- stale widoczny poziom mydła/środka do dezynfekcji,
- zawór wylotowy posiada zabezpieczenie chroniące przed kapaniem płynu, wysychaniem i zabezpiecza przed wtórnym zakażeniem,
- prosty w utrzymaniu higieny.



dozownik hyclick®

Dozownik przeznaczony do butelek hyclick®

➔ Nasz Plus

- system jednego kliknięcia dla łatwej i szybkiej wymiany butelki,
- optymalna ochrona przed kontaminacją,
- wbudowana pompka stanowiąca integralną całość z butelką,
- łatwy w utrzymaniu czystości,
- regulacja dozowania: ok. 1,5 ml i 3 ml,
- łatwy w montażu.



dozownik KHL 1000 i KHL 500

➔ Nasz Plus

- regulacja dozy od 0,75 ml do 1,5 ml,
- dozownik aluminiowy/anodyzowany (efekt bakteriostatyczny),
- prosty montaż,
- możliwość autoklawowania i mycia w zmywarce,
- KHL 500 na butelki 500 ml,
- KHL 1000 na butelki 1-litrowe typu euro.

System dozowania do przygotowywania roztworów roboczych



dozownik Promax-4P-B 14 l/min
możliwość podłączenia czterech płynów

dozownik Promax-PXB1F16S
możliwość podłączenia jednego płynu



dozownik ProWash z węzłem 15 m i pistoletem rozpryskowym, który posiada funkcję płukania i podłączenia dwóch płynów

Uchwyty



Produkt | Wymiary

butelka 500 ml z kwadratową podstawą

Wymiary (wys. x szer. x dł.)
114 x 83 x 80 mm

butelka 1000 ml z kwadratową podstawą

Wymiary (wys. x szer. x dł.)
135 x 94 x 115 mm

uchwyt ścienny do butelek z kwadratową podstawą

Uchwyty ścienne z tworzywa sztucznego

+ Nasz Plus

- możliwość stosowania z butelkami 500 albo 1000 ml, a także z butelkami hyclick®,
- wykonanie ze stabilnego tworzywa sztucznego,
- cztery otwory do nawiercenia z tyłu,
- odporność na działanie alkoholu.



Produkt | Wymiary

butelka 500 ml z uniwersalną podstawą

Wymiary (wys. x szer. x dł.)
105 x 78 x 130 mm

butelka 1000 ml z uniwersalną podstawą

Wymiary (wys. x szer. x dł.)
125 x 85 x 160 mm

uniwersalny uchwyt na butelki z kwadratową podstawą

Uchwyt na butelkę do łatwego montażu na ramach rurkowych

+ Nasz Plus

- odpowiedni do pionowych i poziomych ram rurkowych (np. ramy łóżka albo wózka szpitalnego),
- możliwość obrotu o 360°,
- możliwość stosowania z butelkami 500 albo 1000 ml, a także z butelkami hyclick®,
- wykonanie ze stali nierdzewnej,
- łatwość dezynfekcji,
- uchwyt antypoślizgowy.



uchwyt na łóżko do butelki 500 ml lub 1 l

Uchwyt na łóżko do prostego montażu na ramie łóżka

+ Nasz Plus

- możliwość stosowania z butelkami 500 albo 1000 ml, a także z butelkami hyclick®,
- bardzo stabilna konstrukcja z drutu,
- do przyłączenia do ramy łóżka,
- nadaje się do sterylizacji w autoklawie,
- okrągły materiał ze stali nierdzewnej.

Produkt | Wymiary

1 butelka 500 ml z kwadratową podstawą (uchwyt prosty)

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 110 x 70 x 120 mm

2 butelka 500 ml z kwadratową podstawą (uchwyt wygięty)

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 110 x 70 x 120 mm

1 butelka 1000 ml z kwadratową podstawą (uchwyt prosty)

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 145 x 85 x 150 mm

2 butelka 1000 ml z kwadratową podstawą (uchwyt wygięty)

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 145 x 85 x 150 mm

Uchwyty



Produkt | Wymiary


Uchwyt ścienny do chusteczek mikroZid® wiper/mikroZid® sensitive wiper

Wymiary (wys. × szer. × dł.)
145 x 74 x 73 mm

uchwyt ścienny do chusteczek mikroZid® wiper/mikroZid® sensitive wiper
Uniwersalny uchwyt ścienny do puszek z chusteczkami mikroZid® sensitive wiper i mikroZid® wiper

+ Nasz Plus

- możliwość stosowania z chusteczkami mikroZid® AF wiper i chusteczkami mikroZid® sensitive wiper,
- stabilna konstrukcja z drutu,
- dwa otwory do nawiercenia z tyłu,
- nadaje się do sterylizacji w autoklawie,
- okrągły materiał ze stali nierdzewnej.

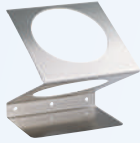

Produkt | Wymiary

Uchwyt ścienny Jumbo

Wymiary (wys. × szer. × dł.)
176 x 150 x 145 mm

uchwyt ścienny do chusteczek mikroZid® Jumbo wiper

Do puszek albo pudełek z chusteczkami mikroZid® AF Jumbo wiper, chusteczkami mikroZid® PAA wiper i chusteczkami mikroZid® sensitive Jumbo wiper

+ Nasz Plus

- możliwość stosowania w połączeniu z chusteczkami mikroZid® AF Jumbo wiper, chusteczkami mikroZid® sensitive Jumbo wiper i chusteczkami mikroZid® PAA wiper,
- trzy otwory do nawiercenia z tyłu,
- nadaje się do sterylizacji w autoklawie.



uchwyt ścienny do miękkich opakowań
Uchwyt ścienny do miękkich opakowań mikroZid®

+ Nasz Plus

- 1 • odpowiedni do wszystkich miękkich opakowań chusteczek mikroZid® wiper,
 - wytrzymały uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej,
 - przygotowane otwory do nawiercenia w celu montażu ściennego,
- 2 • odpowiedni do wszystkich miękkich opakowań chusteczek mikroZid® wiper,
 - wytrzymały uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej,
 - łatwość dezynfekcji,
 - jednoręczne wyjmowanie do ostatniej chusteczki.

Produkt | Wymiary

1 Uchwyt ścienny do miękkich opakowań

Wymiary (wys. × szer. × dł.) 130 x 200 x 90 mm

2 Uchwyt ścienny do miękkich opakowań premium

Wymiary (wys. × szer. × dł.) 235 x 170 x 155 mm

* podajnik nie znajduje się w zestawie

Wanienki dezynfekcyjne







Wanienki do dezynfekcji narzędzi


Wszystkie typy wanienek zawierają pokrywę oraz wewnętrzne sito

+ Nasz Plus

- doskonała kompatybilność materiałowa ze wszystkimi środkami myjąco-dezynfekcyjnymi.

Produkt	Wymiary wewnętrzne w mm (dł. x szer. x wys.)	Wymiary zewnętrzne w mm (dł. x szer. x wys.)
 <p>wanienka 3 l wieko białe wieko przezroczyste</p>	<p>250 x 150 x 120 250 x 150 x 120 250 x 150 x 120</p>	<p>300 x 185 x 125 300 x 185 x 125 300 x 185 x 125</p>
 <p>wanienka 5 l wieko białe wieko przezroczyste</p>	<p>500 x 170 x 120 500 x 170 x 120</p>	<p>555 x 205 x 135 555 x 205 x 135</p>
 <p>wanienka 10 l wieko białe wieko przezroczyste</p>	<p>340 x 260 x 170 340 x 260 x 170</p>	<p>400 x 300 x 180 400 x 300 x 180</p>
 <p>wanienka 30 l wieko białe / z kranikiem wieko przezroczyste / z kranikiem wieko białe / bez kranika wieko przezroczyste / bez kranika</p>	<p>560 x 370 x 225 560 x 370 x 225 560 x 370 x 225 560 x 370 x 225</p>	<p>620 x 405 x 240 620 x 405 x 240 620 x 405 x 240 620 x 405 x 240</p>

W razie potrzeby każdy element jest również dostępny osobno.
Nie nagrzewać do temperatury powyżej 55°C.

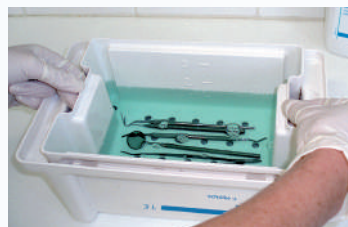

Artykuły ułatwiające stosowanie




Spryskiwacz do butelki

- 1 pompka rozpylająca do skóry i antyseptyki, do 500 ml i 1 l, CЄ,
- 2 pompka rozpylająca do środków do dezynfekcji powierzchni, na bazie alkoholu, do 500 ml i 1 l,
- 3 pompka do piany, do butelek 500 ml i 1 l



Klucz do kanistra

- do kanistrów 5 i 10 l,
- do kanistrów 20 i 25 l,
- do butelek typu euro 1 l / kanister 5, 10, 20 i 25 l / beczka 200 l

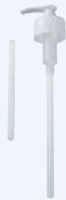

Pompka do butelki

- do 500/1000 ml (3 ml/naciśnięcie),
- do butelek typu euro 1 l (3 ml/naciśnięcie)



Kranik do kanistra

- do kanistrów 5 i 10 l,
- do kanistrów 20 i 25 l



Pompka do kanistra

- do kanistrów 5 i 10 l (20 ml/naciśnięcie),
- do kanistrów 20 i 25 l (20 ml/naciśnięcie)



Urządzenie dozujące z adapterem

- do kanistrów 5, 10, 20 i 25 l



Urządzenie dozujące

- do butelek 2 l
- Nieodpowiednie do środków dezynfekujących do jakichkolwiek zastosowań i środków do czyszczenia wyrobów medycznych. Urządzenie dozujące może być stosowane wyłącznie z następującymi produktami:
 - antifect® plus
 - s&m Pflegeadditiv
 - s&m Schaumreiniger A
 - antifect® S
 - s&m Reinigungsadditiv
 - s&m Schaumreiniger S.



Klips


- normalny do 50 ml/100 ml/150 ml,
- rozsuwany do 50 ml/100 ml/150 ml



Dozownik ścienny

Uchwyt naścienny

- do 1000 ml



► Efektywna ochrona
dzięki skutecznej
dezynfekcji narzędzi

Indeks

Produkt	Wielkości opakowań	Strona
Artykuły ułatwiające stosowanie		79
aspirmatic®	Karton zawierający 5 butelek 2 l	52
aspirmatic® cleaner	Karton zawierający 5 butelek 2 l	53
balmea®	Karton zawierający 20 butelek 500 ml	17
chirosan® plus	Karton zawierający 12 opakowań 500 g Karton zawierający 1 opakowanie 1,5 kg Karton zawierający 1 opakowanie 2,5 kg Karton zawierający 1 opakowanie 6 kg	61
chloramix® DT	Karton zawierający 6 opakowań (w jednym opakowaniu 300 tabletek*3,3 g=1 kg)	49
desam® effekt +	Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 l	47
desam® extra	Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 kg	47
desam® OX	Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 kg	48
desam® prim	Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 l Kanister 15 l	48
desam® spray	Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 l	42
desderman®	Karton zawierający 30 butelek 100 ml Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem hyclick® 500 ml Karton zawierający 10 butelek 1 l Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem hyclick® 1 l	10
desderman® care	Karton zawierający 30 butelek 100 ml Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem 1 l Karton zawierający 10 butelek typu euro 1 l Karton zawierający kanister 5 l Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem hyclick® 1 l Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem hyclick® 500 ml	10
desderman® care gel	Karton zawierający 30 butelek 100 ml Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem 1 l Karton zawierający 10 butelek typu euro 1 l	10
desmanol® pure	Karton zawierający 30 butelek 100 ml Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem 1 l Karton zawierający 10 butelek typu euro 1 l Kanister 5 l Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem hyclick® 1 l Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem hyclick® 500 ml	11
desprej® sensitive	Karton zawierający 20 butelek 500 ml Kanister 5 kg	46
discleen® endo PAA	Kanister 5 kg	63
discleen® extra	Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 kg	71
Dozowniki		74
esemtan® active gel	Karton zawierający 30 tubek 150 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml	17
esemtan® cleansing foam	Karton zawierający 10 aerozoli 500 ml	14
esemtan® skin lotion	Karton zawierający 30 butelek 150 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml	17
esemtan® wash lotion	Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem 1 l Karton zawierający 10 butelek typu euro 1 l Karton zawierający 10 butelek z hyclick® 1 l Karton zawierający 20 butelek z hyclick® 500 ml Kanister 5 l Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem hyclick® 1 l	13

Produkt	Wielkości opakowań	Strona
esemtan® wash mitts	Karton z 24 opakowaniami po 10 rękawiczek	14
gigasept® AF forte	Butelka 2 l Kanister 5 l	60
gigasept® FF new	Karton zawierający 5 butelek 2 l Kanister 5 l	63
gigasept® granulate plus	Karton zawierający 1 opakowanie 1,5 kg Karton zawierający 1 opakowanie 6 kg	61
gigasept® instru AF	Karton zawierający 5 butelek 2 l Kanister 5 l	59
gigasept® PAA	Kanister 5 l	62
gigasept® PAA concentrate	Karton zawierający 12 (2x100ml) podwójnych pojemników	62
gigasept® pearls	Karton zawierający 4 wiaderka 1,5 kg Karton zawierający 2 wiaderka 6 kg	62
gigazyme®	Karton zawierający 5 butelek 2 l Kanister 5 l	70
gigazyme® actifoam +	Karton zawierający 12 butelek 750 ml	71
gigazyme® X-tra	Karton zawierający 5 butelek 2 l Kanister 5 l	71
hyclick®	podajnik hyclick® 1000 ml podajnik hyclick® Vario 500 ml/1000 ml	73
kodan® tinktur forte bezbarwny	Karton zawierający 40 butelek 6 ml Karton zawierający 10 butelek 250 ml z pompkami rozpylającymi	21
kodan® tinktur forte barwiony	Karton zawierający 10 butelek 250 ml z pompkami rozpylającymi Karton zawierający 10 butelek 1 l Karton zawierający 5 butelek 2 l	21
kolumna dezynfekcyjna schülke	Wymiary podstawy: 450 mm x 160 mm Wysokość: ok. 1395 mm	79
mikrocount®	Karton zawierający 20 mikrocount® duo Karton zawierający 20 mikrocount® TPC Karton zawierający 20 mikrocount® TPCE/E	50
mikrozid® AF liquid	Karton zawierający 10 butelek 250 ml ze spryskiwaczem Karton zawierający 10 butelek 1 l ze spryskiwaczem Kanister 10 l	42
mikrozid® AF wipes Jumbo	Karton zawierający 10 opakowań w postaci puszek po 200 szt. chusteczek Jumbo Karton zawierający 12 opakowań w postaci woreczków do ponownego napełniania po 200 szt. chusteczek Jumbo	45
mikrozid® AF wipes	Karton zawierający 10 opakowań w postaci puszek po 150 szt. chusteczek Karton zawierający 20 opakowań w postaci woreczków do ponownego napełniania po 150 szt. chusteczek	45
mikrozid® PAA wipes	Karton zawierający 10 opakowań w postaci puszek po 50 szt. chusteczek	45
mikrozid® sensitive liquid	Karton zawierający 10 butelek 1 l Kanister 5 l	46
mikrozid® sensitive wipes Jumbo	Karton zawierający 10 opakowań w postaci puszek po 200 szt. chusteczek Jumbo Karton zawierający 12 opakowań w postaci woreczków do ponownego napełniania po 200 szt. chusteczek Jumbo	46
mikrozid® sensitive wipes	Karton zawierający 10 opakowań w postaci puszek po 120 szt. chusteczek	
mikrozid® universal liquid	Karton zawierający 10 butelek 1 l Kanister 5 l	43
mikrozid® universal wipes premium	Karton zawierający 6 opakowań chusteczek premium po 100 szt.	43
octenisept® protect & repair cream	Karton zawierający 20 tubek 50 ml	21
octenisept® oral mono	Karton zawierający 12 butelek 250 ml	28

Indeks

Produkt	Wielkości opakowań	Strona
octenident® mouthwash	Karton zawierający 10 butelek 250 ml	27
octeniderm®	Karton zawierający 10 butelek 250 ml Karton zawierający 10 butelek 1 l	22
octenilin® roztwór do irygacji ran	Karton zawierający 10 butelek 350 ml	20
octenilin® żel	Karton zawierający 20 opakowań po 20 ml z pipetami	19
octenisan® md nasal gel	Karton zawierający 20 tubek 6 ml	26
octenisan® wash lotion	Karton zawierający 30 butelek 150 ml Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 10 butelek 1 l	25
octenisan® wash mitts	Karton zawierający 24 opakowania po 10 rękawiczek w woreczku	25
octenisan® wash cap	Karton zawierający 24 woreczków z 1 szt. czepka	27
octenisept®	Karton zawierający 10 butelek 250 ml z przykrywką otwieraną od góry Karton zawierający 10 butelek 250 ml z pompką rozpylającą Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 10 butelek 1 l	19
perform®	Karton zawierający 250 saszetek po 40 g Karton zawierający 60 saszetek po 40 g Karton zawierający 4 puszki po 900 g	49
primasept® wash	Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 10 butelek 1 l Kanister 5 l	11
prosavon®	Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 l	14
prosavon® scrub+	Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml Karton zawierający 12 butelek 1 l Kanister 5 l	25
quartamon® med	Karton zawierający 5 butelek 2 l Kanister 5 l	48
rotasept®	Karton zawierający 5 butelek 2 l	52
s&m wash lotion	Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem 1 l Karton zawierający 10 butelek typu euro 1 l Karton zawierający 10 butelek z hyclick® 1 l Karton zawierający 20 butelek z hyclick® 500 ml	13
schülke optics lotion	Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml	12
schülke wipes wipes mini	<u>Dozowniki do wilgotnych chusteczek</u> schülke wipes 40 podajnik w postaci wiaderka (1 podajnik w postaci wiaderka) schülke wipes 40 podajnik w postaci wiaderka (5 podajników w postaci wiaderka) schülke wipes 100/111 podajnik w postaci wiaderka (1 podajnik w postaci wiaderka) schülke wipes 100/111 podajnik w postaci wiaderka (5 podajników w postaci wiaderka) schülke wipes 70 podajnik w postaci pudełka (1 podajnik w postaci pudełka) schülke wipes 70 podajnik w postaci pudełka (5 podajników w postaci pudełka) schülke wipes 100/111 podajnik w postaci pudełka (1 podajnik w postaci pudełka) schülke wipes 100/111 podajnik w postaci pudełka (5 podajników w postaci pudełka) <u>Wipes</u> schülke wipes 40 (Karton zawierający 10 opakowań z 40 chusteczkami) schülke wipes 70 (Karton zawierający 6 opakowań z 70 chusteczkami) schülke wipes 100 (Karton zawierający 6 opakowań z 100 chusteczkami) schülke wipes 111 (Karton zawierający 6 opakowań z 111 chusteczkami)	39

Produkt	Wielkości opakowań	Strona
schülke wipes safe & easy	<u>schülke wipes safe & easy bag-in-box</u> Karton zawierający 6 wiaderek z 111 chusteczkami Karton zawierający 10 podajników w postaci pudełka <u>schülke wipes safe & easy bagless</u> Karton zawierający 6 wiaderek z 130 chusteczkami	39
schülke wound pad	Karton zawierający 4 opakowania po 3 sztuki białych, niebieskich i czerwonych wound pad'ów Karton zawierający 1 opakowanie z 10 sztukami niebieskiego wound pad	20
sensiva® dry skin balm	Karton zawierający 30 butelek 150 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml	16
septoderm® płyn	Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 6 butelek 1 l	12
septoderm® żel	Karton zawierający 20 butelek 500 ml Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml Karton zawierający 12 butelek 1 l typu "Euro" Kanister 5 l	12
sensiva® wash lotion	Karton zawierający 20 butelek z dozownikiem 500 ml Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem 1 l Karton zawierający 10 butelek typu euro 1 l Karton zawierający 10 butelek z hyclick® 1 l Karton zawierający 20 butelek z hyclick® 500 ml Kanister 5 l Karton zawierający 10 butelek z dozownikiem hyclick® 1 l	13
terralin® PAA	Karton zawierający 12 (2x80 ml) podwójnych pojemników	49
terralin® protect	Karton zawierający 500 saszetek 20 ml Karton zawierający 5 butelek 2 l Kanister 5 l Kanister 20 l Beczka 200 l Pojemnik 500 l	47
thermosept® alka clean forte	Kanister 5 kg	65
thermosept® BSK	Kanister 5 kg Kanister 20 l Beczka 200 kg	67
thermosept® ED	Kanister 5 l Kanister 20 l Beczka 200 l	68
thermosept® EndoCleaner	Kanister 5 l 6-pinowy kanister 5 l	68
thermosept® ER	Kanister 5 l Kanister 20 l	68
thermosept® NDR	Kanister 20 l Beczka 200 kg	67
thermosept® NKP	Kanister 6 kg	67
thermosept® NKZ	Kanister 5 kg	66
thermosept® PAA	<u>thermosept® PAA base</u> Karton zawierający 2 kanistry 5 l (płaskie) Beczka 200 l <u>thermosept® PAA base Adapter</u> Kanister 4 l <u>thermosept® PAA additive</u> Karton zawierający 2 kanistry 5 l (płaskie) Beczka 200 l	69
thermosept® RKF	Kanister 5 kg	66
thermosept® SKS	Kanister 5 kg (specjalny kanister) Kanister 5 kg	70
thermosept® X-tra	Kanister 5 l Kanister 10 l Kanister 20 l Beczka 200 l Pojemnik 500 l	65
Uchwyty		76-77



schulke na świecie:

Australia

Schulke Australia Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113
Phone +61 2 8875 9300
Fax +61 2 8875 9301

Austria

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
1070 Vienna
Phone +43 1 523 25 01 0
Fax +43 1 523 25 01 60

Brazylia

Vic Pharma Indústria e
Comércio Ltda.
Taquaratinga/SP – CEP
15900-000
Phone +16 3253 8100
Fax +16 3253 8101

Chiny

Shanghai Representative
Office
Shanghai 200041
Phone +86 21 62 17 29 95
Fax +86 21 62 17 29 97

Czechy

Schulke CZ, s.r.o.
73581 Bohumín
Phone +420 558 320 260
Fax +420 558 320 261

Francja

Schülke France SARL
92800 Puteaux, Paris La Défense
Phone +33 1 42 91 42 42
Fax +33 1 42 91 42 88

Indie

Schulke India Pvt. Ltd.
New Delhi 110044
Phone +91 11 30796000
Fax +91 11 42595051

Włochy

Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20158 Milano
Phone +39 02 40 26 590
Fax +39 02 40 26 609

Malezja

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd.
47301 Petaling Jaya, Selangor
Phone +60 3 78 85 80 20
Fax +60 3 78 85 80 21

Holandia

Schülke & Mayr Benelux B.V.
2031 CC Haarlem
Phone +31 23 535 26 34
Fax +31 23 536 79 70

Nowa Zelandia

Schulke New Zealand Limited
Auckland 1010
Phone +61 2 8875 9300
Fax +61 2 8875 9301

Polska

Schulke Polska Sp. z o.o.
02-305 Warszawa
Phone +48 22 11 60 700
Fax +48 22 11 60 701

Rosja

Moscow Representative Office
123001, Moscow
Phone +7 499 270 58 75
Fax +7 962 902 77 15

Singapur

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapore 159410
Phone +65 62 57 23 88
Fax +65 62 57 93 88

Słowacja

Schulke SK, s.r.o.
97101 Prievidza
Phone +421 46 549 45 87
Fax +420 558 320 261

Szwajcaria

Schülke & Mayr AG
8003 Zurich
Phone +41 44 466 55 44
Fax +41 44 466 55 33

Wielka Brytania

Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Phone +44 114 254 35 00
Fax +44 114 254 35 01

USA

Schülke inc.
Fairfield, NJ 07004
Phone +1 973 770 7300
Fax +1 973 770 7302

... plus nasi międzynarodowi dystrybutorzy

schulke →

Autoryzowany przedstawiciel
Schulke Polska Sp. z o.o.
Eurocentrum Office Complex
Budynek Delta
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
Telefon: 22 11 60 700
Fax: 22 11 60 701
www.schulke.pl