

MEDISEPT chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

Wydajne chusteczki do rąk i powierzchni o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy i ograniczonym wirusobójczym (działają m.in. na wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczk typu B i C i wirusa Rota). Przebadane dermatologicznie.



Działa
w 30 sek.



Opakowanie
50 szt.



Dezynfekuje
i chroni dłonie



Dezynfekuje
powierzchnie

Cechy produktu:

- › Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
- › Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500)
- › Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m²
- › Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m² przy podwójnym przetarciu*
- › Rozmiar chusteczki 190 x 150 mm

Zastosowanie:

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni to wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk, sprzęt medyczny i akcesoria wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS. Produkt ze względu na przeznaczenie do skóry zawiera dodatki substancji pielęgnujących, które nawilżają dłonie.

Korzyści dla użytkowników:

- › Zalecane do rąk i małych powierzchni w obszarze medycznym i miejscach publicznych
- › Wygodne w użyciu
- › Delikatny świeży zapach
- › Zawierają glicerynę – substancję nawilżającą

* Test wykonano w oparciu o metodykę normy EN 16615 dla testu czteropolowego, na porowatej powierzchni, w temp. 24°C

MEDISEPT chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

Substancja czynna w 100 g produktu:

Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N''-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g.

Wymiar chusteczki (mm): 190 x 150 mm

Gramatura włókniny: 50 g/m²

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6678/16

Środki ostrożności: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem.

Karta charakterystyki produktu dostępna na stronie www.medisept.pl

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Spektrum wg normy EN 14885

Spektrum wg normy EN 14885	Czas
Bakterie	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	30 sek.
Prątki grzyźlicy (<i>M. terrae</i>)	30 sek.
Wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, grypa, Herpes simplex)	30 sek.
Wirus Rota	45 sek.

Opakowania handlowe

50 szt. chusteczek w opakowaniu typu flow pack z twardym okienkiem, samoprzylepnym



AdMed s.c.

infolinia: + 48 792 863 761

Tel./Fax. (62) 30 70 666 / (62) 751 24 02

Tel. Mobile: 792 863 758 – 775

e-mail: [klient@admed.org.pl](mailto: klient@admed.org.pl), [sklep@admed.org.pl](mailto: sklep@admed.org.pl)

www.admed.org.pl