

SZYBKO DZIAŁAJĄCY ALKOHOLOWY PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

Incidin Liquid Spray

Szybka i niezawodna dezynfekcja

Wszędzie tam, gdzie konieczne jest
szybkie działanie i błyskawiczne schnięcie
powierzchni wyposażenia medycznego.

- ▲ Nie zawiera aldehydów
- ▲ Wysycha bez pozostałości
- ▲ Przyjemny zapach



Incidin Liquid Spray

Szybka i niezawodna dezynfekcja

Dlaczego Incidin Liquid Spray?

Preparat cechuje szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota. Posiada optymalnie dobrany skład wykorzystujący synergistyczne działanie poszczególnych substancji czynnych. Nie zawiera aldehydów, posiada przyjemny zapach. Gotowy do użycia. Wyróżnia się niezwykle krótkim czasem działania oraz przeprowadzonymi na szeroką skalę badaniami tolerancji materiałowej. Produkt posiada opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka nr OP-ZF/539/K-27/03/15.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Bezpieczna, pewna dezynfekcja wszystkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholi, również w obszarach podwyższonego ryzyka.

- ▲ Dobre pokrycie dezynfekowanej powierzchni, szybkie wysychanie bez pozostałości.
- ▲ Doskonała tolerancja przez użytkowników.
- ▲ Przyjemne warunki pracy.
- ▲ Łatwe stosowanie, możliwość natychmiastowego użycia.
- ▲ Szybko zapewnia bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.
- ▲ Najlepsze z możliwych zabezpieczenie użytkownika.
- ▲ Możliwość zastosowania do: metali, tworzyw sztucznych oraz odpornych na działanie alkoholi powierzchni lakierowanych.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
EN 16615 Test 4 pól (warunki brudne) bakteriobójczy	1 min
EN 16615 Test 4 pól (warunki brudne) drożdżobójczy	1 min
EN 14348 (warunki czyste i brudne) prątkobójczy	1 min
EN 1276 (warunki czyste i brudne) bakteriobójczy	5 min
Adeno*	1 min
Papova*	10 min
Rota*	30 sek.
Noro* (testowano na mysim Norowirusie)	10 min
Szybka dezynfekcja powierzchni bez udziału czynnika mechanicznego wg DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), metodyka 2001r. (warunki czyste i brudne), bakteriobójczy (MRSA), drożdżobójczy, prątkobójczy	1 min
Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004, wirusobójczy wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV)	30 sek.
Parametry wg metodyki PZH i IGiChP – B, F	1 min
Parametry wg metodyki PZH i IGiChP – B, F, Tbc	5 min

*Zgodnie z DVV 2008 (Niemieckie Stowarzyszenie Zwalczenia Chorób Wirusowych)

SZYBKO DZIAŁAJĄCY ALKOHOŁOWY PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Szybko działający preparat dezynfekcyjny do sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej, a także miejsc trudno dostępnych, szczelin w wyrobach medycznych i wszelkich małych powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Roztwór gotowy do użycia, do przecierania lub spryskiwania. Preparat nanieść na suchą ściereczkę, przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia lub z odległości 30 cm spryskać powierzchnię (ok. 40 ml na m²) i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku dezynfekcji urządzeń elektrycznych sprawdzić zawsze odłączenie aparatu od sieci.

SKŁAD

W 100 g jako substancje aktywne zawiera: 35,0 g 2-propanol, 25,0 g 1-propanol, 0,375 g amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych o działaniu mikrobójczym (20%).

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Butelka 650 ml ze spryskiwaczem	12 szt.	3041660
Butelka 1 l ze spryskiwaczem	12 szt.	3041620
Kanister 5 l	2 szt.	3041640

OPINIE

Liczne badania mikrobiologiczne, wirusologiczne, toksykologiczne i ekologiczne - na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie. Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.

Producent:
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab - Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Dystrybutor:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
www.ecolab.pl

CE 0297

ECOLAB