

INNOWACYJNA SPOROBÓJCZA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

SPOROBÓJCZE gotowe do użycia produkty do mycia i dezynfekcji z szybkodziałającym H_2O_2 ™

Innowacyjna formuła Incidin OxyFoam S i Incidin OxyWipe S zapewnia szereg korzyści płynących z zastosowania opatentowanego* roztworu nadtlenku wodoru.


Środki te są skuteczne wobec szerokiego spektrum bakterii, wirusów, spor oraz nie pozostawiają żadnych czynnych pozostałości na powierzchni dzięki dużej szybkości parowania.

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S zapewniają:

- ▲ Działanie sporobójcze i wirusobójcze
- ▲ Szybko działający H_2O_2 ™
- ▲ Zgodność z normą EN 16615
- ▲ Substancję aktywną rozkładającą się na wodę i tlen
- ▲ Doskonałą kompatybilność materiałową



NOWOŚĆ: XL

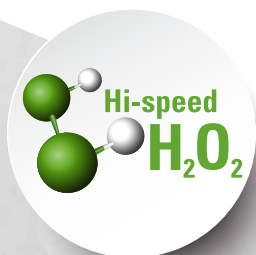

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

SPOROBÓJCZE gotowe do użycia produkty do mycia i dezynfekcji z szybko działającym H_2O_2 ™

5 MIN¹ Sporobójczy
Cl. difficile
(EN 16615)

2 MIN¹ Wirusobójczy
(warunki czyste, EN 14476)

1 MIN¹ Bakteriobójczy
(EN 16615)

1. Incidin OxyFoam S

Główne cechy	Korzyści
SKUTECZNY	Szerokie spektrum działania Krótkie czasy działania
BEZPIECZNY	Substancja aktywna rozkładająca się na wodę i tlen. Doskonała kompatybilność materiałowa
WYGODNY	Jednoczesne mycie i dezynfekcja Gotowe do użycia

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SKUTECZNOŚĆ ŚRODKA NIEROZCIEŃCZONEGO	OxyFoam S CZAS DZIAŁANIA	OxyWipe S CZAS DZIAŁANIA
Normy europejskie (warunki brudne) – Test 4 pól		
EN 16615 bakteriobójczy	1 min	2 min
EN 16615 drożdżobójczy	1 min	1 min
EN 16615 grzybobójczy	5 min	5 min
EN 16615 prątkobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy	5 min	5 min
Metodyka EN 16615 Cl.difficile**	5 min	5 min
Metodyka EN 16615 sporobójczy**	15 min	30 min
Normy Europejskie (warunki czyste i brudne)		
EN 14476 Polio	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sek.	30 sek.
EN 14476 Noro	1 min** / 15 min	15 min
Działanie wirusobójcze		
Ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HBV, HCV, HIV) - zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI*	15 sek.	30 sek.
Adeno*	30 sek.	1 min
Polyoma SV40*	30 sek.	30 sek.

* DVV 2008 r. ** warunki czyste

Testy wykonano na roztworze odcisniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615).

SKŁAD MATERIAŁOWY CHUSTECZEK

OPAKOWANIE	SKŁAD	GRAMATURA	WYMIARY
Incidin OxyWipe S 100 chusteczek	60% PET Politereftalan etylenu, 40% wiskoza	50 g/m ²	20 x 20 cm
Incidin OxyWipe S XL 50 chusteczek	60% PET Politereftalan etylenu, 40% wiskoza	50 g/m ²	25 x 37 cm

INCIDIN OXYFOAM S SPOSÓB POSTĘPOWANIA



- 1 Spryskaj powierzchnię z odległości ok. 30 cm
- 2 Przetrzyj powierzchnię upewniając się, że jest całkowicie zwilżona
- 3 Pozostaw do wyschnięcia



- 1 Nałóż środek na ręcznik jednorazowy
- 2 Przetrzyj powierzchnię upewniając się, że jest całkowicie zwilżona
- 3 Pozostaw do wyschnięcia

Producent:
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab - Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Dystrybutor/Podmiot Odpowiedzialny:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
www.ecolab.pl



SKUTECZNY BEZPIECZNY WYGODNY

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Incidin OxyFoam S: Sporobójczy, gotowy do użycia preparat w postaci piany/sprayu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych, wszystkich rodzajów powierzchni w obszarze medycznym, a także powierzchni mających kontakt z żywnością.

Incidin OxyWipe S: Sporobójcze, szybko działające, gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjno-myjące do powierzchni wyrobów medycznych, wszystkich rodzajów powierzchni w obszarze medycznym, a także powierzchni mających kontakt z żywnością.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Incidin OxyFoam S: Spryskać z odległości ok. 30 cm nierozcieńczonym preparatem dezynfekowane powierzchnie. Upewnić się, że powierzchnia została całkowicie pokryta preparatem. Pozostawić produkt przez czas działania, a następnie przetrzeć ręcznikiem jednorazowym, pozostawić do wyschnięcia. Ewentualnie, nierozcieńczony produkt nanieść na ręcznik papierowy. Przetrzeć nim dezynfekowane powierzchnie. Pozostawić do wyschnięcia. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, po zakończeniu procesu wszystkie powierzchnie mające kontakt z preparatem należy dokładnie spłukać zimną wodą.

Incidin OxyWipe S: Chusteczki wyjmować pojedynczo z pojemnika. Przetrzeć nimi dezynfekowane powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać. Należy zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie powierzchni. Po użyciu zamknąć pojemnik. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, po zakończeniu procesu wszystkie powierzchnie mające kontakt z preparatem należy dokładnie spłukać zimną wodą.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu:
Incidin OxyFoam S: koniec okresu ważności
Incidin OxyWipe S: 3 miesiące

UWAGA

Produkty nie przeznaczone do dezynfekcji końcowej inwazyjnych wyrobów medycznych. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie czynników utleniających, takich jak marmur, miedź lub mosiądz.

SKŁAD

100 g preparatu jako substancje czynne zawiera:
Incidin OxyFoam S: 1,5 g nadtlenu wodoru
Incidin OxyWipe S: 1,5 g nadtlenu wodoru.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD
Incidin OxyFoam S	6 x 750 ml	3082060
Incidin OxyWipe S	6 x 100 chusteczek	3083020
Incidin OxyWipe S XL	6 x 50 chusteczek	3092040
Incidin OxyFoam S	2 x 5L	3091800

Incidin OxyFoam S: pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 6896/17

Incidin OxyWipe S: pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 6891/17

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE STOSUJ
BEZPIECZNIE. PRZED UŻYCIEM ZAOPZNAJ
SIĘ Z ETYKIETĄ PRODUKTU. WYŁĄCZNIENIE DO
ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.