

2 W 1 - MYCIE I DEZYNFEKCJA

Aniosept Activ®

SPOROBÓJCZA DEZYNFEKCJA WYROBÓW MEDYCZNYCH

- 2 w 1 - preparat w proszku do mycia i sporobójczej dezynfekcji
- Szeroka skuteczność mikrobójcza już w 15 min (roztwór 2% o działaniu sporobójczym)
- Okres ważności produktu: 3 lata
- Nie zawiera nadboranu
- Kontrola roztworu roboczego za pomocą pasków testowych



Aniosept Activ®

Sporobójcza dezynfekcja wyrobów medycznych

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU


- Formuła uwalniająca kwas nadctowy
- W postaci białego proszku - drobne granulki
- Preparat higroskopijny (należy przechowywać w suchym miejscu)
- Dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu
- Delikatny zapach
- Wartość pH dla roztworu 1%: ok. 8,5

SPOSÓB POSTĘPOWANIA


A - mycie i dezynfekcja:



1 Rozpuścić 25 g, 50 g lub 100 g w 5 l wody w zależności od oczekiwanego stężenia (1)

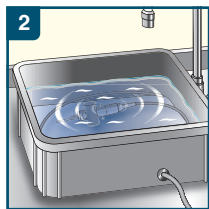

2 Całkowicie zanurzyć wyroby medyczne w roztworze produktu (czas działania: w zależności od oczekiwanego spektrum bójczego). Doczyścić szczoteczką i upewnić się, że roztwór produktu dostał się również do wewnętrznych kanałów.

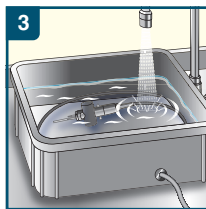

3 Dokładnie spłukać wodą o jakości wody pitnej. W przypadku endoskopów: zwrócić uwagę na zewnętrzne i wewnętrzne elementy.


Sprzęt termolabilny: Przejdź do następnego kroku (zgodnie z wewnętrzną procedurą placówki).

Sprzęt odpowiadający do sterylizacji: Dokładnie osuszyc czystym ręcznikiem i przejść do następnego kroku (zgodnie z wewnętrzną procedurą placówki).


B - dezynfekcja sporobójcza:




1 Rozpuścić 25 g, 50 g lub 100 g w 5 l wody (1)

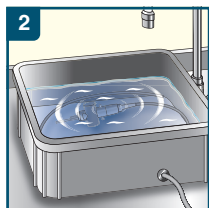

2 Zanurzyć narzędzia po wcześniejszym umyciu. Przesztyknać kanały roztworem preparatu.

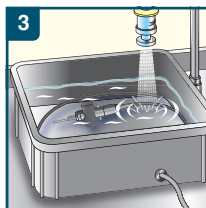

3 Spłukać dokładnie wodą sterylną lub filtrowaną.

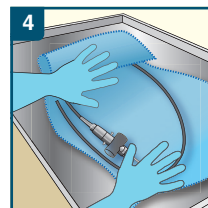

4 Osuszyc wyroby medyczne sterylnym ręcznikiem i przechowywać w warunkach aseptycznych.

(1) Przed zanurzeniem narzędzi aktywność roztworu roboczego należy skontrolować za pomocą pasków testowych. 1 miarka = 25 g

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Poniższe badania zostały przeprowadzone w warunkach brudnych: mycie i dezynfekcja

SPÉKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE %	CZAS DZIAŁANIA
DEZYNFEKCJA NISKIEGO STOPNIA	0,5	5 min
działanie bakteriobójcze	1,0	5 min
działanie drożdżakobójcze	2,0	-
DEZYNFEKCJA ŚREDNIEGO STOPNIA	0,5	60 min
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy	1,0	30 min
	2,0	15 min

Poniższe badania zostały przeprowadzone w warunkach czystych: dezynfekcja sporobójcza

SPÉKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE %	CZAS DZIAŁANIA
DEZYNFEKCJA WYSOKIEGO STOPNIA	0,5	90 min
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze, sporobójcze	1,0	60 min
	2,0	15 min

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Aniosept Activ	4 x 1 kg wiaderko	3098870
Aniosept Activ	2 x 5 kg wiaderko	3098850



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

ANIOS
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes
0459 France

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

ECOLAB®

www.ecolab.pl