

SZYBKO I OSZCZĘDNIIE

Sani-Cloth 70

Chusteczki alkoholowe

Gotowe do użycia, alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne. Łączą w sobie szybkość działania i szerokie spektrum.



Sani-Cloth 70

Chusteczki alkoholowe

Dlaczego Sani-Cloth 70?

Chusteczki na bazie alkoholu nasączone w procesie produkcji cechuje szerokie spektrum działania mikrobójczego wobec: bakterii, prątków, drożdży, wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV). Skuteczność została sprawdzona dla roztworu odcisniętego z chusteczki. Łączą w sobie mycie i dezynfekcję z wygodą i łatwością stosowania poprzez wygodne i bezpieczne dozowanie pojedynczej chusteczki bezpośrednio z pojemnika.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Odpowiednie do dezynfekcji wszystkich powierzchni w sektorze medycznym (np. w szpitalach, domach opieki, w gabinetach stomatologicznych).
- ▲ Zapewniona skuteczność w rzeczywistych warunkach pracy.
- ▲ Brak pozostałości na powierzchniach.
- ▲ Brak ryzyka błędnego przygotowania.
- ▲ Zmniejszone ryzyko wysychania chusteczek.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni z udziałem czynnika mechanicznego wg DGHM: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy (warunki czyste i brudne)	5 min.
Szybka dezynfekcja powierzchni wg metodyki DGHM 2001: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy (warunki czyste i brudne)	1 min.
EN 13727 działanie bakteriobójcze (warunki czyste i brudne)	1 min.
EN 13624 działanie drożdżobójcze (warunki czyste i brudne)	1 min.
EN 14348 działanie prątkobójcze (warunki czyste i brudne)	1 min.
Skuteczność wirusobójcza wobec wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HIV, HCV) - zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004	15 sek.

Wyniki dotyczą roztworu nierozcieńczonego.

Testy wykonano na roztworze odcisniętym z chusteczki

SKŁAD MATERIAŁOWY CHUSTECZEK

OPAKOWANIE	SKŁAD	GRAMATURA	WYMIARY
125 chusteczek	70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu	23 g/m ²	130 x 185 mm
200 chusteczek	70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu	23 g/m ²	200 x 220 mm

CE 0086

Ecolab Healthcare Europe
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

SZYBKO I OSZCZĘDNIIE

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Szybka dezynfekcja sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach Medycznych (93/42/EEC), np. sprzętu na blokach operacyjnych, sprzętu stomatologicznego.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Chusteczki wyjmować pojedynczo z pojemnika i przetrzeć dezynfekowane powierzchnie. Pozostawić do wyschnięcia, nie splukiwać. Po użyciu zamknąć pojemnik.

SKŁAD

100 ml roztworu nasączającego jako substancję aktywną zawiera: 70 ml 2-propanol.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Pojemnik 200 chusteczek	6 szt.	3080840
Pojemnik 125 chusteczek	6 szt.	3080820
Opakowanie uzupełniające 125 chusteczek	9 szt.	3080860

OPINIE

Liczne badania mikrobiologiczne, wirusologiczne, toksykologiczne i ekologiczne - na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie. Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.