



# schülke -†

Dozownik łokciowy uniwersalny SM2  
do butelek 500 ml i 1000 ml.

Dozownik łokciowy SM2 500  
do butelek 500ml.

Do aplikacji preparatów do dezynfekcji,  
mycia i pielęgnacji rąk.

## Dozownik łokciowy uniwersalny sm 2 Dozownik łokciowy sm 2 500

### Zalety

- specjalna konstrukcja pompki i zintegrowany z nią docisk do butelki zapobiega wyparowywaniu i zakażeniu preparatów
- specjalny zawór chroniący przed zakażeniem i zanieczyszczeniem
- całkowite wykorzystanie preparatu dzięki elastycznemu wężykowi zasysającemu
- możliwość dozowania w dawkach 1, 2 lub 3 ml
- łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki
- prosty montaż

### Opis

Proste i dokładne dozowanie środków do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk.

- dozowanie odpowiedniej ilości środka poprzez łatwą zmianę skoku dozownika
- system pompujący i zawór wylotowy przystosowane są do dozowania preparatów o różnej gęstości i lepkości
- hermetyczny zawór wylotowy zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu, i zakażeniom preparatów

### Zmiana preparatu

Przy zmianie preparatu wymagana jest jedynie prosta wymiana butelek i przepłukanie systemu pompującego.

### Czyszczenie


W celu wyczyszczenia dozownika część dozującą dozownika można łatwo bez użycia narzędzi odłączyć od części ściennej dozownika. Gładka i błyszcząca powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie.

### Zawór wylotowy


Zawór wylotowy jest tak zaprojektowany, że pierwsze naciśnięcie dźwigni dozownika powoduje otwarcie zaworu i swobodne wypłynięcie dozowanego preparatu (Rys. nr 1).

W ten sposób unika się ostrego, tryskającego strumienia preparatu.

Dodatkowe uszczelnienie na końcówce zamykającej zawór zapobiega kapaniu preparatu przy zamkniętym zaworze (Rys. nr 2).

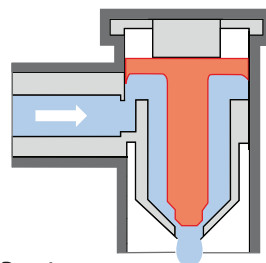

Rys. 1

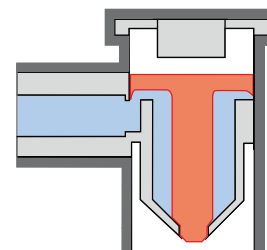

Rys. 2

### Poziom napełnienia

Poprzez przezroczyste butelki zawsze można sprawdzić poziom napełnienia (butelek) preparatem.

### Dźwignia

Może być obsługiwana przy pomocy przedramienia lub łokcia. Poprzez możliwość jej łatwego odchylenia do tyłu można w prosty sposób wymienić pompkę lub ustawić odpowiednie dozowanie.

# Dozownik łokciowy uniwersalny sm 2



## Dozownik łokciowy sm 2 500

### Wskazówki dotyczące montażu

Standardowe mocowanie:

- dwa otwory u góry i jeden otwór na dole
- Najlepsze mocowanie dozownika osiąga się poprzez wpasowanie otworów w szczeliny między płytkami ceramicznymi

### Wymiary dozownika łokciowego uniwersalnego SM2

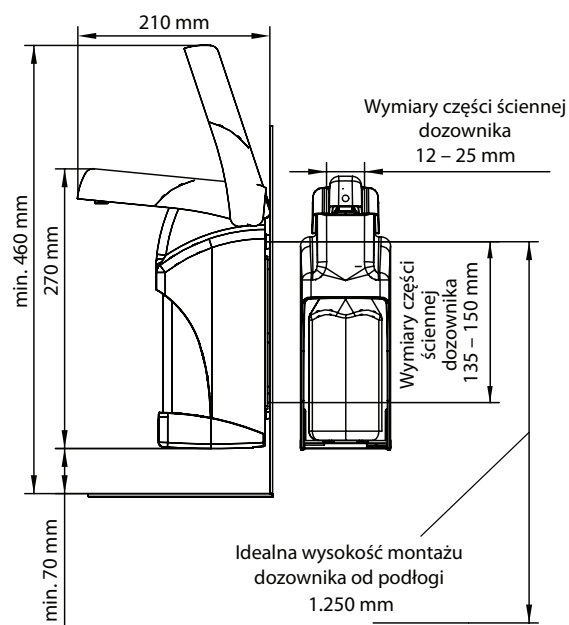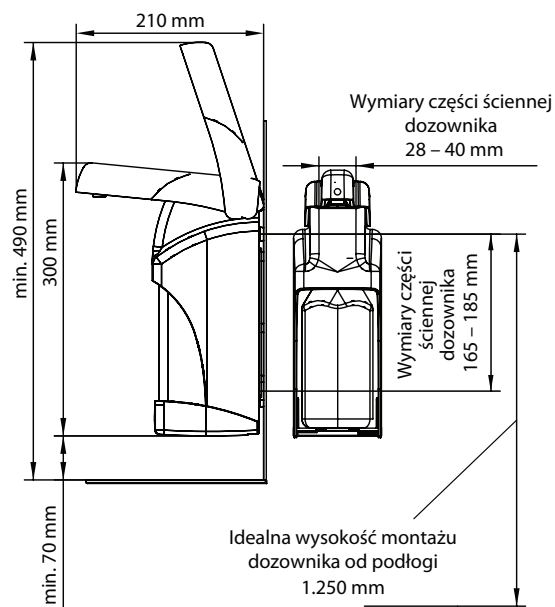

### Dane techniczne

Kompatybilność z butelkami: 500-1000 ml Dozownik łokciowy uniwersalny SM2  
500 ml dozownik łokciowy SM2 500

Możliwość dozowania: 1 ml, 2 ml, 3 ml

Materiały: obudowa z tworzywa sztucznego ABS, części metalowe ze stali nierdzewnej.