

schülke -



Dozownik hyclick®, dostosowany do specjalistycznych butelek z wbudowaną pompką hyclick®

Przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk



Bądź bezpieczny, to łatwe

Zalety:

- System jednego kliknięcia dla łatwej i szybkiej wymiany butelki
- Optymalna ochrona przed kontaminacją
- Wbudowana pompka stanowiąca integralną całość z butelką
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Regulacja dozowania: ok. 1,5 ml i 3 ml
- Prosta instalacja

Opis

Łatwe i dokładne dozowanie płynów do mycia oraz produktów do dezynfekcji rąk. Regulacja dozowania umożliwia dozowanie żądanej ilości.

Zmiana preparatu

Podczas zmiany produktów należy wymienić jedynie jednorazową butelkę. Wystarczy podnieść ramię dozownika i zmienić butelkę jednym kliknięciem, jedną ręką.

Obsługa

Dozowanie poprzez naciśnięcie ramienia dozownika łokciem lub przedramieniem.

Czyszczenie

Dozownik można demontować bez użycia narzędzi. Prosta konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję np. za pomocą chusteczek mikrozyd® universal.

Dostępne są następujące produkty w opakowaniach dopasowanych do dozownika hyclick®:

Produkt	Forma dostawy	Nr artykułu
 desderman® pure 1000 ml desderman® pure 500 ml	10/ karton 20/ karton	70000814 70000813
 desmanol® pure 1000 ml desmanol® pure 500 ml	10/ karton 20/ karton	70001795 70000817
 desderman care 1000 ml desderman care 500 ml	10/ karton 20/ karton	70002342 70002336
 sensiva® plyn do mycia 1000 ml sensiva® plyn do mycia 500 ml	10/ karton 20/ karton	70000137 70000138



Produkty

	Nr artykułu
☐ hyclick® dozownik vario 500 ml / 1.000 ml	60000045


Dane techniczne

Rozmiar produktu:	1000 ml
	500 ml z adapterem 500 ml

hyclick® wymiary:

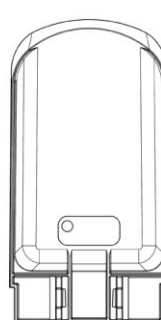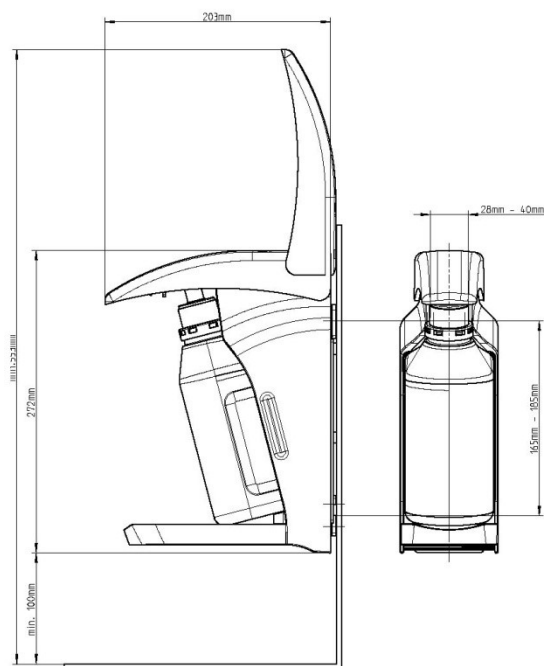


Ociekacz

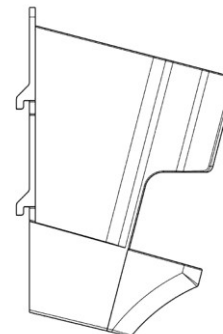


Adapter

Regulacja dozowania:

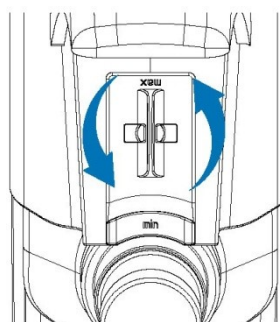


MINIMUM

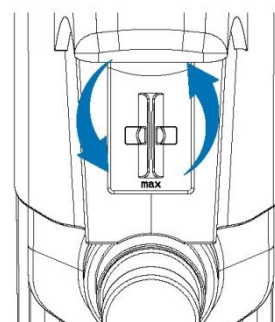

MAKSIMUM

hyclick® wymiary z adapterem 500 ml:

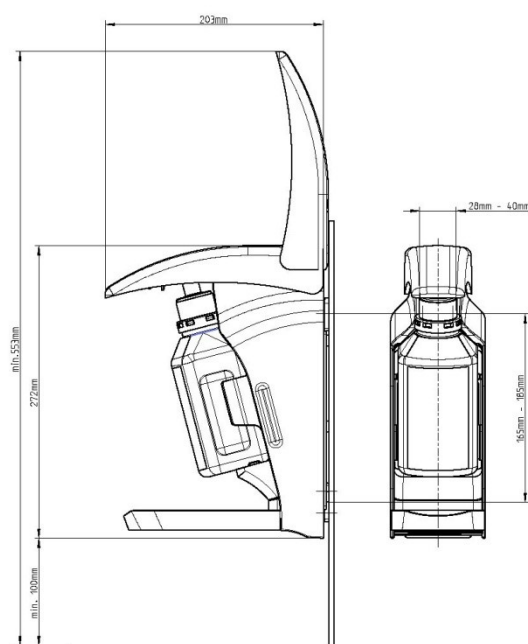

Firma Schulke & Mayr GmbH posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 13485 (nr regulacji 004567-MP23) oraz posiada system środowiskowy zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie audytu ekologicznego (nr regulacji DE-150-00003).

Dystrybucja:
Polska
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
Telefon: +48 0 22 11-60-700
Telefaks: +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com