

schülke -†



Płynny koncentrat o odczynie alkalicznym do maszynowego mycia narzędzi i wyposażenia medycznego.

thermosept® alka clean forte

Zalety

- słabo alkaliczny środek do mycia narzędzi,
- dobra tolerancja materiałowa,
- możliwość stosowania wobec aluminium,
- minimalizuje ryzyko CJK/vCJK zgodnie z informacją Instytutu Roberta Kocha,
- doskonała skuteczność mycia

Obszary zastosowania

Preparat thermosept® alka clean forte stosowany jest przede wszystkim do mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, sztywnych i giętkich endoskopów, sprzętu anestezjologicznego i kontenerów. Może być stosowany w automatycznych myjniach dezynfekcyjnych oraz myjniach tunelowych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Preparat thermosept® alka clean forte można stosować w zakresie stężeń 0,3 - 1%(3 - 10ml/l).



thermosept® alka clean forte

Dane produktu

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem nr 648/2004:
< 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 %
anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % NTA (kwas
nitylotrójociowy) i jego sole, < 5 % polikarboksylany, enzymy.
Pozostałe składniki: środki wspomagające rozpuszczalność,
inhibitory korozji

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³ / 20 °C / 1.013 hPa
Kolor	niemal bezbarwny
pH	12 - 12,8 / 20 °C / koncentrat
Tarcie, dynamiczne	ok. 3 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Temperatura zapłonu	> 70 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne

Koncentratu i roztworu użytkowego nie wolno mieszać z kwasami.

Nie używać preparatu po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
THERMOSEPT ALKA CLEAN FORTE 5kg KA	1/Kanister	147301
thermosept alka clean forte 20 l KA	1/Kanister	147308

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Air Liquide Przedsiębiorstwo należące do grupy Air Liquide
HEALTHCARE